

# テーブル(面ファスナー止め)の取扱説明書

このたびはテーブル(面ファスナー止め)をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。


- テーブルをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

## 同梱部品

- 取付ベルト (2本)
- 取付ネジ (4本)



## 仕様

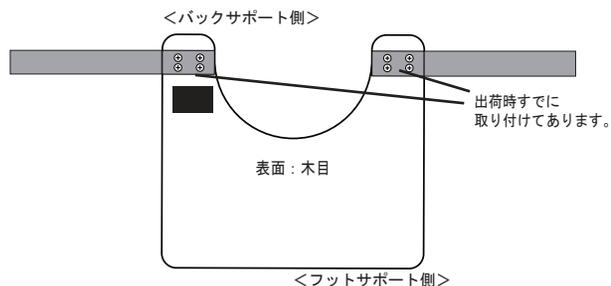

## 必要な工具

- プラスドライバー

## 取付可能な車いす

- 肘当て A スタンダードパッド
- 肘当て D ロングパッド
- 肘当て イージーパッド
- 肘当て 軽量パッド
- 30cm 以上の木製肘当て

※ここで紹介する取付ベルトの取付位置はあくまでも目安です。  
重心のバランス等を考慮して調整してください。

## 取付方法

### ① テーブルの取付位置を決めます。

**<左右位置の決定>**  
テーブルを車いすの中心に位置するように配置します。

**<前後位置の決定>**  
テーブルのバックサポート側の端を、体が窮屈にならない程度の位置に合わせます。  
※フットサポート側に寄りすぎると前方に転倒しやすくなりますので充分にご注意ください。




### ② 取付ネジを固定する位置に印をつけます。

**<目安>**  
肘当ての先端付近にベルト前端がくるようにしてください。取付ネジは肘当ての両側に1ヶつつく固定します。



### ③ 印をつけた箇所にプラスドライバーで取付ネジを固定していきます。

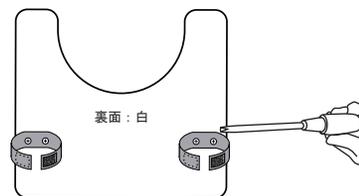

### ④ 4本の取付ベルトを車いすの肘当てに巻き付け固定します。取付ベルトは必ず4本ともしっかりと巻いてください。



## ⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。
- テーブル前端部を押さえないでください。テーブルが破損したり、車いすごと転倒する恐れがあります。
- 水に濡らさないでください。濡れた場合は速やかに水分を拭き取ってください。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800