


あなたをやさしくエスコートする...

カワムラサイクル



簡易平行棒 BP2

取扱説明書

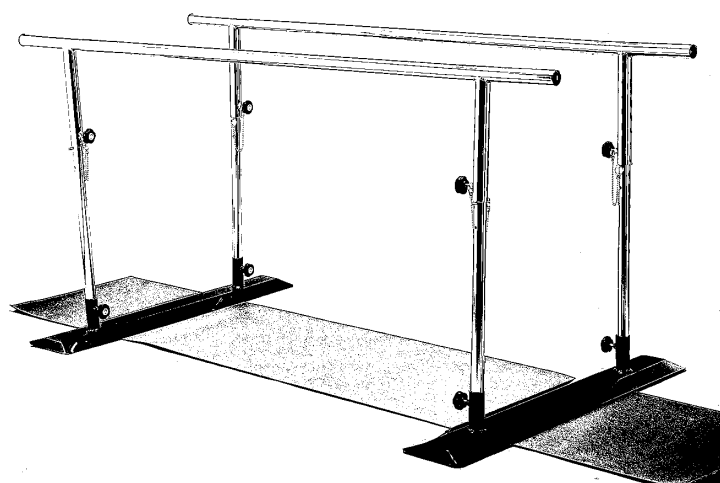

(シートは商品に含まれません。)

安全に関するご注意	2
内容物の確認	3
1. 各部名称	3
2. 組立て方	3
3. 保守・点検	4
4. 仕様	5
5. 保証	5

はじめに

使い方

点検・保証


このたびはカワムラサイクルの簡易平行棒をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

ご使用になる前に必ずお読みください。また、お読みになった後は大切に保管してください。

安全に関するご注意 ご使用になる前に必ずお読みください。

[表示マークの説明]

 **警告** この表示は「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示は「人が障害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

 **禁止** この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

以下の注意点以外であっても、無理な使用はおやめください。事故の原因になります。

禁止

この平行棒は、室内用に設計されています。平らな場所以外では、ご使用にならないでください。

警告

認知症（痴呆症）の方の場合は、部品等を飲み込むことが考えられますので、十分に注意して下さい。

傾斜地や凹凸や段差のある場所には設置しないでください。傾斜地や凹凸や段差のある場所では、不安定な状態になり、大変危険です。

簡易平行棒を火気に近付けないで下さい。



勝手に改造・分解しないでください。強度や耐久性が劣化して危険です。（保証対象外）

簡易平行棒をリハビリ訓練以外の目的に使用しないでください。

滑りやすい床面や濡れている床面では動く場合がありますので、充分ご注意ください。

湿気の多いところや雨風の当たるところに簡易平行棒を放置しないでください。サビの原因になります。

注意

必ず、お一人のみのご使用をお願いします。

《内容物の確認》

下記のもの全てそろっているかご確認ください。万が一不足等がございましたら、お手数ですがお買い求めいただいた販売店にご連絡ください。


土台 2本 支え棒 4本 ピン(クサリ付) 4本
平行棒(細) 2本 平行棒(太) 2本 ノブねじ 8ヶ

1.各部名称

はじめに

使い方

ノブねじと逆方向からピンを差し込んでください。ノブねじ側から差し込みますのピンが外れ易くなります。

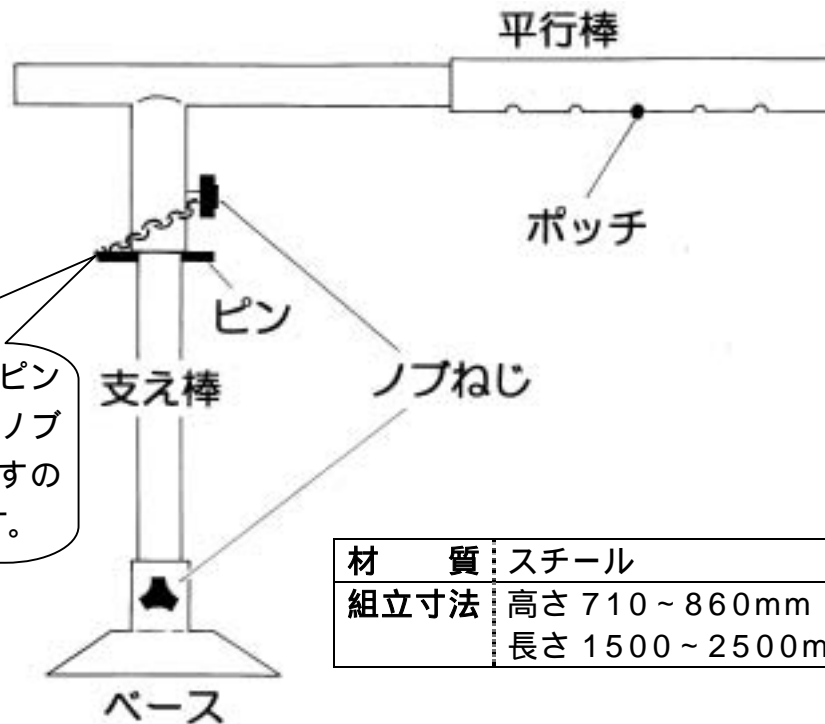


材質	スチール
組立寸法	高さ 710 ~ 860mm 長さ 1500 ~ 2500mm

2.組立て方法

長さを決めます。

使用する平行棒の長さを決めます。長さは、5段階に調節できます。

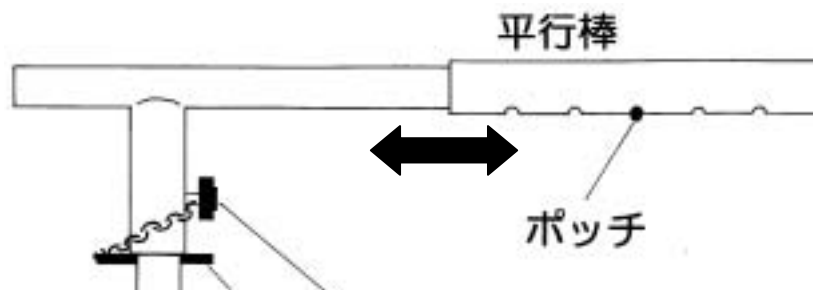

⚠ 注意

2本とも同じ長さにしてください。長さが決まりましたら、ポッチが穴から出ているのを確認してください。

ベースを置きます。

平行棒の長さに合わせて、ベースを平行に置いてください。

支え棒を穴の側を上にしてベースに差し込んでください。


平行棒の脚を支え棒に差し込みます。



平行棒の長さに対して、ベースの位置がズレていた場合、また平行棒の2本の脚を同時に差し込めない事がありますので、ご注意ください。


ピンを支え棒の穴に差し込みます。

平行棒の高さを決めて、ピンを支え棒の穴に差し込みます(4本)。平行棒が床と平行になるように、ピンは同じ高さの穴に差し込みます。

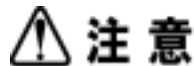

ピンがぬけると、平行棒に体重をかけた時に平行棒が下がって大変危険です。ピンは根元まで差し込んでください。また、訓練中にピンが服に引っかからないようにピンは平行に、かつ外側から内側に差し込んでください。

ノブねじをしっかりと締めてください。

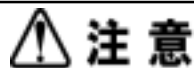

この平行棒は、鉄でできています。重いので、床などに傷をつけないようご注意ください。また、サビますと強度が落ちますので、雨などの水がかからないようご注意ください。

3.平行棒の保守、点検

ご利用前には安全点検を行ってください!!!

平行棒の高さは同じですか？

平行棒の高さを揃えてください。平行棒が曲がったり、事故の原因にもなりますので、必ず平行棒の高さを揃えてください。

平行棒の長さは同じですか？

平行棒の長さを揃えてください。平行棒が曲がったり、事故の原因にもなりますので、必ず平行棒の長さを揃えてください。

ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐ緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

4.仕 様

品名・名称	標準仕様・規格
	BP2
高 さ (mm)	720 ~ 875 (4段階調節)
長 さ (mm)	1,550 ~ 2,550 (5段階調節)
内 幅 (mm)	500
手摺外形 (mm)	32 ~ 29
全 幅 (mm)	870
重量 (Kg)	20.8
肘掛け高さ (mm)	240
材 質	スチール

5.保証

保証書

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送ください。

補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5 年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

保証期間後

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証の適用除外となる場合

- (a) ご使用による消耗品および取扱不注意による破損
- (b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- (c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- (d) 保全上の不備および弊社の特約販売店以外で行った修理や改造等による破損
- (e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損

地球の環境保護のため、
廃棄するときはそのまま放置しないで
各自治体の取り決めにしたがってください。



本社	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 - 9 - 1	TEL078-969-2800
本店サービスセンター	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3 - 9 - 1	TEL078-969-2820
仙台サービスセンター	〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生 4 - 3 - 6	TEL022-381-8350
東京サービスセンター	〒110-0013 東京都台東区入谷 1 - 8 - 3	TEL03-3874-3511
横浜サービスセンター	〒220-0073 横浜市西区岡野 2 - 12 - 9	TEL045-290-9585
名古屋サービスセンター	〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1 - 3 - 11	TEL0568-52-4800
大阪サービスセンター	〒564-0044 大阪府吹田市南金田 2 - 20 - 10	TEL06-6190-8488
福岡サービスセンター	〒819-0055 福岡市西区生の松原 1 - 18 - 3	TEL092-882-4722
神戸工場	神戸第二工場	いなみの工場
		メンテナンスセンター

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。