

室内用

“Six-Wheeled Wheelchair”

KAK-LO047

超々低床の六輪タイプ。
足こぎしやすく、
狭い場所でもこまわりが効きます。





KAK-LO (低床こまわりくん) シリーズ

自走用 (介助兼用) **20** 車輪
インチ



KAK20-40B-LO
シート:A9

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK20-40B-LO

超々低床 前後キャスタ 4 インチ (16.6kg)

TAIS:00160-000265

介助用 **16** 車輪
インチ



KAK16-40B-LO
シート:A11

参考価格 **¥178,000** 非課税

KAK16-40B-LO

超々低床 前後キャスタ 4 インチ (15.7kg)

TAIS:00160-000267


自走用 (介助兼用) **18** 車輪
インチ

KAK18-40B-LO

TAIS:00160-000266

参考価格 **¥178,000** 非課税

超々低床 前後キャスタ 4 インチ (16.4kg)

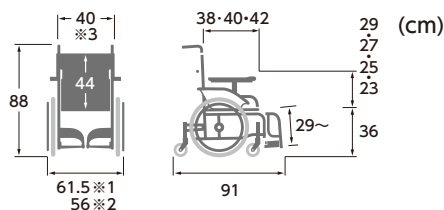

全幅
※1) 車輪20・18インチ
※2) 車輪16インチ
シート幅
※3) アームパイプ内内の寸法です。
*各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

ご注文の際ご指定ください。


3 color ●シートカラー (3色) よりお選びいただけます。



A9
緑チェック
(ポリエステル)



A11
チェック
(ポリエステル)

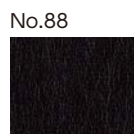

No.88
エコブラック
(ビニールレザー)

超々低床 (前座高36cm)
適合調整シート&座シート奥行調節機能等、コンパクトで機能も充実ノーパンク仕様! シート高さは低めの36cm. 超々低床タイプ!!
70cm幅の廊下を曲がれます。

**スイングアウト式
フット・レッグサポート
(着脱可能)**


フットプレートは折りたたむので、乗り降りや足こぎする際足元を広く使えます。



シート奥行調節可能

シート奥行を2cmピッチ3段階で調節できます。

※シート奥行は、40cmの設定にて出荷いたします。

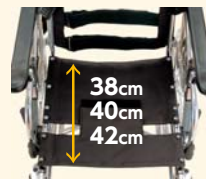

ヒールループ標準装備

かかとのずれ落ちを防ぎます。フットプレート跳ね上げ時、立ち座りしやすいよう足が引ける状態になります。



あなたに合った車いすを選んでいただくために

モジュール車いすの 主な調節と調整

モジュール車いすは、ご利用の方に合わせた調節機能に優れた車いすです。使用状況の変化に合わせた主な調節・調整について解説します。

シート高さや形式の変更が可能

シートの高さ調節(座面)



車輪取付部 (シリーズ KA800)

車輪・キャストのサイズや取付位置により、座面の高さを調節できます。

※車輪の交換が必要な場合もあります。

形式の変更

自走用
介助兼用

介助用

ご利用状況に合わせた車輪の組み換えにより、自走用にも介助用にも対応します。



※車輪の交換が必要となります。



*フレーム構造上形式の変更ができないモデルもあります。



調整については専門業者に作業をお願いしてください。

ご利用者の方に合わせた調整が可能

適合調整シート




背中とお尻の形状に合わせて、横方向の張り調整ができます。背中への圧迫の軽減を図ります。



面ファスナー固定式ですので、簡単に張り調整ができます。

※イメージのため、シートクッションを取り外して撮影しています。


シート奥行調節

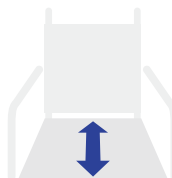

シートパイプの伸縮により、シート奥行調節ができます。奥行調節用パイプの入れ込み個数で、段階的に行えます。



フットサポート・シート間距離の調節と調整

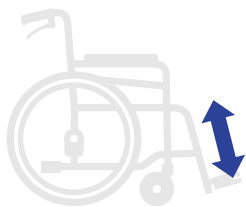

無段階調整タイプ

付属の工具により任意の高さに調整できます。




段階調節タイプ

ステップ板の固定ボルトにより段階的に調節できます。



アームサポート高さ調節

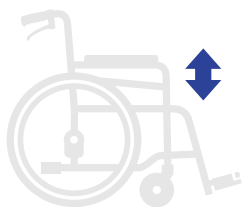

段階的調節

ご利用者の体格や使用するクッションの厚さによって高さを段階的に調節できます。



KMD

標準

軽量

モジュール

室内用

リクライニング

子供用

歩行車いす・
旅ぐるま
(電動車いす)

シャワー用
車いす

オーダー
システム

電動車

歩行訓練
歩行補助具

オプション&
関連パーツ

寸法比較 (cm)

自走式

※シート幅寸法は、バックサポートフレーム内寸法です。

介助式

※各寸法には、シート・シートクッション等の厚みは含まれません。

※シート色、取付部品により重量・寸法が多少変動いたします。ご了承ください。

シリーズ	品番	前キヤスタ(インチ)	車輪(インチ)	後キヤスタ(インチ)	シート幅	前座高	後座高	シート・シート間距離	アームサポート高	シート奥行	バックサポート高	全幅	全高	全長	折りたたみ時全幅	折りたたみ時全高	折りたたみ時全長	重量(kg)	掲載ページ
KAK-LO	KAK20-40B-LO	4	20	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	38・40・42	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71			16.6	47
	KAK18-40B-LO	4	18	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	38・40・42	44	61.5	88	91	35 × 66 × 71			16.4	
	KAK16-40B-LO	4	16	4	※40	36	33.5	29~	23・25・27・29	38・40・42	44	56	88	91	31 × 66 × 71			15.7	

※アームパイプ内寸法
座パイプ外寸法(380mm)