

電動

Electric Motor Type

KE45092

KE43093

省電力性能や回転半径の小ささ、前後スライド・左右回転シートなど
ニーズに合ったセレクトでお出かけが楽しくなります。



簡単操作でスピーディに移動できます。

KE45(ロマンス)シリーズ

KE45・43 共通機構

対応機種 KE45・KE43



オートハザードランプ機能
後進時、停止時には自動的に点滅。



ウインカーオートキャンセル機能
カーブを曲がり終えれば自動的にウインカーの点滅が止まります。



握り込み非常停止機能
アクセルレバーを強く握ると非常停止。



(電動カート)
運転免許不要



ノーパンクタイヤ
トラブルに強いタフなタイヤ。



オートパワーオフ機能
15分以上操作がなければ自動的に電源が切れます。



コーナーリング自動減速機能
カーブを曲がる際、自動的に減速。



4輪サスペンション
4輪サスペンションにより優しい乗り心地です。

駆動輪 13インチ




KE45

省電力、高輝度LEDヘッドランプ
高位置ウインカー&ハイマウントランプ
大型タイヤ採用、走破・走行性が向上。

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン



前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、左右45度、90度の2段階回転機能。

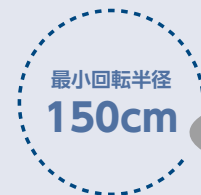

参考価格 **¥418,000** (非課税)

KE45 <ロマンス プラチナネオ>

(111kg バッテリー含む)


TAIS:00160-000281



<国家公安委員会認定>
<交 K11-2>

標準装備

- 左右バックミラー
- 前部カゴ(約20L) ~業界最大容量~

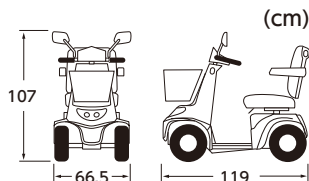

*電動車いす安全普及協会規格適合 *JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕様

- シート幅:43cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:11.6cm フラット
- 前輪・駆動輪:直径32×幅9cm(4.00-5-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0~6km/h)・後進(0~2km/h)
- 連続走行距離:29km
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー(5時間率):12V 32Ah×2ケ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

電動カート総合補償プラン

〈詳しくは弊社、または担当代理店
にお問い合わせください〉

傷害保険と賠償責任をセットした幅広い補償内容の保険
「電動カート総合補償プラン」をご用意しております。

KE43/KE45
専用オプション

ご購入の際合わせてご指定ください。

〈価格:参考価格〉

右側バックミラー



対応機種 KE43 (取付金具付)

取付価格 **¥1,600増** (非課税)

部品価格 **¥1,760** (税込)

*梱包上の都合により、一部部品は同梱対応とさせていただきます。

フロアマット



対応機種 KE45・KE43

取付価格 **¥2,500増** (非課税)

部品価格 **¥2,750** (税込)

ステッキスタンド



対応機種 KE45・KE43

取付価格 **¥8,000増** (非課税)

部品価格 **¥8,800** (税込)

*取付時は、左・右をご指定ください。

車体カバー



対応機種 KE45・KE43

部品価格 **¥6,600** (税込)



軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ

簡単操作でスピーディに移動できます。

KE45・43 共通機構 対応機種 KE45・KE43

KE43(ロマンス)シリーズ

オートハザードランプ機能 発進時、停止時には自動的に点滅。	ウィンカーオートキャンセル機能 カーブを走り終えれば自動的にウィンカーの点滅が消えます。	振り込み非常停止機能 アクセルレバーを強く握ると非常停止。	(電動カート) 運転免許不要
ノーパンクタイヤ トラブルに強いクワッドタイヤ。	オートパワーオフ機能 15分以上稼働がなければ自動的に電源が切れます。	コーナーリング自動減速機能 カーブを曲がる際、自動的に減速。	4輪サスペンション 4輪サスペンションにより優しい乗り心地です。

駆動輪 10インチ

KE43



コンパクト設計・軽量バッテリー簡単交換

- バッテリー残量計
- 前進/後進切替スイッチ
- 速度調節つまみ
- 方向指示器
- ホーン
- アクセルガード



前後スライド・左右回転シート
中心より前後30mmのスライド、左右90度の位置に回転。



参考価格 **¥323,000** 非課税

KE43 <ロマンス ゴールド>

(69kg バッテリー含む)


TAIS:00160-000336



<国家公安委員会認定>
<交 K10-15>

標準装備

- 左側バックミラー
- 前部カゴ

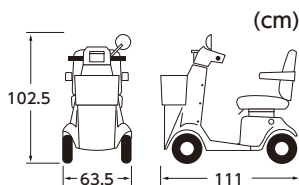

*電動車いす安全普及協会規格適合 *JIST9206電磁エミッション、電磁イミュニティ規格適合

仕様

- シート幅:40cm ■ 肘内寸法:39cm
- ステップ高さ:前19cm・後15cm
- 前輪・駆動輪:直径26×幅8.5cm (3.00-4-4PR)・ノーパンクタイヤ/黒
- 実用登坂角度:10°
- 走行速度:前進(0~6km/h)・後進(0~2km/h)
- 連続走行距離:25km
(新品バッテリーで平らな道を体重75kgの人が、6km/hで走行した場合)
- モーター出力:24V 600W×1ケ
- バッテリー(5時間率):12V 20Ah×2ケ(密閉式)
- 充電:充電器内蔵(家庭用コンセント100Vより充電できます。)
- 使用者最大重量:100kg(積載物含む)

電動カート総合補償プラン

〈詳しくは弊社、または担当代理店
にお問い合わせください〉

傷害保険と賠償責任をセットした幅広い補償内容の保険
「電動カート総合補償プラン」をご用意しております。

KE43/KE45
専用オプション

ご購入の際合わせてご指定ください。

〈価格:参考価格〉

右側バックミラー



対応機種 KE43 (取付金具付)

取付価格 **¥1,600増** 非課税

部品価格 **¥1,760** 税込

*梱包上の都合により、一部部品は同梱対応とさせていただきます。

フロアマット



対応機種 KE45・KE43

取付価格 **¥2,500増** 非課税

部品価格 **¥2,750** 税込

ステッキスタンド



対応機種 KE45・KE43

取付価格 **¥8,000増** 非課税

部品価格 **¥8,800** 税込

*取付時は、左・右をご指定ください。

車体カバー



対応機種 KE45・KE43

部品価格 **¥6,600** 税込



転倒防止金具 〈モジュール式〉



装着例

調節式なので、様々な
座面高さの車いすに
合わせることができます。

TAIS:00160-000305


モジュール中床用(ティッピング高さ約13~19cm)

- ティッピング径φ20mm用
- ティッピング径φ22mm用

モジュール低床用(ティッピング高さ約7~12cm)

- ティッピング径φ20mm用
- ティッピング径φ22mm用

※ティッピング高さとは、
ティッピングバーの上面
から地面までの鉛直方向
の距離をさします。

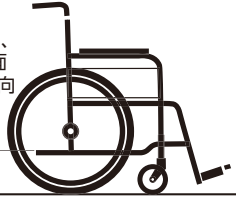


ティッピング高さ ↑

参考価格	新車ご購入時の 取付価格※	¥13,200 増/台 <small>非課税</small>
	部品のみ ご購入価格	¥14,520/台 <small>税込</small>

※新車ご購入時の取付価格には部品の代金を含んでおります。
重量：1.2kg

段差乗り越え・座面高さ変更

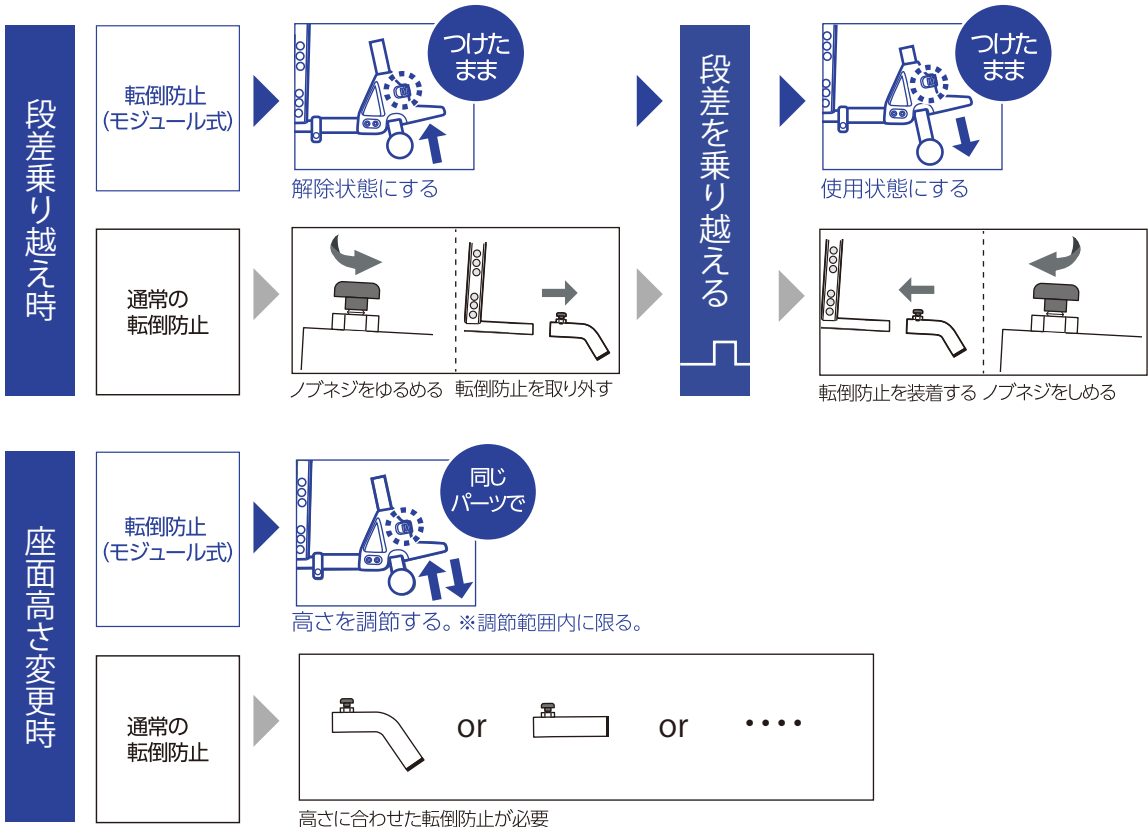

軽量

Modern
シリーズ

WAVIT
シリーズ

標準

モジュール

六輪

リクライ
ニング

子供用

簡易

シャワー用

オーダー
システム

電動

歩行車

歩行
補助具

オプション&
関連パーツ