

愛と勇気の車いす物語



AY-W&W

取扱説明書



安全に関するご注意	1
1.各部名称	2
2.車いすへの取付方法	3
3.使用方法	8
4.保守、点検	10
5.お手入れの方法	11
6.仕様	11
7.保証	12

このたびは AY-W&W をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。




※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご利用いただく際には必ず携帯してください。



あい&ゆうき

安全に関するご注意 ※ご使用になる前に必ずお読みください。

[表示マークの説明]

-  **警告** この表示は「人が死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
-  **注意** この表示は「人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
-  **禁止** この表示は、してはいけない「禁止」の内容です。

※ 以下の注意点以外であっても、無理な使用はおやめください。事故の原因になります。

禁止

- 勝手に改造・分解しないでください。強度や耐久性が低下して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。(保証対象外)

警告


- この製品を火気に近付けないでください。
※プラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。
- 段差や凸凹などのある路面等を走行するときは、身体が前のめりにならないよう充分ご注意ください。
- 走行訓練中は、AY-W&W を使用位置に固定してご使用ください。転倒の原因になります。
- AY-W&W を付けた車いすを物品運搬など車いす以外の目的に使用しないでください。



注意

- 投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。
- 認知症（痴呆症）の方がご使用される場合は、必ず介助者が付き添ってください。また、部品等を飲み込むことや一度かけた駐車ブレーキを不意に解除されることがありますので、充分ご注意ください。
- 下記のようなところに放置しないでください。
 - ・湿気の多いところ
 - ・雨風の当たるところ事故や、サビ・劣化の原因にもなりかねます。
- 操作レバーの作動方向以外に力を加えないでください。また、必要以上に力を加えないでください。操作レバーが変形・破損する恐れがあります。
- AY-W&W を装着された後には、必ず利用者が操作可能であることを確認した上で、ご使用ください。AY-W&W の使用に向かない場合には、直ちにご使用をお止めください。

1.各部名称

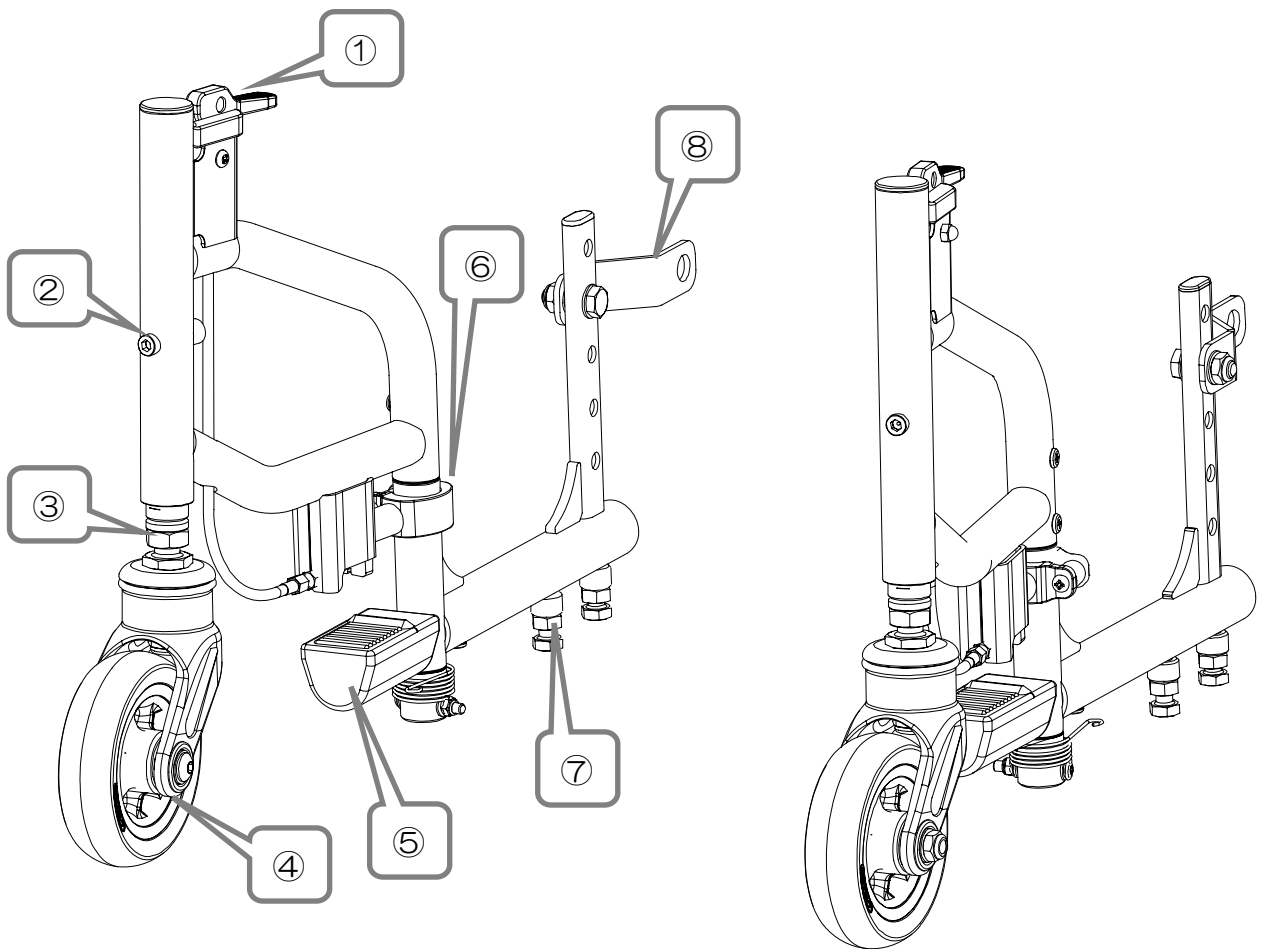

①操作レバー

②キャスタ調整パイプ

③キャスタ調整ナット

④キャスタ

⑤ティッピングレバー

⑥固定台座

⑦ティッピングレバー固定ボルト

⑧車軸固定板

使用位置と収納位置の固定を解除する時に使用します。

キャスタ高さを2 cm刻みで調整できます。

キャスタ高さを微調整できます。

自在に方向転換できる小輪です。

段差を乗り越える際に踏む場所です。

使用位置と収納位置の固定させます。


車いすのティッピングレバーと AY-W&W を固定する為のボルトです。(左右各2箇所)

車いすの車軸と AY-W&W を固定する為の板です。

2.車いすへの取付方法


<取り付ける前に>

- ①お手持ちの車いすの車軸が、ハブナットから5 mm以上出ているか確認してください。


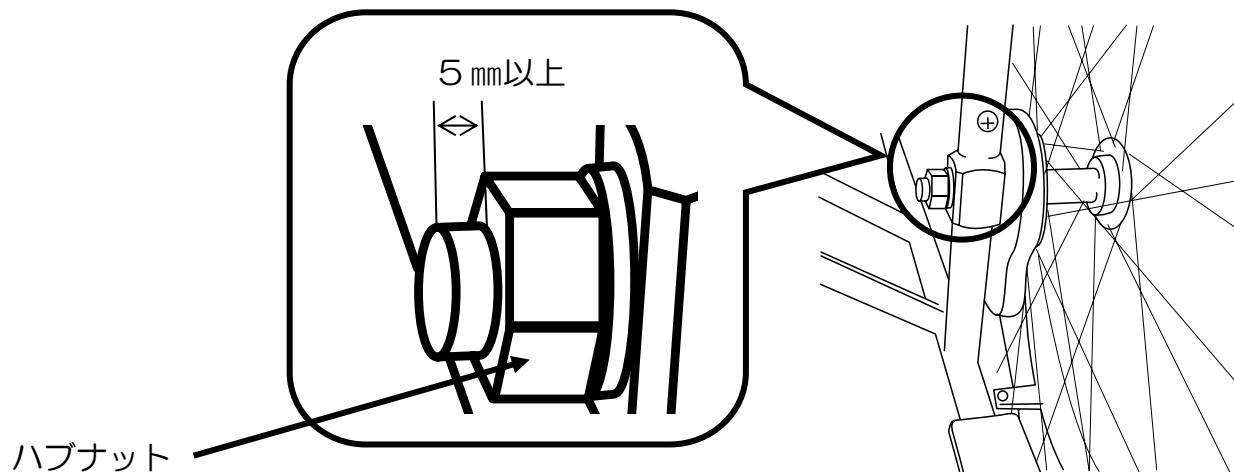


※5 mm以上出ていないと、安全に取り付けることができません。

- ②お手持ちの車いすの下図 A,B 寸法を測ります。

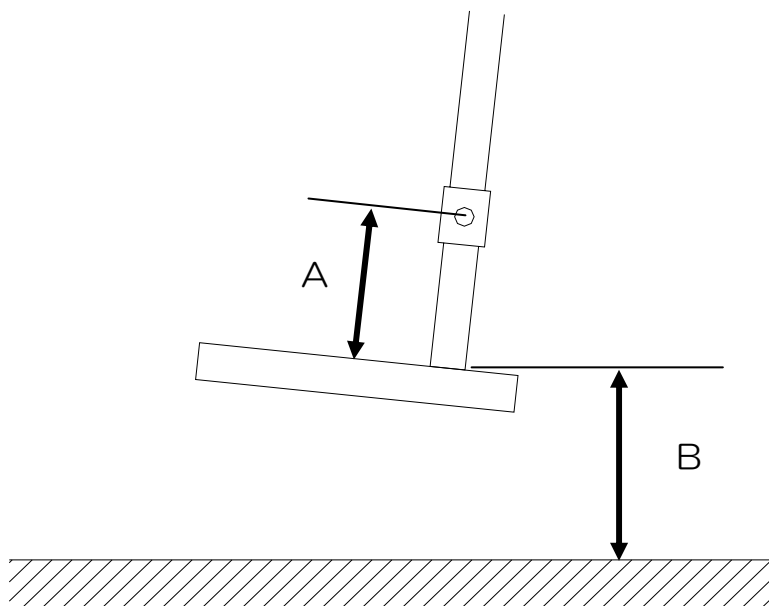

<取付方法>

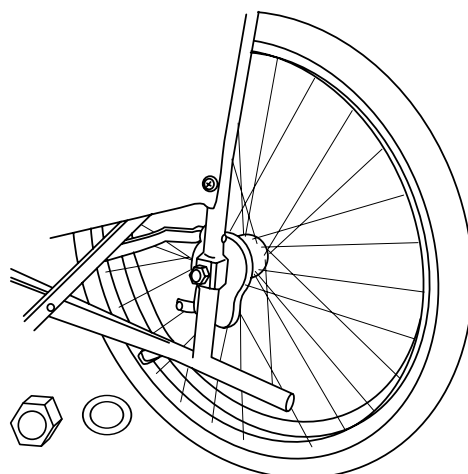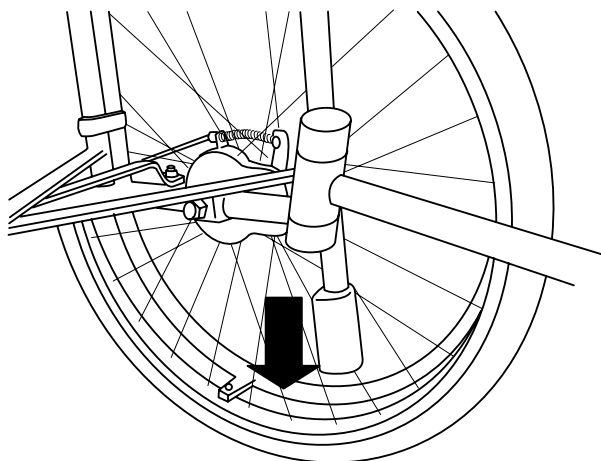


①ティッピングレバーにゴムが付いている場合には、ティッピングレバーのゴムをプラスチックハンマー等を使用し、外します。（ポイント：車いすを倒して作業をすると、外しやすい。）

②車いすの後輪のハブナット、Sワッシャ、平ワッシャを外します。


<表 1>

ティッピングレバーからの車軸の高さ (mm) A 寸法	AY-W&W の取付け 位置
0 以下	取付け不可
0~ 41	E
41~ 67	D
67~ 93	C
93~ 119	B
119~ 165	A
165 以上	取付け不可

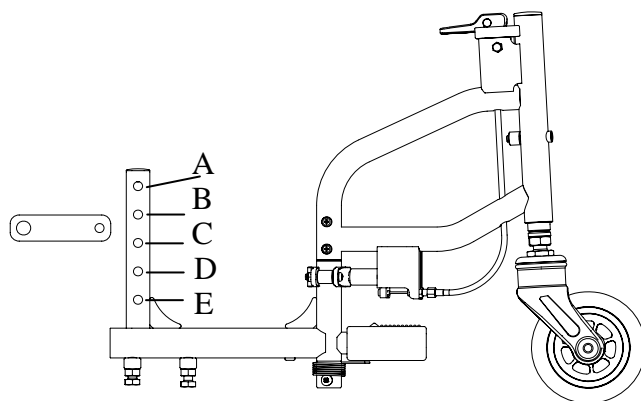


③適用範囲の表 1 を参照し、AY-W&W 本体と車軸固定板を付属のボルトで仮止めしてください。



（弊社製車いすをご利用の場合は、カワムラサイクル製車いす車種別一覧表をご覧ください。）

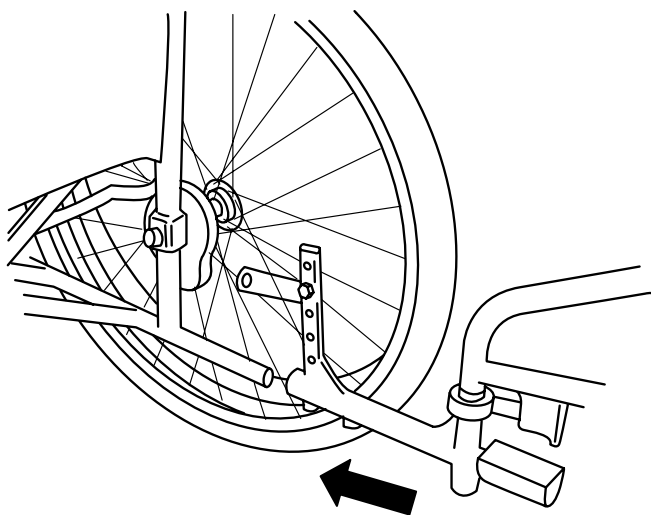

④ 車いすのティッピングレバーに AY-W&W の差込口を差し込みます。


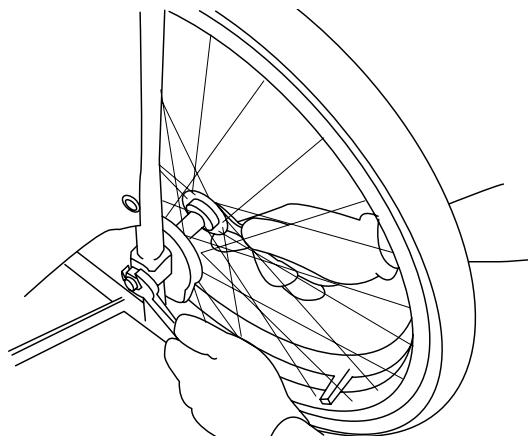


⑤ 車軸固定板を通し、平ワッシャ、Sワッシャ、ナットの順に仮止めしてください。

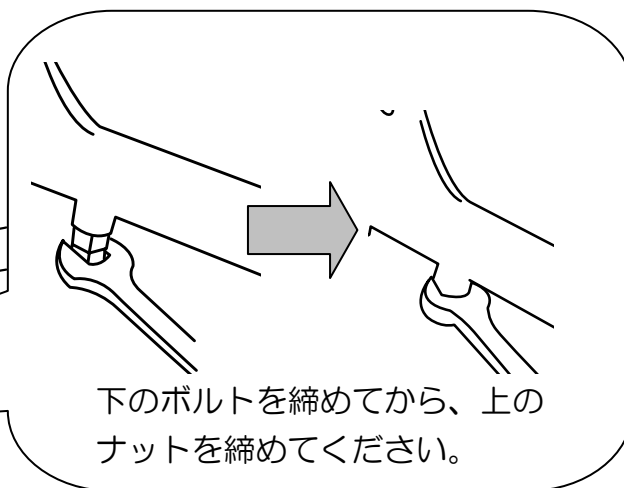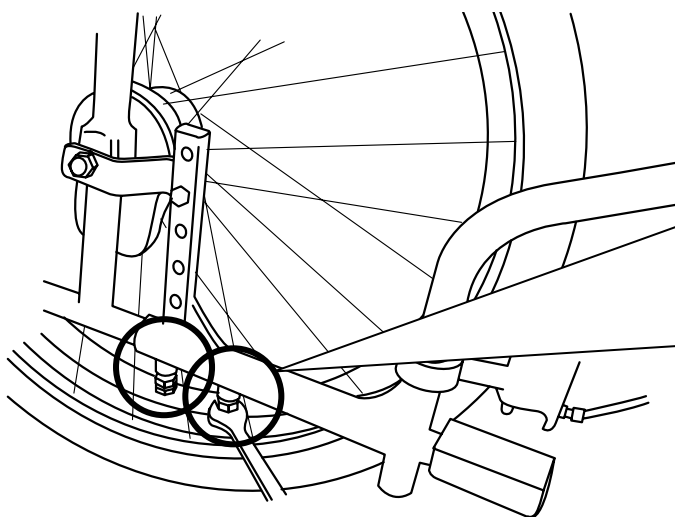

下のボルトを締めてから、上のナットを締めてください。

⑥ ティッピングレバー固定ボルトを左右 2 ヶ所ずつ締め付け、車いすにしっかりと固定します。

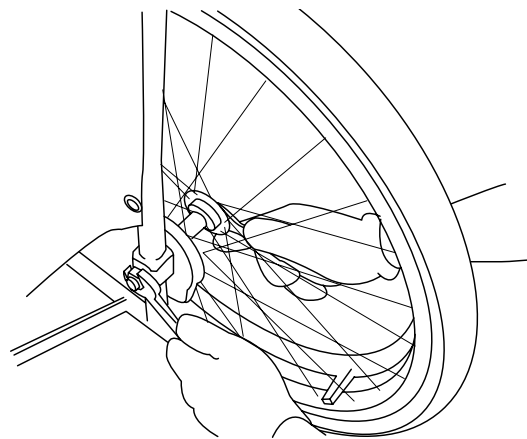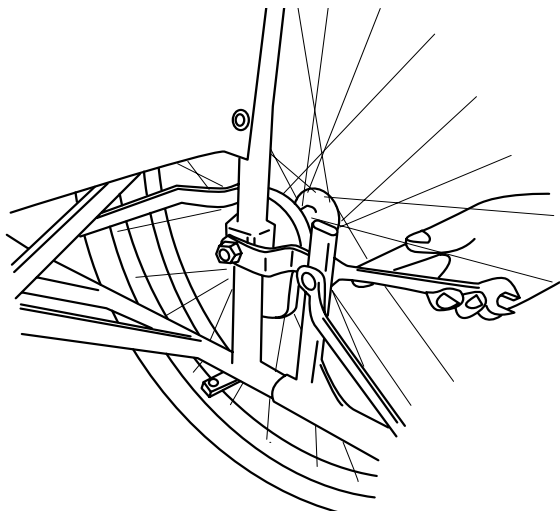

⑦AY-W&W 本体と車軸固定板をしっかりと締め付けてください。(③で仮止めした箇所を増締めしてください。)


⑧車軸固定板と車軸をしっかりと固定してください。(⑤で仮止めした箇所を増し締めしてください。)

⚠ 注意


ナットからボルトの頭が出ていることを確認してください。

<表 2>

ティッピングレバーの地面からの高さ (mm) B 寸法	キャストの高さ位置 刻み線の数
105 以下	取付け不可
105～ 123	1 本
123～ 143	2 本
143～ 163	3 本
163～ 183	4 本
183～ 193	5 本
194 以上	取付け不可

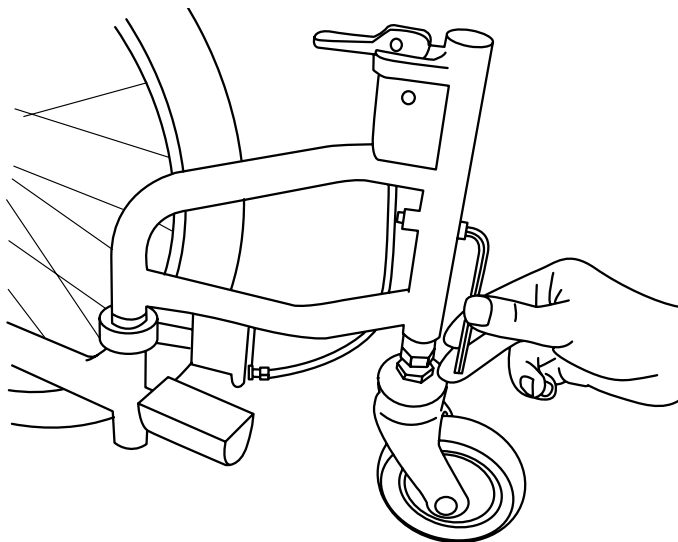


⑨表 2 を参照し、キャストの高さの位置を合わせます。このとき、パイプに刻まれた線を参考にしてください。

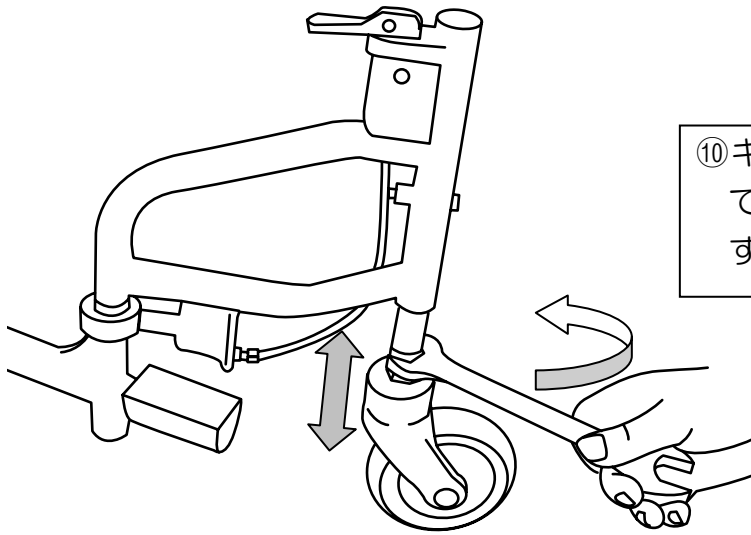

⑩キャスト調整ナットを緩めて、位置（高さ）を調整します。

⚠ 注意

地面と隙間を見ながら微調整を行ってください。このとき必ずキャスト車輪と地面との間に隙間（5 mm以上）をあけて下さい。隙間がない状態で使用されますとW&W及び車いす本体の破損につながる恐れがあります。

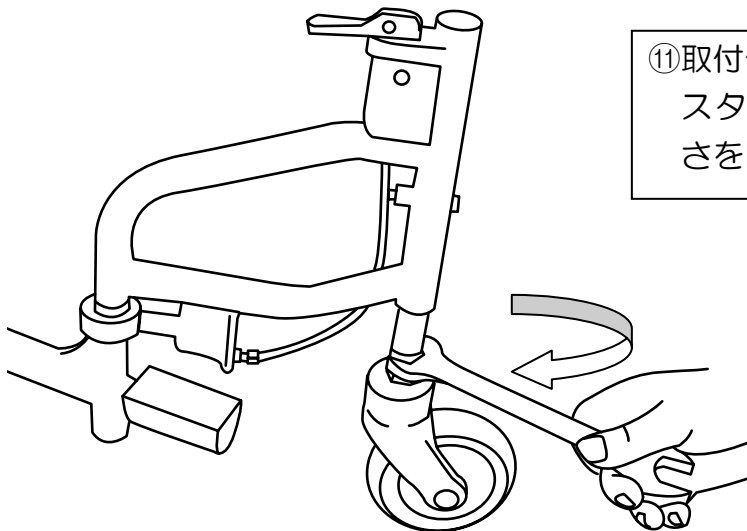

⑪取付位置が決まったら、キャスト調整ナットを締めて高さを固定します。


⚠ 注意

このとき、キャストがしっかりと固定されていることを確認した上で、ご利用ください。万が一、キャストが固定されていないと、思わぬ事故につながる恐れがありますので、ご注意ください。


3.使用方法

<車いすとして利用する場合>

※車いすを広げ、座れる状態で操作をしてください。

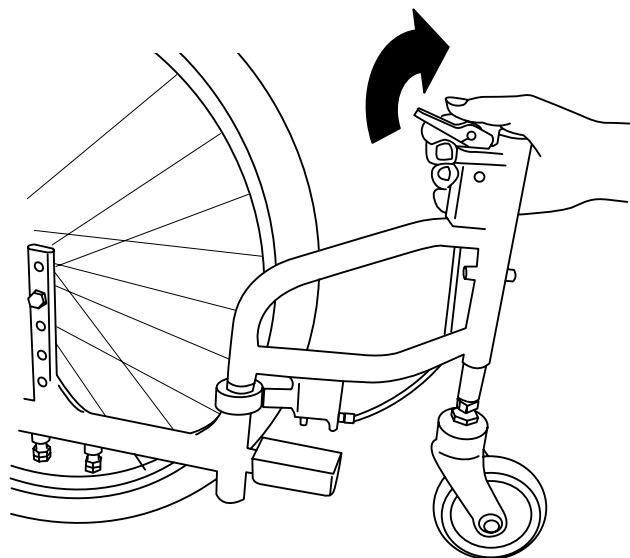

①操作レバーを引き上げて、固定（ロック）を解除します。

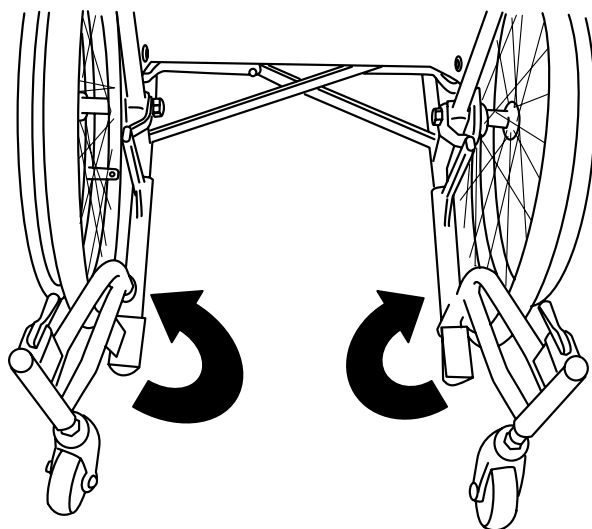


②内側に廻します。収納位置で固定（ロック）されていることを確認してください。



③車いすとしてご利用ください。

<段差を乗り越える場合>

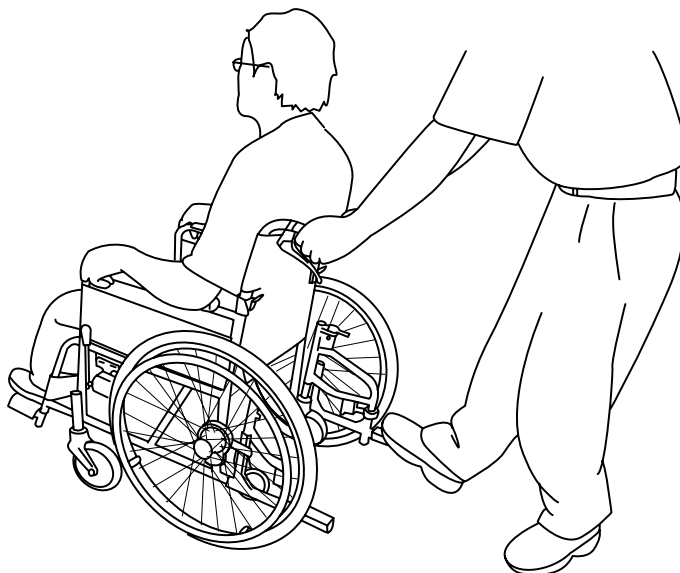


小さな段差を乗り越える場合には、ティップングレバーを踏んで前輪を持ち上げてください。


警告

大きな段差・階段・エスカレータでは、2~3人で車いすを持ち上げてください。上記の方法で乗り越えると、破損や事故の原因となります。

<歩行器として利用する場合>

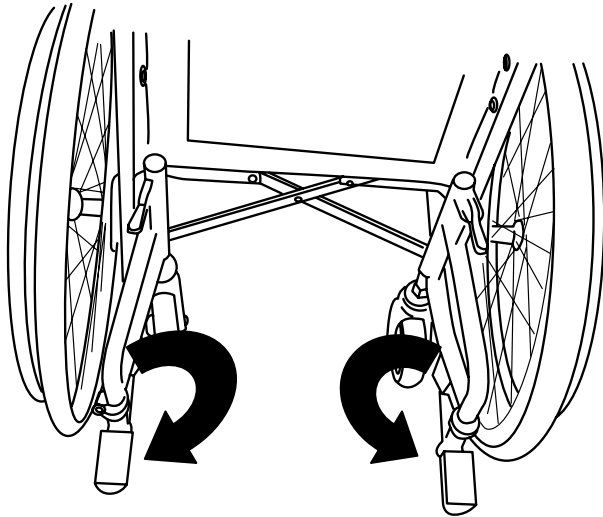

①操作レバーを引き上げて、固定（ロック）を解除します。外側に廻します。

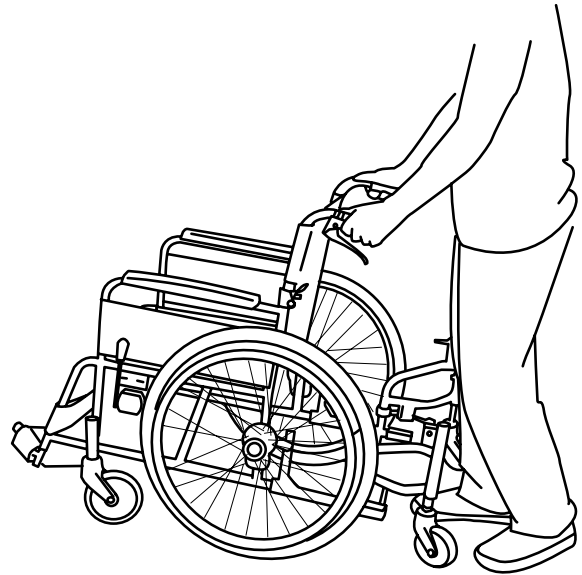

②歩行器としてご利用ください。

警告

- AY-W&Wが“カチッ”と固定していることを確認してから、ご利用ください。しっかりと固定されていないと、思いがけず外れて事故になる恐れがあります。
- ご利用前には、必ずネジが緩んでいないか確認してからご利用ください。しっかりと固定されていないと、思いがけず外れて事故になる恐れがあります。

4.保守、点検

1ヶ月に一度は安全点検を行ってください!!

★変な音がしませんか？

変な音がする場合、どこでその音が発生しているかをご確認してください。キャスト・車輪のベアリング部の油分が不足しているなどの原因が考えられます。原因が不明な場合、修理不可能な場合はお買い上げの販売店までご連絡ください。

★左右の高さは揃っていますか？

左右のキャスト高さをご確認してください。左右のキャストの高さ位置が揃っていない場合、歪みや破損の原因を引き起こす場合があります。

★ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。ネジが緩んでいたら必ずしっかりと締めてください。締めてもすぐ緩む、締まらないなどの不具合があれば、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★きちんと折りたためますか？

折りたたみに異常がある場合、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★AY-W&W がしっかりと車いすに固定されていますか？

車輪を止めているボルト、キャストを止めているボルトは緩んでいませんか？緩んでいると使用中突然車輪やキャストが外れて転倒するなど大変危険です。しっかりと締めてください。

★ワイヤーは切れていませんか？

安全のために、1年に1度定期的に交換してください。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

5.お手入れの方法

★金属部分（フレーム、車輪等）

フレームなどの金属部は、乾いた布でよく汚れを落として、自動車用のワックスをかけ、乾いた布で拭き取ってください。凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。

★樹脂（プラスチック）部

樹脂（プラスチック）部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

《お手入れの上のご注意》

- 中性洗剤を使用してください。（中性洗剤以外の洗剤を使用すると、変質・変色・傷みの原因となります。）
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。（変質・変色・傷みの原因となります。）
- たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。（傷みの原因となります。）

6.仕 様

材 質	アルミ
重 量	3.1kg（1台分）
全高×全幅×全長	470～430x100x540 mm
（折りたたみ時）	470～430x110x375 mm
キャスト	4in ニューソフトタイヤ 樹脂ヨーク

7.保証

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。保証書（返送用登録はがき）に所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送ください。

保証期間はご購入日より 1 年間です。

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼


異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★保証期間後

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★保証の適用除外となる場合

- (a) ご使用による消耗品および取扱不注意による破損
例) タイヤの磨耗およびワイヤーの破損等
- (b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- (c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- (d) 保全上の不備および弊社の特約販売店以外で行った修理や改造等による破損
- (e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
- (f) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
- (g) AY-W&W を取り付けた際の車いすの故障

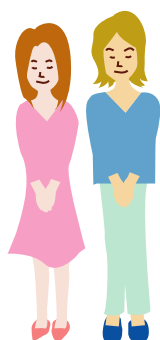

地球の環境保護のため、
 廃棄するときにはそのまま放置しないで
 各自治体の取り決めにしたがってください。



■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3-9-1	TEL078-969-2800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地3-9-1	TEL078-969-2820
■さいたまサービスセンター	〒338-0002	さいたま市中央区下落合7-11-2	TEL048-832-0168
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷1-8-3	TEL03-3874-3511
■横浜サービスセンター	〒220-0073	横浜市西区岡野2-12-9	TEL045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町1-3-11	TEL0568-52-4800
■大阪サービスセンター	〒564-0044	大阪府吹田市南金田2-20-10	TEL06-6190-8488
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原1-18-3	TEL092-882-4722
■神戸工場	■神戸第二工場	■いなみの工場	■メンテナンスセンター

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。