


# かかと受けの取扱説明書

このたびはかかと受けをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- かかと受けをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

## 同梱部品（片側分）

- かかと受けベルト (1枚)
- ボルト (2本)
- ホーマーナット (2個)
- ナイロンナット (2個)

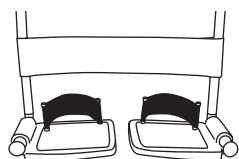

※イラストは左右取付したものです。

## 仕様



## 必要な工具



- 六角レンチ (5mm)
- スパナ (10mm)
- ドリル (6mm)

## 取付可能なステップ板



- ステップ板 b
- ステップ板 c
- ステップ板 d
- ステップ板 f
- ステップ板 g

## 取付方法

- ①ステップ板に裏から二ヶ所ドリルで穴を開けます。この時リブに穴がかからないように10cm程度の間隔を目安に下さい。
- ②ベルトの両端にボルトを差し込んでホーマーナットをネジの根元まで締めます。

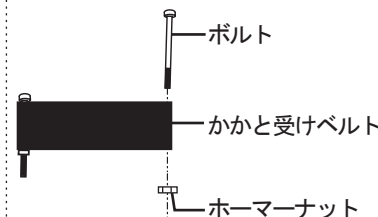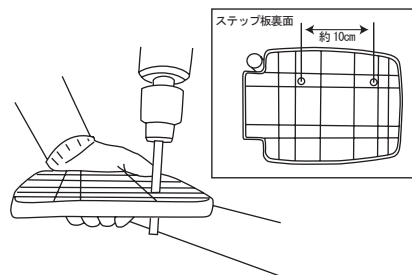

- ③「①」で開けた穴にボルトを差し込みます。ボルトを六角レンチで固定しながら、ステップ板の裏からスパナでナイロンナットを締め付けます。左右取付の場合、反対側も同様に取付けます。
- ④取付完了です。

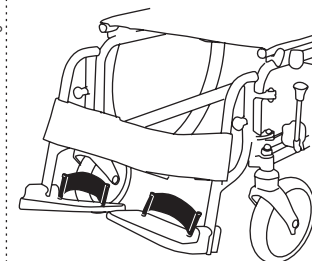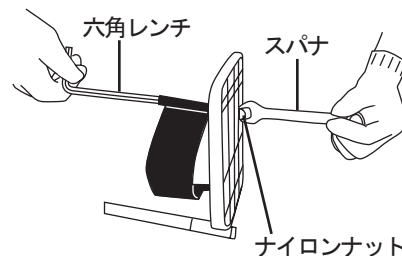

※イラストは左右取付したものです。

## ⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800