

杖置き取扱説明書


このたびは杖置きをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。




- 杖置きをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

同梱部品

- 杖置きベルト (1本)
- カゴ (1個)
- インシュロックバンド (4本)

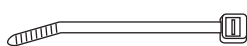

仕様

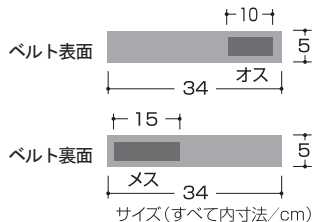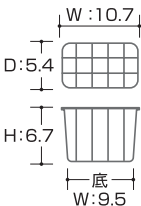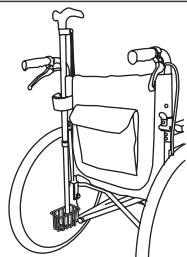

必要な工具


- プラスドライバー
- ニッパーまたはハサミ

取付可能な車いす

- ティッピングバーに何もつけていない車いす
- 電動車いすはお取付けできません。
- MRI 用車いすはお取付けできません。
- 六輪車 (KAK) はお取付けできません。
- リクライニング仕様の車いすはお取付けできません。

ティッピングゴムの取外し方法


ティッピングゴムを抜き取ります。
※ティッピングゴムがある車種のみ

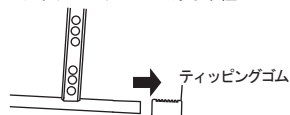

Point
ティッピングゴムが抜き取りにくい場合はプラスチックハンマー等を使用して下さい。


取付方法

- ①背折れ金具のすぐ上にあるネジを取外します。
(背折れ式でない場合は一番上のネジを取外して下さい。) 取外したネジを杖置きベルトに差し、下図のように押手パイプにプラスドライバーで締めつけます。

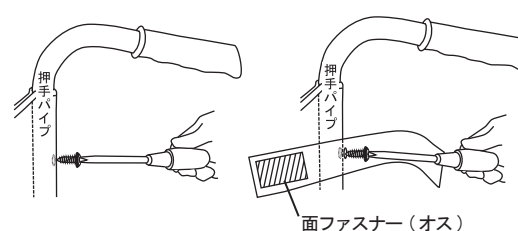


FA シリーズ (左右独立適合調整シート) の場合は、下図のように取付けて下さい。


※ネジをゆるめる必要はありません。

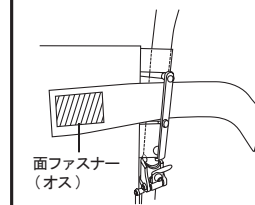

- ②カゴをティッピングバーの上に寄せ、インシュロックバンドで4ヶ所しっかりと固定します。
(インシュロックバンドの不要な部分はニッパー等で切り取って下さい。)

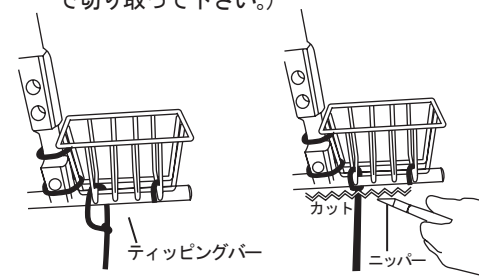

- ③取付完了です。

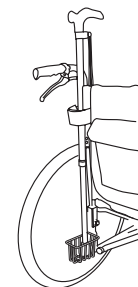

注意

- ネジがしっかりと固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800