

# 転倒防止金具の取扱説明書


このたびは転倒防止金具をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- 転倒防止金具をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。


## 出荷状態

- 転倒防止金具

キャスタ付の場合 (2個)


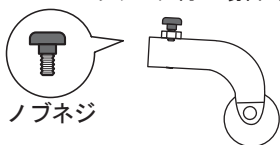


キャスタなしの場合 (2個)

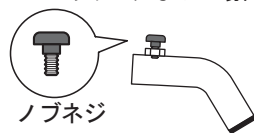


## 取付可能な車いす

- KAK シリーズはお取付けできません。
- 杖置き・酸素ボンベ架台などティッピングレバー上に何もつけていない車いす

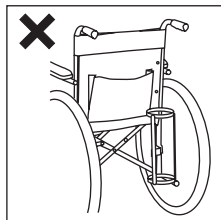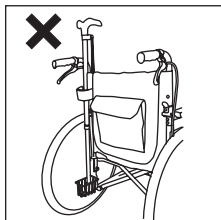


## 取付方法


- ①ティッピングゴムを抜き取ります。  
※ティッピングゴムがある車種のみ
- ②ティッピングレバーの奥まで転倒防止金具を差し込み、ノブねじでしっかり固定します。同様に反対側も取付ます。

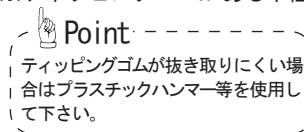

転倒防止金具が垂直になるように取付けて下さい。

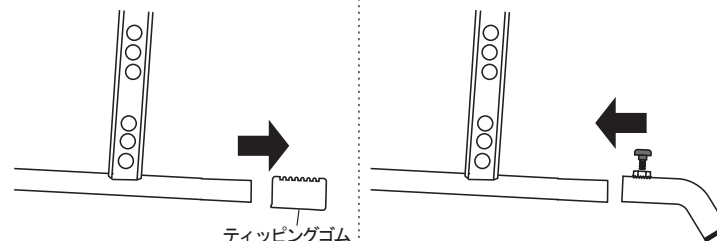

- ③取付完了です。

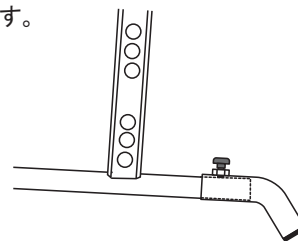

## ⚠ 注意

- あくまでも転倒を防ぐためのものなので、常に接地し続けたり過度の負担を与えないで下さい。破損します。
- 転倒防止金具取付け後は各部ネジに緩みが無いことを必ず確認して下さい。また、後輪と転倒防止金具が接地し、前輪が地面から、4～5cm 浮くことを確認して下さい。(4～5cm 以上前輪が上がる場合、転倒防止金具の寸法が車体に適用していない可能性があります。車体に合った転倒防止金具を取付けて下さい。)

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800