



タッグルブレーキ(カバーなし)の取り付け方法

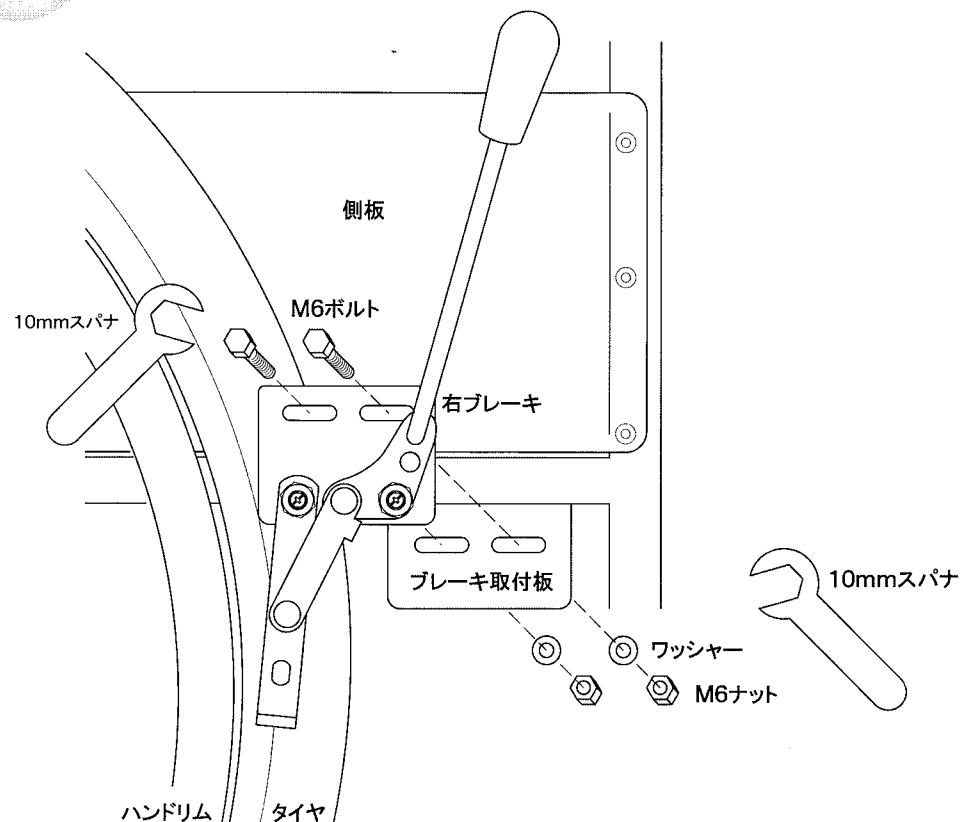


タッグルブレーキ(カバー付)の取り付け方法

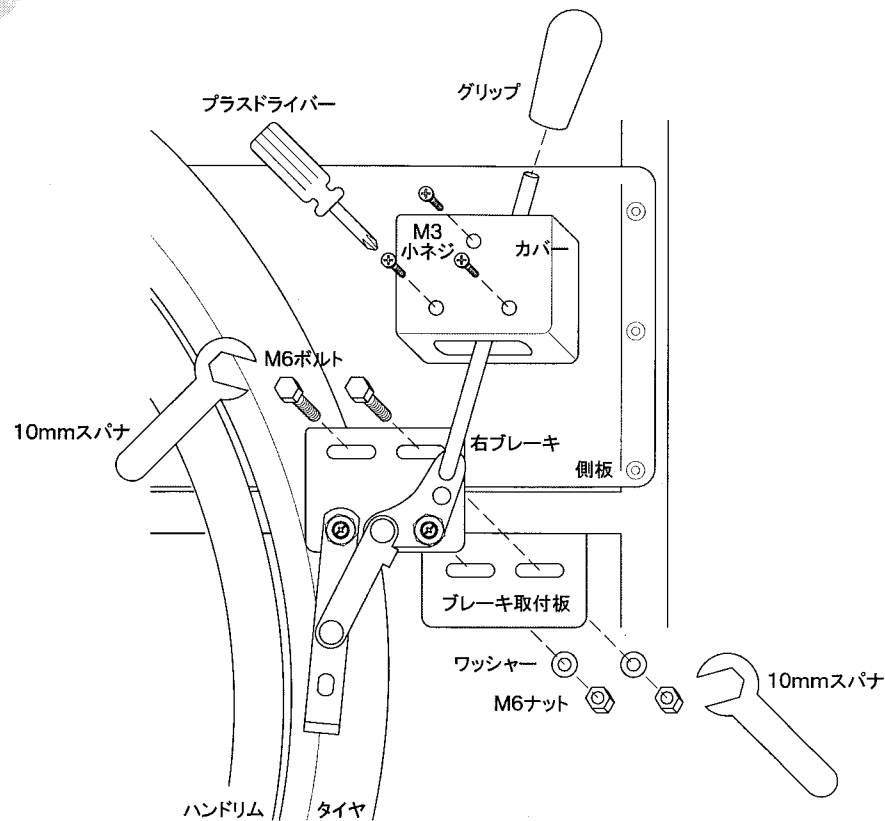

<取り付け時のご注意>


※取り付け前に、タイヤの空気圧を調べ補充してください。

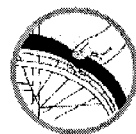

タイヤの空気圧が低いとブレーキの効きが弱くなります。目安として、タイヤを指で押しても容易にへこまない程度(軟式野球ボール程度の硬さ)に空気を入れてください。

※取り付けネジは、10mmスパナでしっかり締め付けてください。

※ブレーキは「左用」「右用」がありますので、間違えないようご注意ください。

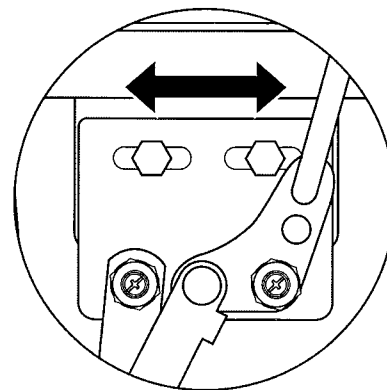

※しっかりとブレーキがかかる位置で固定してください。

- 左図の矢印の方向にずらして、ブレーキの掛かり具合を調整してください。
- 取り付け後、ブレーキを掛けた状態で車輪が廻らないこと、ブレーキがしっかりとかかっていることを充分ご確認ください。