

延長ブレーキ棒の取扱説明書

このたびはカワムラサイクルの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を安全に使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。必ずお読みください。
また、本書は必ず携帯していただき必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。



取付方法の
動画はこちら

同梱部品

●延長ブレーキ棒（10cm・20cm）〔各1ヶ〕



（10cm）



（20cm）

*イラストはニギリ部分（B2）仕様です。

※ニギリ部分は、2種類ございます。
（カラーは黒のみとなります）



（S）



（B2）

必要工具

●プラスドライバー

取付可能な駐車用ブレーキ

- ブレーキA：ミニ駐車ブレーキ（前後式）
- ブレーキB：カバー付
- ブレーキC：カバー無し
- ブレーキE：エッグストップ
- ブレーキH：エッグストップ黒
- ブレーキI：ミニエッグL
- ブレーキJ：ミニエッグS

⚠ 注意

- ニギリ部分を取り外した状態では、使用しないで下さい。ニギリ部分がない場合、思わぬケガの原因になります。
- 取付ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。
- 取付車種によっては、全幅やフレームからはみ出しが発生する場合がございますので操作時にはご注意ください。


取付方法

駐車用ブレーキをかけるなどして、車体を固定してから作業を行ってください。


①駐車用ブレーキのニギリ部分を
引き抜きます。

Point


ニギリが取り外しにくい場合は、
蒸らしたタオルで温めてから取り外して下さい。

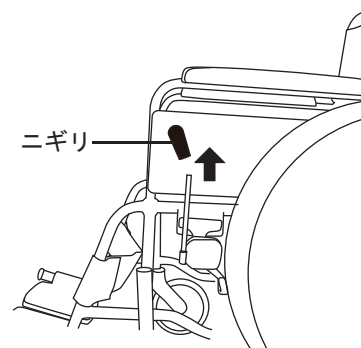

③延長ブレーキ棒を差し込んで取付ネジを
プラスドライバーで締め付めます。

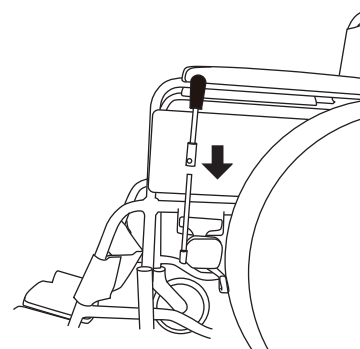


②プラスドライバーで延長ブレーキ棒の
取付ネジを取り外します。

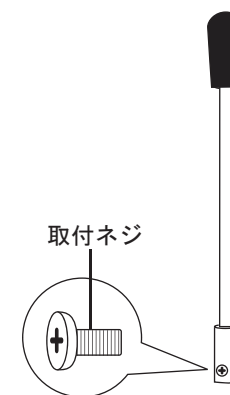


④取り付け完了です。
延長ブレーキ棒がしっかりと固定されて
いることを確認してください。

（長さ 10cm）

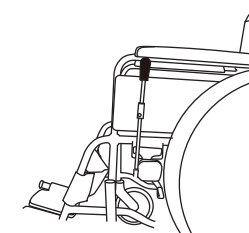

（長さ 20cm）

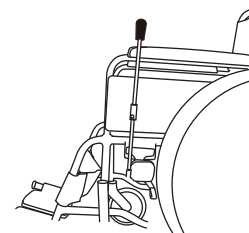

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800