

ガートル止め金具<前止め用>の取扱説明書



このたびはカワムラサイクルの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を安全に使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。必ずお読みください。
また、本書は必ず携帯していただき必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。




取付方法の
動画はこちら

同梱部品

- ガートル止め金具<前止め用>
[各1ヶ]

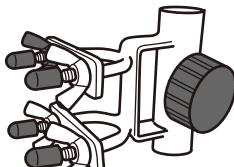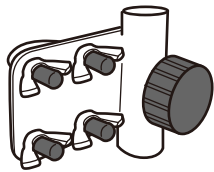

(RR60/RR70専用)

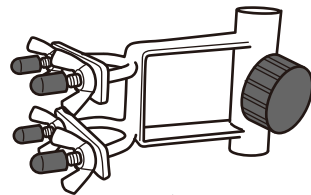

(AYK専用)


必要な工具

無し

取付方法

主なイラストはガートル止め金具<前止め用>の手順となります。
専用部品についても取付手順は同様です。

- ①キャップと蝶ナット(4ヶ所)、プレート、U字金具を取り外します。

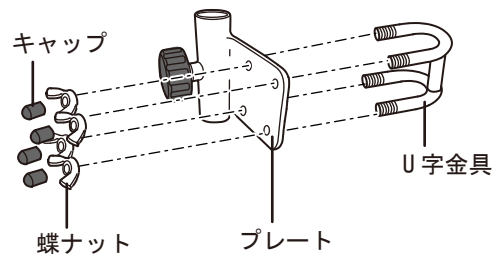


⚠ 注意


- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

取付方法



- ②下図のようにU字金具とプレートでフロントパイプはさみ込むように取り付けます。
蝶ナットは4か所を少しずつ締めこむようにしてください。
車種によっては取付方法がイラストと異なる場合がございます。

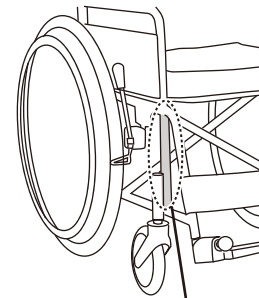

フロントパイプ

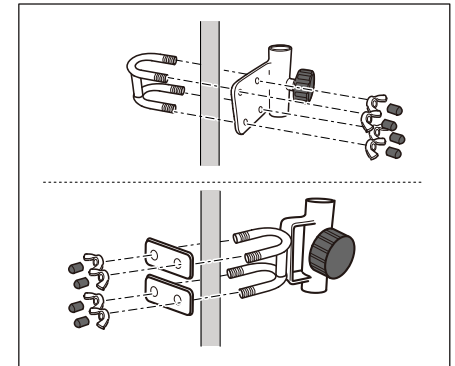


- ③取り付け完了です。

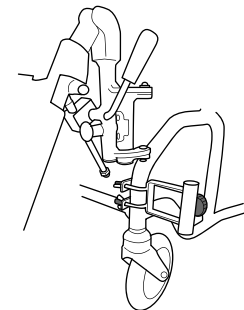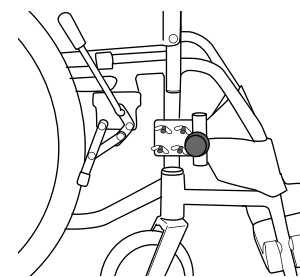

ガートル棒(別売り)を取り付ける場合

パイプ部に挿入し、任意の高さに合わせてノブネジを締め付けます。
ガートル棒挿入時に、フレームや利用者の身体に干渉しない位置・角度で取付位置を調整してください。

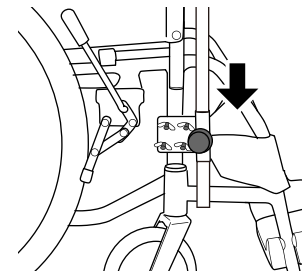

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800