

[前止め用] ガートル止め金具の取扱説明書

このたびはガートル止め金具をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- ガートル止め金具をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

同梱部品


- ガートル止め金具
(1 個)

必要な工具

無し


取付方法

- ①蝶ナットをはずして、U字ボルトをフロントパイプの内側から取り付けます。

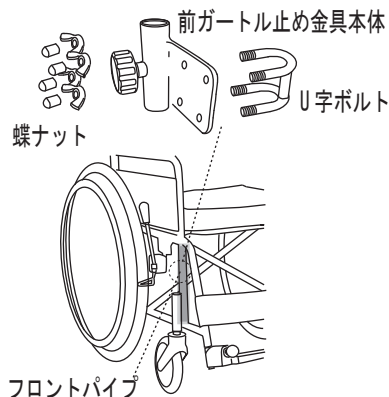

- ②U字ボルト先端に前ガートル止め金具本体を差し込み、蝶ナットを締めこみます。


Point
4 か所を順番に少しずつ締めこむようにしてください。

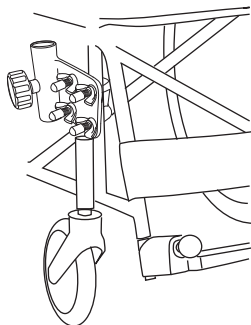

完了

ガートル棒（別売り）を取り付ける場合

パイプ部に挿入し、任意の高さに合わせてノブネジを締め付けます。

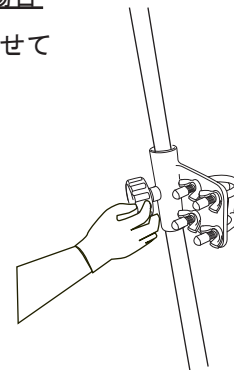

⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。



株式会社 **カフムラサイクル**

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800

2016.03.31