


# ガードル止め金具 [前止め用] の取扱説明書

このたびはガードル止め金具 [前止め用] をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- ガードル止め金具 [前止め用] をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用下さい。

## 同梱部品

- ガードル止め金具 [前止め用] [1ヶ]

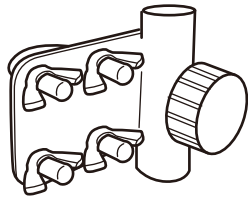


## 必要な工具

無し


## 取付方法

- ①下図のようにフロントパイプにガードル止め金具 [前止め用] を取り付けます。蝶ナットは4か所を少しずつ締めこむようにしてください。

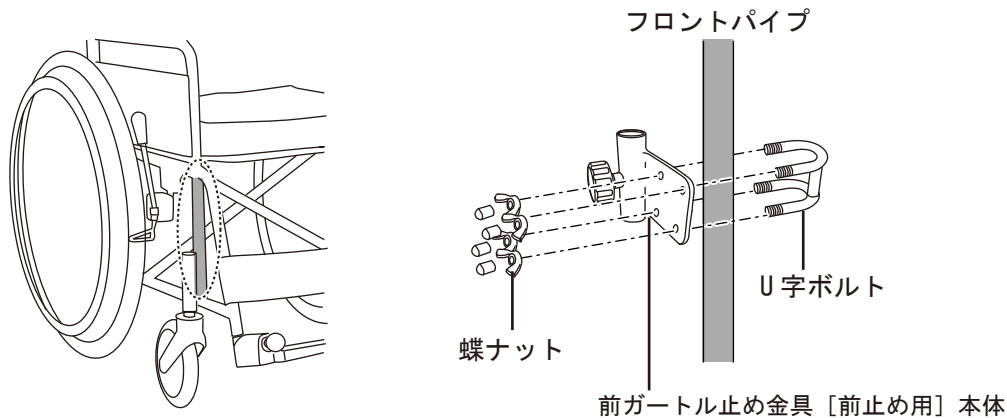


## 取付方法

- ②ガードル棒挿入時に、フレームや利用者の身体に干渉しない位置・角度で取付位置を調整してください。  
車種によっては取付方法がイラストと異なる場合がございます。

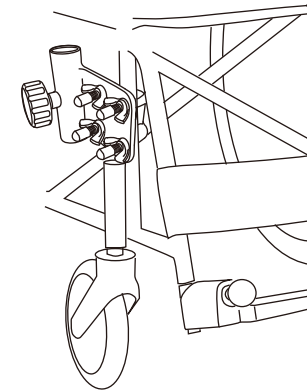

## ガードル棒 (別売り) を 取り付ける場合

パイプ部に挿入し、任意の高さに合わせてノブネジを締め付けます。

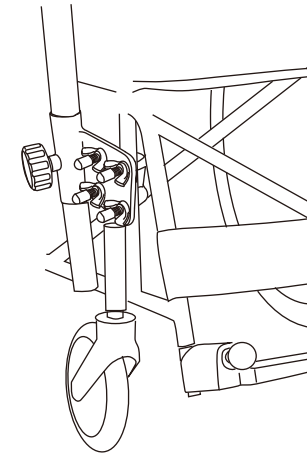

## ⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800