


ガードル止め金具<専用前止め金具 KX/KXL用>の取扱説明書

このたびはガードル止め金具<前止め用>をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- ガードル止め金具<前止め用>をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用下さい。

同梱部品


- ガードル止め金具（専用前止め用） [1ヶ]

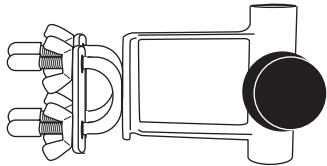

- 取付ネジ [1ヶ]




- アダプター [1ヶ]

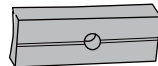


必要な工具

- プラスドライバー(※) [1本]

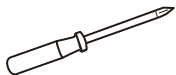


- 電動ドリル (φ3.5mm) [1台]

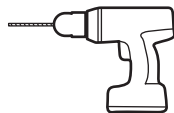


※) 作業しづらい場合は、軸の長さが長いタイプをご使用ください。

取付方法

- ①丸印の部分のフレームにアダプターを当て、マジックで印をつけます。

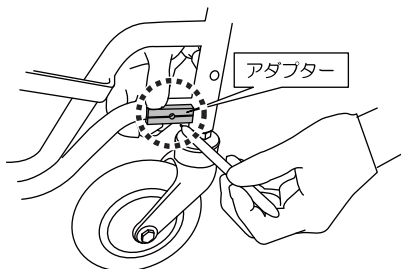


- ②マジックで印をつけたところにドリルが地面と水平になるように貫通穴を開けます。

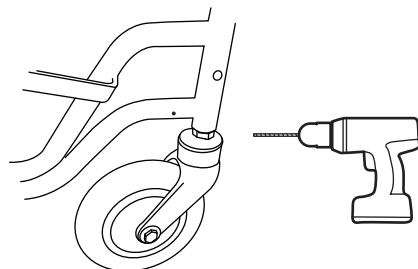


取付方法

- ③ “②” であけたフレームの内側の穴とアダプターの穴を合わせ、プラスドライバーで取付ネジを締め付けます。

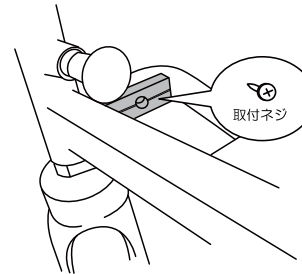


使用方法


- ①ガードル棒をガードル止め金具のパイプに差し込みます。
(※ガードル棒は別売りです。)

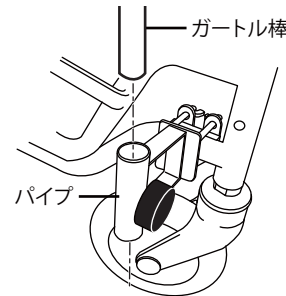

- ④取付金具・蝶ナットを外し、ガードル止め金具をフレームの外側から取り付けます。フレームの内側より蝶ナットを締めこみます。4か所を順番に少しずつ締めこむようにしてください。

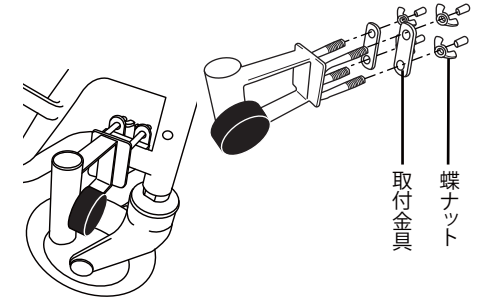

- ②任意の位置でノブネジを締め付け、ガードル棒を固定します。
この時ガードル棒がしっかりと固定されていることを確認します。

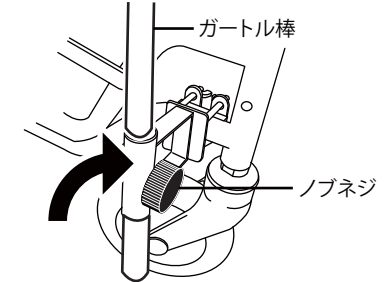

注意



強制

- ネジがしっかりと固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。
- ノブネジのゆるみがないか定期的に確認して下さい。
※不意にガードル棒が落下し、ケガをするおそれがあります。
- ガードル棒を下げすぎた位置で固定しないでください。
※フレームや地面に干渉し、事故につながるおそれがあります。
- アダプタを取り付ける穴が斜めの場合、ガードル棒が傾く原因となります。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800