




あなたをやさしくエスコートする.....


ガードル台止め金具の取り付け方 (R R 40 , 50 用)

このたびはカワムラサイクルのガードル台をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。下記のとおり、お取り扱いください。


使用工具：電動工具（ドリル、ドライバー）

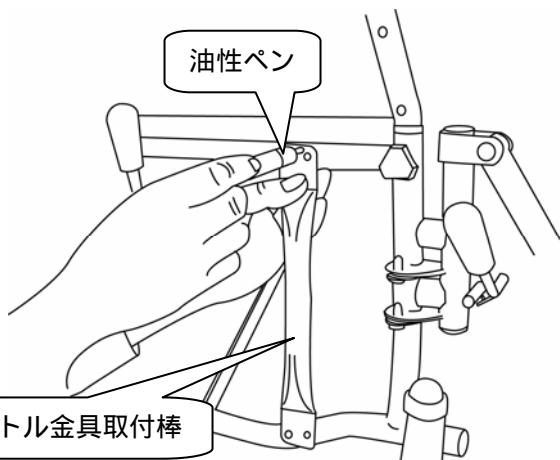


ガードル金具取付棒を取付ける位置を決め、油性ペンで印をつけます。

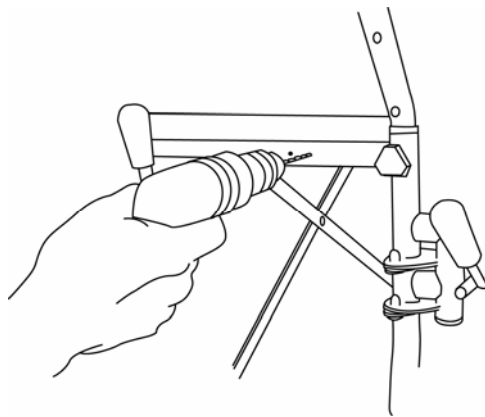

印をつけた場所を電動ドリルで穴をあけます。

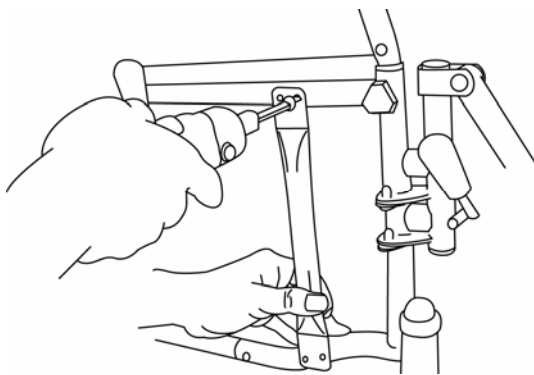

穴をあけた場所に電動ドライバーで取付棒を固定します。

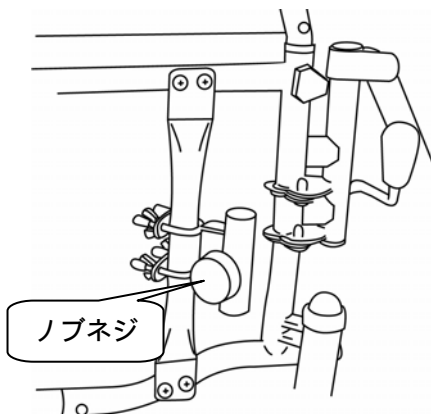

取付棒にガードル金具を取付けます。

ガードル金具のノブネジをゆるめ、ガードル棒を差し込みノブネジをしっかりと締めて下さい。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1
TEL078-969-2800 FAX 078-969-2811