


[KPF・KPF-LO 用] ガートル止め金具の取扱説明書

このたびはガートル止め金具をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- ガートル止め金具をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

同梱部品

- ガートル止め金具 (1個)

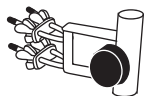

- 取付棒 (1個)



- ネジ (4個)




必要な工具

- 電動工具 (ドリル 4mm)
- プラスドライバー

取付方法


- ①取付棒をサイドフレームにあてて車いすに取付ける位置を決め、油性ペンで4ヶ所印をつけておきます。

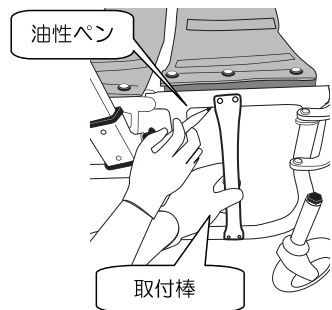

Point



取付位置の目安

右図のように、前側の座ベースシートの真ん中のシート取付ネジの位置を基準にしてください。

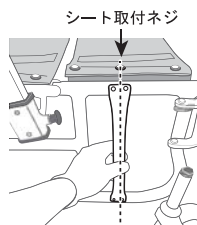


取付方法

- ②「①」で印をつけた場所を電動ドリルで穴をあけます。
- ③下図のように穴をあけた場所に取付棒の穴に合わせてプラスドライバーを使いネジで締め付けます。(計4カ所)

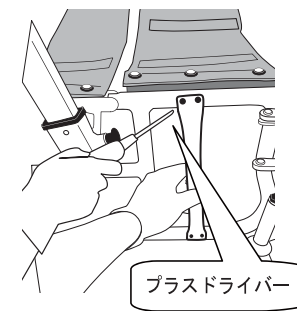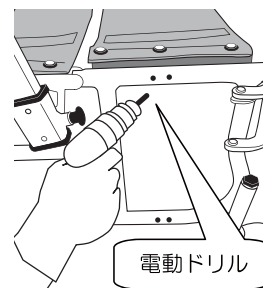

- ④下図のように取付棒にガートル止め金具を取付けます。取付完了です。

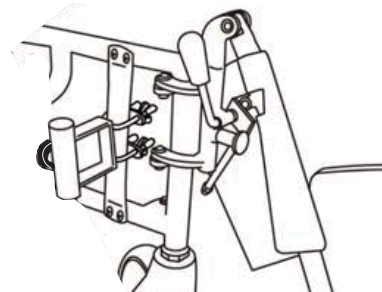

⚠ 注意

- ネジがしっかりと固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。



株式会社 **カワムラサイクル**

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800