


ガードル止め金具(後ろ止め用)の取扱説明書(KMD用)

このたびはガードル止め金具をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- ガードル止め金具をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解してください。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上、正しくご使用下さい。

同梱部品

- ガードル止め金具 (後ろ止め用) [1ヶ]

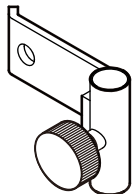

- ボルト [1ヶ]



- 平ワッシャ [2ヶ]



- Sワッシャ [1ヶ]




- 六角ナット [1ヶ]



必要な工具

- 19mmスパナ [2本]

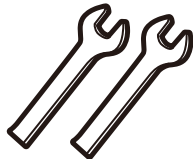

⚠ 注意

- ネジがしっかりと固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル


〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800

2019.06


取付位置

お持ちの車いすの仕様でガードル止め金具取付穴位置をご確認ください。

KMD-A

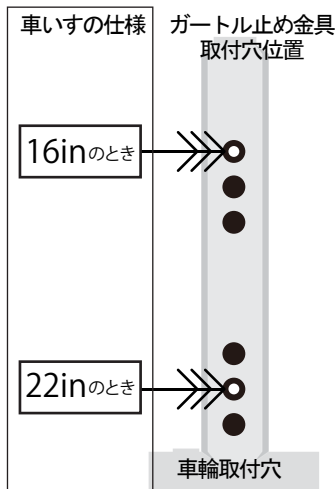

KMD-B/C

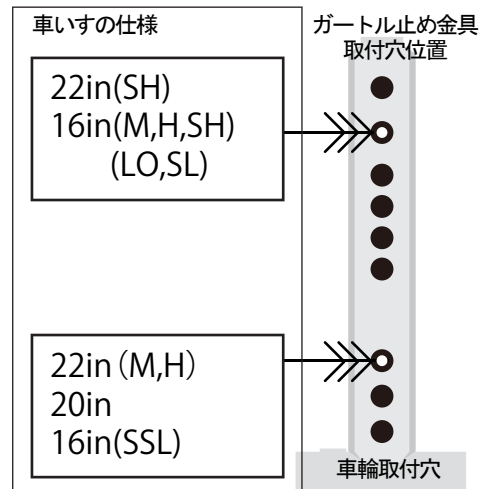

取付方法

- ①ガードル止め金具取付穴位置にガードル止め金具の穴を合わせて、ボルト、平ワッシャ、Sワッシャ、六角ナットを取付けてスパナ (19mm) で締め付け固定します。取付完了です。

