


# スポークカバーの取扱説明書

このたびはスポークカバーをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- スポークカバーをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

## 同梱部品（片側分）

- スポークカバー ※車輪のインチによって穴の数や形状が異なります。（各1枚）

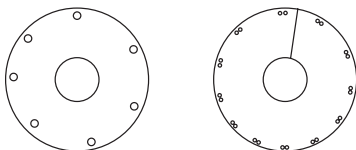


車輪の大きさによって同梱されている部品の数や種類が異なります。

- ネジ
- ワッシャ
- スポーク止め



- 22in → 各7個ずつ
- 20in → 各7個ずつ
- 14in → 各5個ずつ

- インシュロックバンド

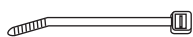

- 18in → 17本
- 16in → 13本

## 必要な工具

- プラスドライバー
- ニッパーまたはハサミ（車輪が18in・16inの場合のみ）

## 取付可能な車いす

- 樹脂製の車輪にはお取付けできません。
- 片手駆動仕様の車輪にはお取付けできません。

## ⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。





株式会社 **カフムラサイクル**

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800


## 取付方法

車輪サイズ : 22in・20in・14in

- ① 下図の様に、車輪の外側からスポークカバーにネジ、ワッシャの順に差し、車輪の内側からスポーク止めを差し仮止めをします。
- ② スポーク止めの凹部分にスポークを挟みます。

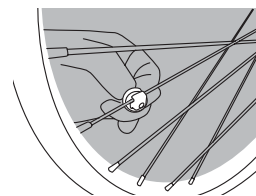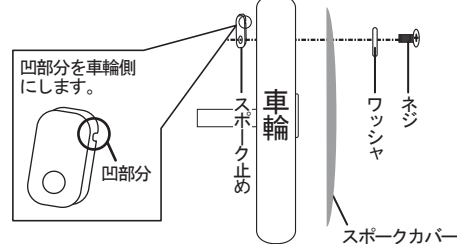

- ③ 車輪の外側からネジをプラスドライバーで締め付けます。
- ④ 同梱されている他の部品も同様に取付けます。取付完了です。

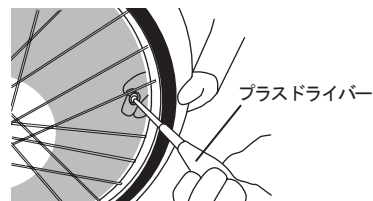

## 取付方法

車輪サイズ : 18in・16in

- ① 図1の様に、車輪の内側からインシュロックバンドを穴に通し、スポークカバーの2つの穴の間にスポークを配置します。そのままインシュロックバンドをもう片方の穴に通します。図2の様に、インシュロックバンドをしっかりと固定し不要な部分はニッパー等で切り取って下さい。
- ② 同梱されている他の部品も同様に等間隔に取付けます。取付完了です。

