


スポークカバー（キャラクターシリーズ）の樹脂製ハンドリム付車輪への組付について

このたびはスポークカバー（キャラクターシリーズ）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- スポークカバー（キャラクターシリーズ）をお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。
※以下、スポークカバー（キャラクターシリーズ）はスポークカバーと記します。

同梱部品（1台分）

- スポークカバー ※車輪のインチによって穴の数や形状が異なります。
（左右共通：2枚/台）

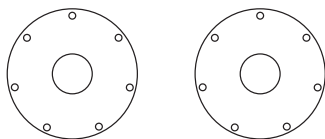

車輪の大きさによって同梱されている部品の数が異なります。

- クリップ ●ゴムワッシャ



22in・20inの場合 14セット
16in・14inの場合 10セット

- 白センターキャップ ●黒センターキャップ



各2ヶ（センターキャップは白/黒とありますのでお好みの色をお選びください。）

⚠ 注意

- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800

必要な工具

- カッター類
（以下、カッターと記します。）


取付可能な車いす

- ステンレスハンドリム付車輪
- ビニールコーティング付車輪
- 樹脂製ハンドリム付の車輪には加工が必要となります。
※片手駆動仕様の車輪には取付けできません。

加工方法（樹脂製ハンドリム付車輪の場合）

樹脂製ハンドリムの取付部に干渉している部分を除去する必要があります。

樹脂製ハンドリム付車輪にスポークカバーを合わせ、ツメの部分の4ヶ所にマジックで印を付けます。（約20×10mm）
車輪からスポークカバーを外し、印を付けた箇所をカッターでなぞるように少しずつ切り取ります。
※カッターで力強く切り込みをいれるとスポークカバーが破損するおそれがあります。

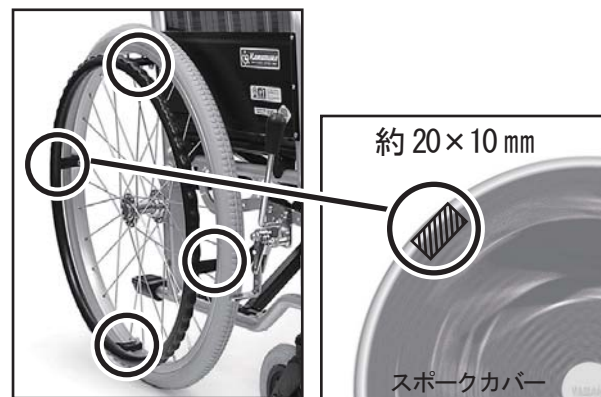

取付方法

同梱の組付・取扱説明書をご参照ください。