

つま先止めの取扱説明書

このたびはつま先止めをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

- つま先止めをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

同梱部品（片側分）

- つま先止めベルト (1枚)


(表面：面ファスナー オス
裏面：面ファスナー メス)
- ⊕皿ネジ (M4×12) (4個)

- 袋ナット (M4) (4個)

- ローゼットワッシャ (4mm) (4個)

- 平ワッシャ (4×16×0.8) (4個)


仕様

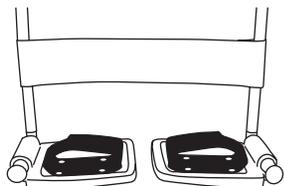

※イラストは左右取付したものです。

つま先止めベルトの長さ



必要な工具


- プラスドライバー (7mm)
- スパナ (7mm)
- ドリル (4mm)
- 穴あけポンチ

取付可能なステップ板


- ステップ板 b
- ステップ板 c
- ステップ板 d

取付方法


- ①ステップ板に裏から4ヶ所ドリルで穴を開けます。この時リブに穴がかからないようにして下さい。また、つま先止めベルト側に穴あけポンチでステップ板と同じ間隔の穴を開けて下さい。

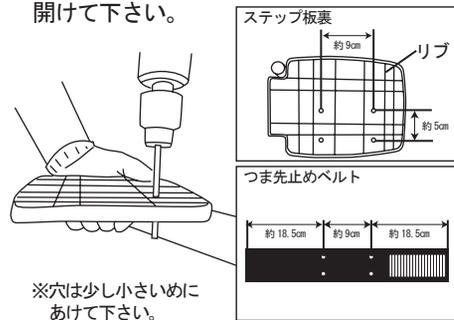

- ③つま先止めベルトの表面から⊕皿ネジを固定しながら、ステップの裏からで袋ナットを締め付けます。②③の順序で4つの穴全てにボルトを取付けて下さい。左右取付の場合、反対側も同様に取付けます。

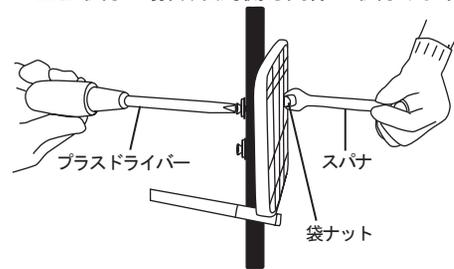


- ②⊕皿ネジにローゼットワッシャと平ワッシャを1枚ずつ通します。つま先止めベルトの穴とステップ板の穴を合わせ、図の様に取付けます。

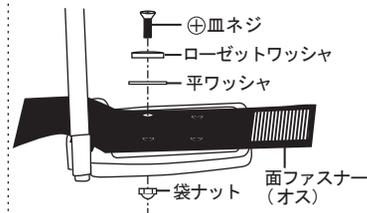

※面ファスナーのオスを表面の内側にしてください。

- ④取付完了です。

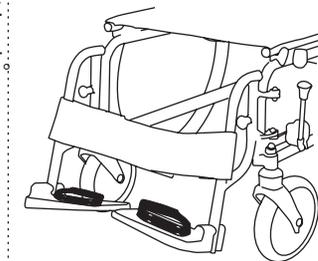

※イラストは左右取付したものです。

注意

- ネジがしっかりと固定されていない場合、ケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。
- ネジの緩みがないか定期的に点検して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800