

クッションの取扱説明書

このたびはクッションをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。


- クッションをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

仕様

- 円座 (サイズ: 40×40cm)
シートカラー: デニム



- 低反発アンカークッション (サイズ: 40×40cm)
シートカラー: デニム

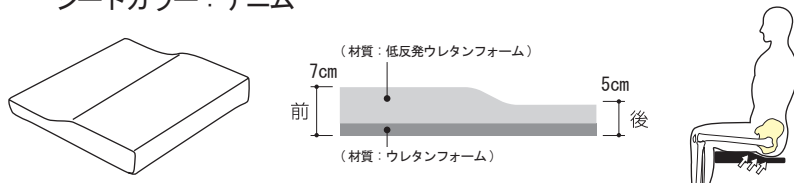

- アンカークッション (サイズ: 40×40cm)
シートカラー: デニム
裏面: 面ファスナー付 (オス)




取付可能な車いす

- 座幅 40cm・シート奥行 40cm 以上。

取付方法

車いすの座面上にクッションをのせて下さい。
(クッションの裏面には面ファスナーはありません。)

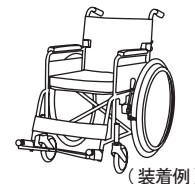

お手入れ方法

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かして下さい。

<汚れがひどいとき>

- 汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を用いて下さい。その後、乾燥させて下さい。
- しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いて下さい。
- 洗う場合は、カバーのみぬるま湯で手洗いして下さい。(中身は不可)洗濯機、乾燥機の使用はお避け下さい。
- クッション表面に面ファスナー (オス) が接触しないようにして下さい。(クッション生地のはつれ、けばだちの原因となります。)

○オーダーカラーの場合も上記のお手入れ方法を御参考下さい。

注意

- 熱湯やオゾンで洗浄しないで下さい。故障・変質・変色の原因となります。
- 中性洗剤以外を使用しないで下さい。変質・変色・傷みの原因となります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないで下さい。変質・変色・傷みの原因となります。
- たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないで下さい。傷みの原因となります。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800