

# シートベルトの取扱説明書

このたびはシートベルトをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。


- シートベルトをお使いになる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全な取扱方法を理解して下さい。
- この「取扱説明書」はお読みになった後も、いつでもご覧になれる場所に保管して下さい。
- ご不明の点がありましたら、お買い上げの販売店にご相談の上正しくご使用下さい。

## 仕様


### ●面ファスナー式



面ファスナー

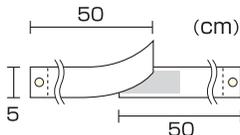


### ●ワンタッチ樹脂式

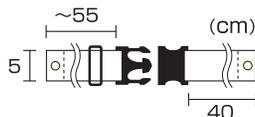


### ●折り返し式



面ファスナー

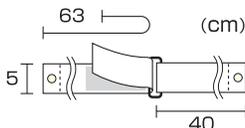

### ●ワンタッチ金具式

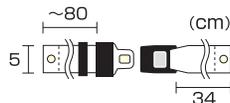

## ⚠ 注意



- 面ファスナーに糸くず、汚れなどが付いたときは取り除いて下さい。取り除かないと、面ファスナーの接着力が弱くなり、事故の原因となります。(面ファスナー式・折り返し式のみ。)

## 必要な工具



- プラスドライバー

## 取付方法

- ①シートを取付けているタッピングねじ★を外します。その時、タッピングねじ▲をゆるめると、シートにベルトが入りやすくなります。
- ②背パイプと背シートの上にベルトを挟み込んでから、背シートとベルトにタッピングねじ★を突き差します。

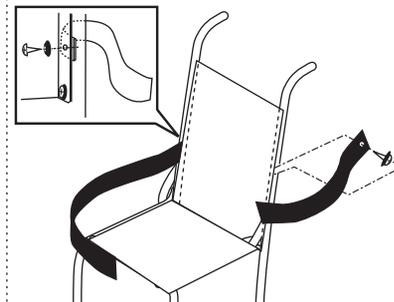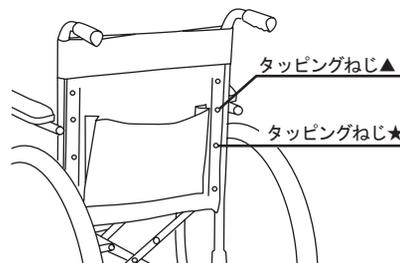

- ③背シートとベルトを留めているタッピングねじ★をプラスドライバーで締め付けます。その後、タッピングねじ▲(上図参照)を締め直します。反対側も同様に取付けます。
- ④取付完了です。

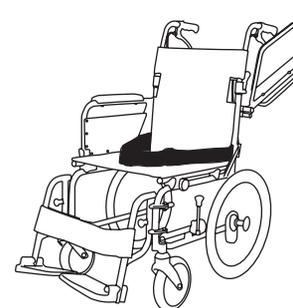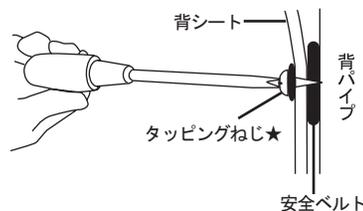

## ⚠ 注意

- ネジがしっかり固定されていないと、走行中にベルトが外れてしまうなどケガや事故の原因になります。
- 作業をされる際には、軍手を着用して下さい。

お買い上げの製品は、改良などにより「取扱説明書」の内容と一部異なる場合がございます。

株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800