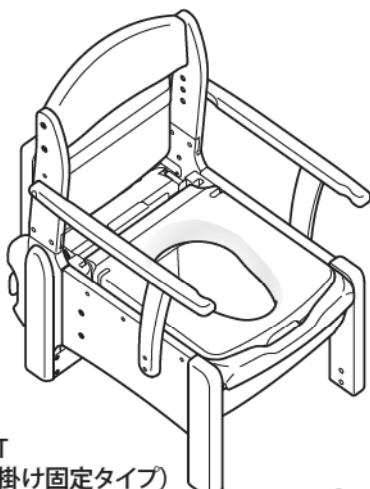
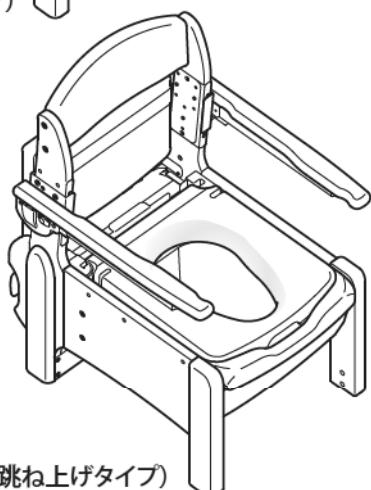


# しまるくん

品番

KPT  
(肘掛け固定タイプ)KPT-H  
(肘掛け跳ね上げタイプ)

このたびはカワムラサイクル ポータブルトイレをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

KPT  
(肘掛け固定タイプ)KPT-H  
(肘掛け跳ね上げタイプ)

安全上のご注意(必ずお守りください) …	2,3
各部の名称・付属品 .....	4
仕様 .....	5
特長 .....	5

## ご使用になる前に

1. 便座高さの調整 .....	6
2. 便座高さと高さ調整脚の組合せ .....	6
3. ペーパーホルダーの取付け .....	6
4. キャスターの取付け .....	7
5. 便座カバーの取付け .....	8
6. 肘掛けの高さ調整	
KPT(肘掛け固定タイプ) .....	9
KPT-H(肘掛け跳ね上げタイプ) .....	9

## ご使用方法

1. 設置のしかた	
KPT(肘掛け固定タイプ) .....	10
KPT-H(肘掛け跳ね上げタイプ) .....	10
2. 移動のしかた .....	10
3. ポータブルトイレの使い方 .....	11
4. バケツの取り出しかた .....	12
5. バケツのセットのしかた .....	12
6. 後ろからの介助のしかた .....	13

## お手入れのしかた

バケツの取り出し .....	13
便座および汚水受けの着脱方法 .....	13
バケツシャッターの脱着方法 .....	14

## こんなときは

故障かな?と思ったときには .....	15
---------------------	----

- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店から受け取りください。
- ご不明な点がありましたら、販売店または弊社にお問い合わせください。
- 製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、介助者、ご家族、来客者なども含みます。

▼ 表示の意味は次のとおりになっています。

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。また、本体に重大な損傷を与える可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▼ 図記号の意味は次のとおりになっています。



## **警告**

 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 使用前に必ずネジの緩み・外れ・破損がないか各部を点検する ネジが緩んだまま使用すると、破損し、けがのおそれがあります。</li></ul>
 禁止	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 製品の上に乗ったり、強い衝撃を加えない 便座の上、肘掛けに足をかけて乗りあがらない 転倒し、けがのおそれがあります。</li><li>■ 近くに火気(ストーブ等)や水気(浴室・ベランダなど)のある場所には設置しない 火災、やけど、変形などのおそれがあります。</li><li>■ 移乗の際は、肘掛けや背もたれを手すりがわりに使用しない 転倒し、けがのおそれがあります。</li><li>■ 踏み台など、用途以外では使用しない 転倒し、けがのおそれがあります。</li><li>■ 勝手に改造・分解しない 強度や耐久性が低下して危険です。また、事故になるおそれがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 肘掛けの可動部に指をはさまないように注意する(KPT-H) 利用者の身体状況や利用状況によっては、すき間に身体の一部がはさまり、大きな事故やけがにつながるおそれがあります。</li></ul>

# ⚠ 注意



必ず守る

- KPT(肘掛け固定タイプ)を移動させるときは、必ず座面を閉めて、「肘掛けと肘掛け」または「背もたれ」または「背もたれと肘掛け」を持って、本体をかたむけて、キャスターを利用する。  
KPT-H(肘掛け跳ね上げタイプ)の場合は、「背もたれ」を持って、本体をかたむけて、キャスターを利用する  
他の部位を持っての移動、キャスターを利用しないでの移動、ロックを確認しないでの移動は、故障やけがのおそれがあります。
- 便座の高さや肘掛けの高さを使用者の身体状況にあわせて調整するときは、お買い上げの販売店やケアマネージャーなどの専門家に相談する
- 必ず平らな場所で使用する  
転倒してけがをしたり、内容物がこぼれたりするおそれがあります。
- 使用者の身体状況によっては、使用の際の介助者の付き添いについて、お買い上げの販売店やケアマネージャーなどの専門家に相談する



禁 止








- 体重が100kgを超える方は使用しない  
破損するおそれがあります。
- キャスターでの移動は、無理な段差や凸凹面では行わない  
転倒してけがをしたり、故障のおそれがあります。
- 本体を濡れたり、汚れたままにしない  
しみやカビが発生したり、本体が破損するおそれがあります。
- 漂白剤・シンナー・クレゾール・アルコールなどは使用しない  
木部の塗装がはげたり、プラスチック部品が劣化するおそれがあります。  
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 直射日光を避けて、室内でのみ使用する  
変色やソリ、故障のおそれがあります。
- 人や物をのせたまま移動させない  
転倒してけがをしたり、物が落下し、破損したり、故障のおそれがあります。
- バケツ内に水や汚物を入れたまま、本体を移動させない  
内容物がこぼれ、本体や衣服・床などを汚すおそれがあります。
- 本体に直接水をかけて洗わない  
変形や故障のおそれがあります。  
著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 本体や防臭シャッター開閉機構部などの可動部に油などをささない  
故障のおそれがあります。



- 座面の開閉は、必ず「座面持ち手」部を持って行う  
他の部分を持って行うと指をはさみ、けがのおそれがあります。
- バケツや汚水受けを取り出すときは、座面や便座が倒れないことを確認する  
倒れて指などをはさみ、けがのおそれがあります。
- 可動部(バケツシャッター・座面・便座・肘掛け等)に指をはさまないように注意する  
けがのおそれがあります。


# 各部の名称・付属品

## 梱包内容

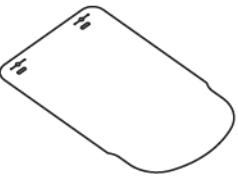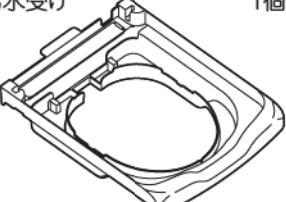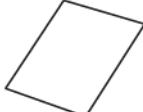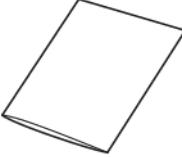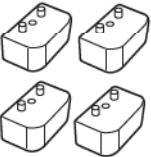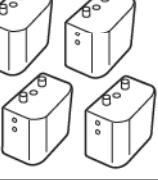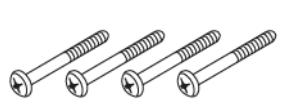
KPT(肘掛け固定タイプ) 本体	KPT-H(肘掛け跳ね上げタイプ) 本体	
共通		
パケツシャッター 1個	パケツ 1個	汚水受け 1個
		
保証書 1枚	取扱説明書(本書) 1冊	便座カバー 1枚
		
ペーパーホルダー 1セット	キャスター 2セット	
		
高さ調節脚(小) 4セット	高さ調節脚(大) 4セット	パケツフタ 1個
		 ※本体からパケツを取り外したときのみ使用
脚取付け用ネジ(長) 4本	KPT (肘掛け固定タイプ) KPT-H (肘掛け跳ね上げタイプ)	
	KPT (肘掛け固定タイプ) 六角棒スパナ (3)2本	KPT-H (肘掛け跳ね上げタイプ) 六角棒スパナ (3)1本
脚取付け用ネジ(短) 4本		
		

## 本体組立図 (イラストはKPT-H)

※パケツフタはセットできません。

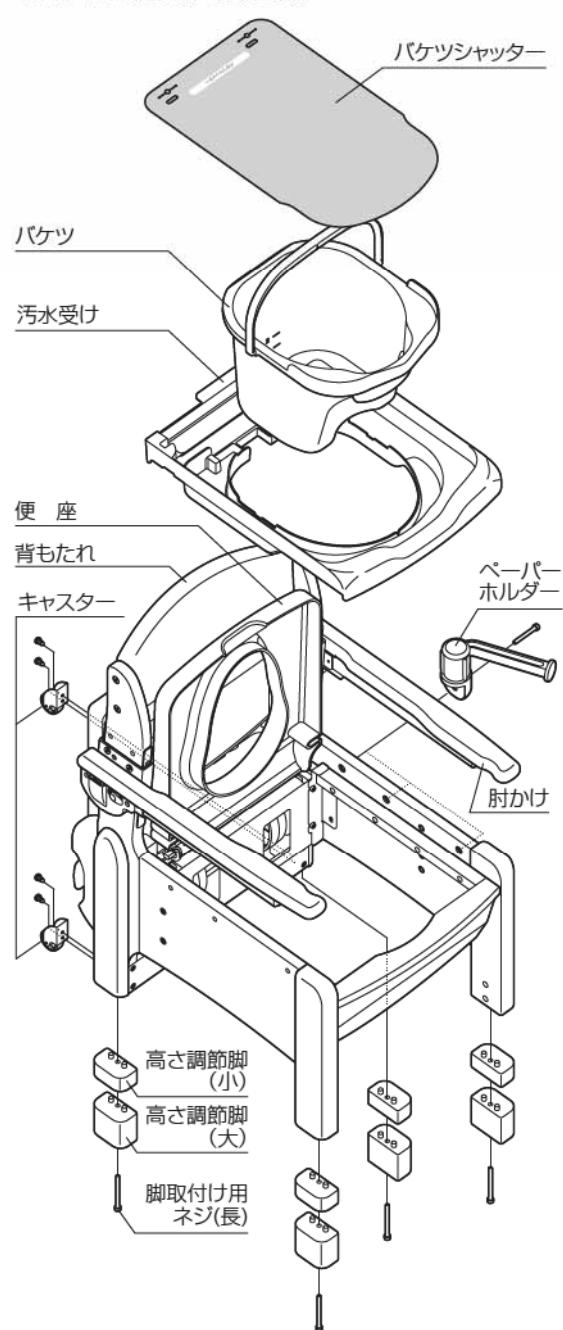

## 本体完成図

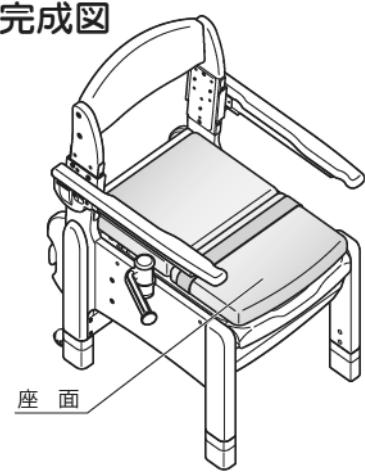

# 仕様

商品名		カワムラサイクル ポータブルトイレ			
商品記号	KPT	KPT-H			
商品コード	KH90311	KH90312			
種類	肘掛け固定タイプ		肘掛け跳ね上げタイプ		
外形寸法	幅(W)	48.5cm	51cm		
	奥行(D)	61cm			
	高さ(H)	76cm ~ 85cm			
便座高さ	33cm・36cm・39cm・42cm : 4段階				
座面高さ	38cm・41cm・44cm・47cm : 4段階				
重量	16kg	19kg			
材質	本体	天然木(ラバーウッド)			
	肘掛け	天然木(ラバーウッド)			
	座面	合成皮革・ウレタンフォーム			
	背もたれ	合成皮革・ウレタンフォーム			
	汚水受け	ポリプロピレン 耐熱温度：120℃			
	バケツ	ポリプロピレン 耐熱温度：120℃ 容量：9.1ℓ			
	便座	ポリプロピレン 耐熱温度：120℃			
	便座カバー	表糸：アクリル100% 裏糸：ナイロン86%、ポリエステル14% プラスチックワイヤー：ポリプロピレン			
	バケツシャッター	ポリプロピレン 耐熱温度：120℃			
	バックカバー	ポリプロピレン 耐熱温度：120℃			
塗装	ラッカ一塗装				

## 特長

### KPT〈肘掛け固定タイプ〉, KPT-H〈肘掛け跳ね上げタイプ〉共通

- 座面を開くと同時に、内側のバケツシャッターが一緒に開きます。座面を閉じると同時に、内側のバケツシャッターも一緒に閉まります。
- 座面を閉じた状態では、バケツシャッターがいつも閉まっている状態になり、臭気の拡散を抑えます。
- 便座高さは33・36・39・42cmの4段階に調節できます。(出荷時には33cmに設定)
- 肘掛け高さは便座面から18・21・24cmの3段階に調節できます。(出荷時には21cmに設定)
- 汚水受けも取外しが可能でお手入れが簡単です。
- バケツには汚物をトイレに流しやすいように後方に「うしろ取っ手」を設けています。
- トイレットペーパーホルダー付きです。
- 後ろからの介助が必要な場合は、座面を後ろに倒すことができます。

### KPT-H〈肘掛け跳ね上げタイプ〉の場合

- 肘掛けを跳ね上げができるので、ベッドからの移乗・介助が楽になります。
- 肘掛けは、簡単に戻せ、移乗後に両側の肘掛けを利用して姿勢を保持できます。
- 肘掛けは、完全に跳ね上げた状態または、おろした状態で動かないようにロックすることができます。


# ご使用になる前に

## 1. 便座高さの調整

便座の高さは33cm・36cm・39cm・42cmの4段階に設定できます。便座に座り、使用者の体格・症状に合わせて便座面の高さを調整してください。

右図のように本体脚部に高さ調節脚をセットし、プラスドライバーで脚取付け用ネジ(短)を固定します。

便座の高さ42cmに調整する時のみ、脚取付け用ネジ(長)を使用しますので注意してください。(下記の「2.便座高さと、高さ調節脚の組合せ」を参照してください。)

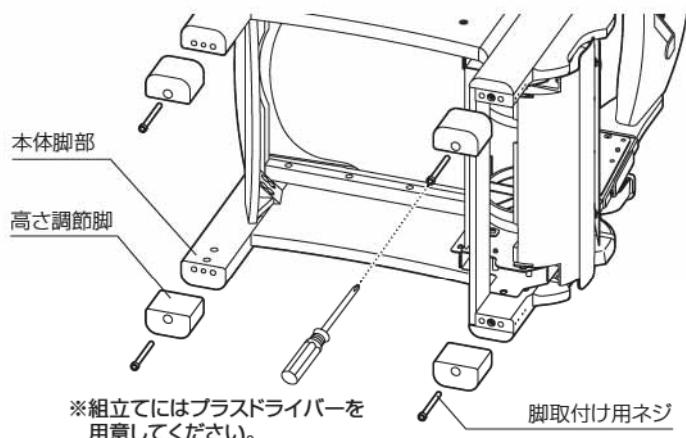

### ! 警告

- 脚部が全て同じ高さで固定されていることを確認する  
不安定な場合は転倒し、ケガの原因となります。
- 使用前に必ずネジの緩み・外れ・破損などがないか各部を点検して使用する  
ネジが緩んだまま使用すると破損、ケガの原因となります

### ! 注意

- 調整作業等で本体をかたむけたり、倒したりする場合は、バケツ内に水や汚物が  
入っていないことを確認して行なう

## 2. 便座高さと、高さ調節脚の組合せ

下図を参考に高さ調節脚を取り付けてご使用ください。

便座高さ	33cm	36cm	39cm	42cm
高さ調節脚の組合せ				
脚取付け用ネジ	不要	小	短	長

## 3. ペーパーホルダーの取付け


便座、汚水受けを取り外し、六角棒スパナ(3)で本体内側側面の取付穴を利用して取り付けてください。  
取付穴は、

- ①「本体右・前側」 ④「本体左・前側」
- ②「本体右・中央」 ⑤「本体左・中央」
- ③「本体右・後側」 ⑥「本体左・後側」

の6箇所にあります。使いやすい位置を利用してください。


### ! 注意

- ペーパーホルダーには過度の荷重をかけない

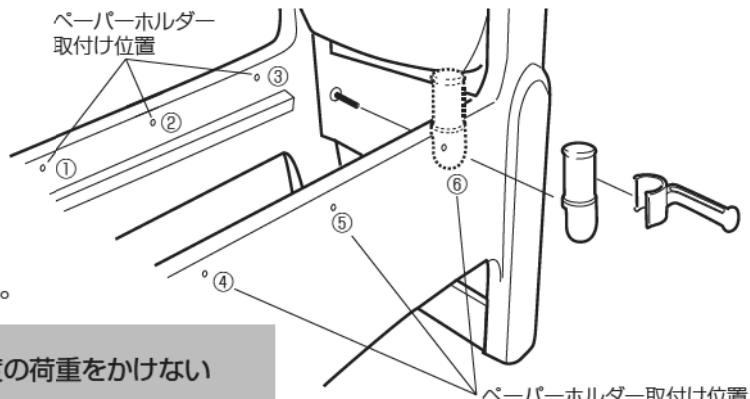

## 4. キャスターの取付け

プラスドライバーで本体後脚、または、高さ調節脚(大)のネジ穴に付属のネジで取り付けます。

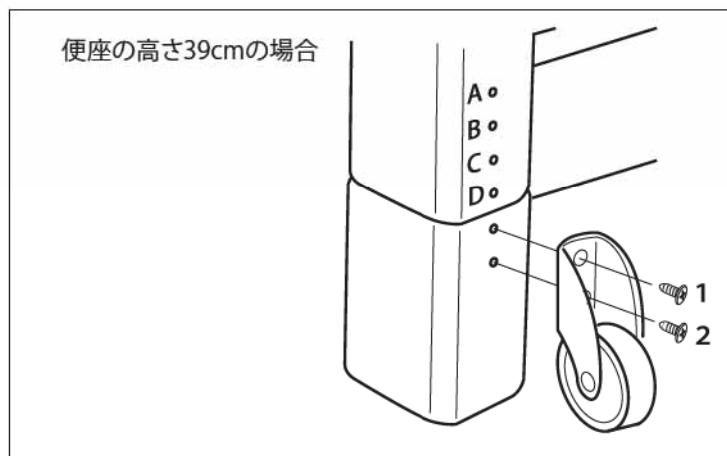

### ⚠ 注意

- 本体脚部または高さ調節脚のネジ穴にねじ込む
- ネジ穴位置とキャスターネジ穴位置は下表の通りにする

各高さでのキャスター取付け位置

キャスター取付け位置	無し	小	大	小+大
高さ調節脚	無し	小	大	小+大
便座高さ	33cm	36cm	39cm	42cm


# ご使用になる前に

## 5. 便座カバーの取付け


座面に座った時に、肌に冷たさを感じるなどの場合に、便座カバーを取り付けてください。

### 取付方法


- 1 プラスチックワイヤーのジョイント部をさし込んでください。

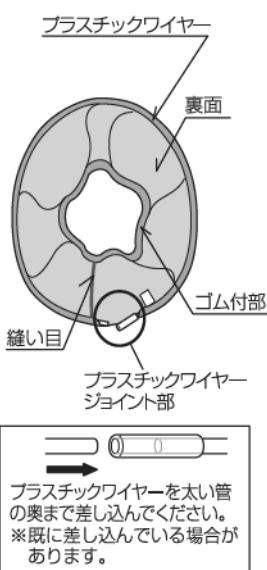


- 2 プラスチックワイヤー部を便座の裏内側の立ち壁にあてます。

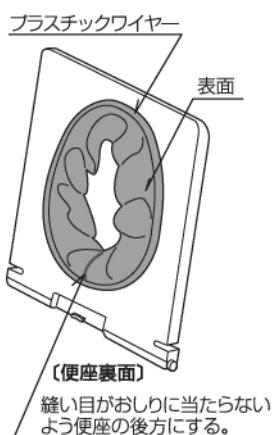


- 3 カバーをめくり返し、ゴム付部を便座前方の立ち壁から引っかけていきます。

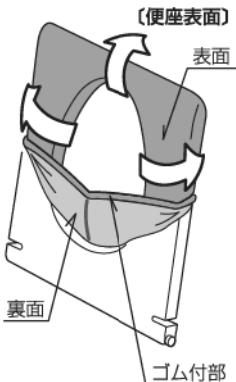

- 4 便座後方にある凹部に引っかけます。

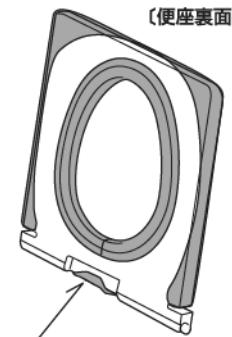

- 5 全体の形を整えます。

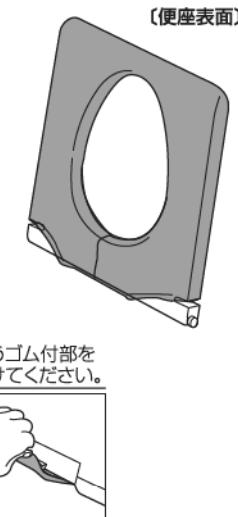

### お手入れ方法

- プラスチックワイヤーをジョイント部のさし込みを外し、カバーから引き抜いてください。
- 右記の表示にしたがい、洗濯には必ず40℃以下の水を使用してください。  
なお、洗濯機の場合は、弱水流で、手洗いの場合は、かるくもみ洗いしてください。
- 中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤は使用しないでください。
- 洗った後は、風通しのよいところで陰干ししてください。



### △注意



- カバーを便座に取付ける際は、プラスチックワイヤーをカバーに挿入し、ジョイント部を奥までさし込む
- 直射日光が当たる場所に長時間放置しない  
色あせの原因になります。
- 濡れたり、汚れたままにしない  
染みやカビが発生する原因になります。

### 仕様


表糸	アクリル 100%
裏糸	ナイロン 86%・ポリエステル 14%
プラスチックワイヤー	ポリプロピレン

## 6. 肘掛けの高さ調節

- 肘掛けの高さは出荷時 21cm に設定されています。
- 肘掛けの高さは便座面から 18cm・21cm・24cm の 3 段階に調節できます。

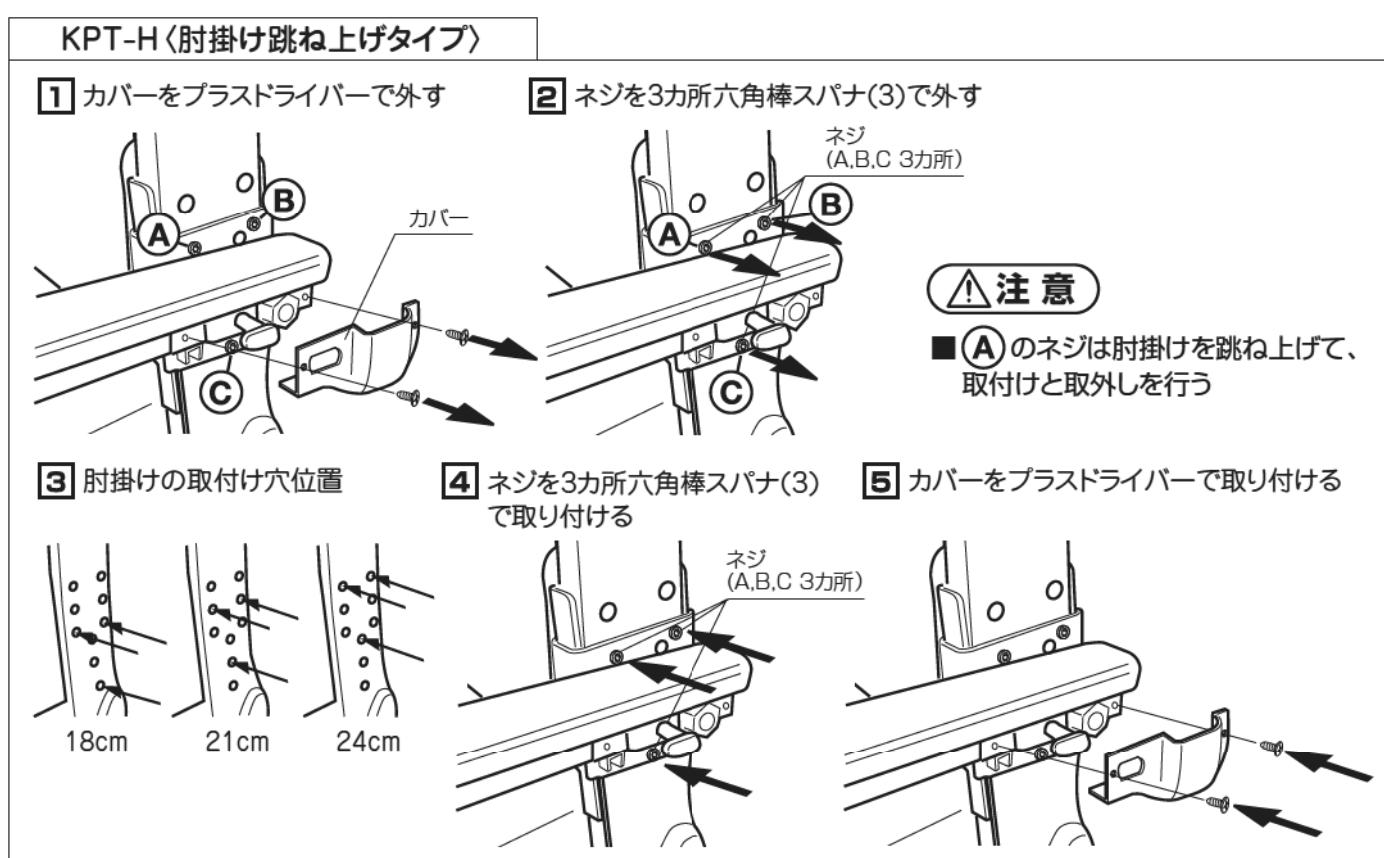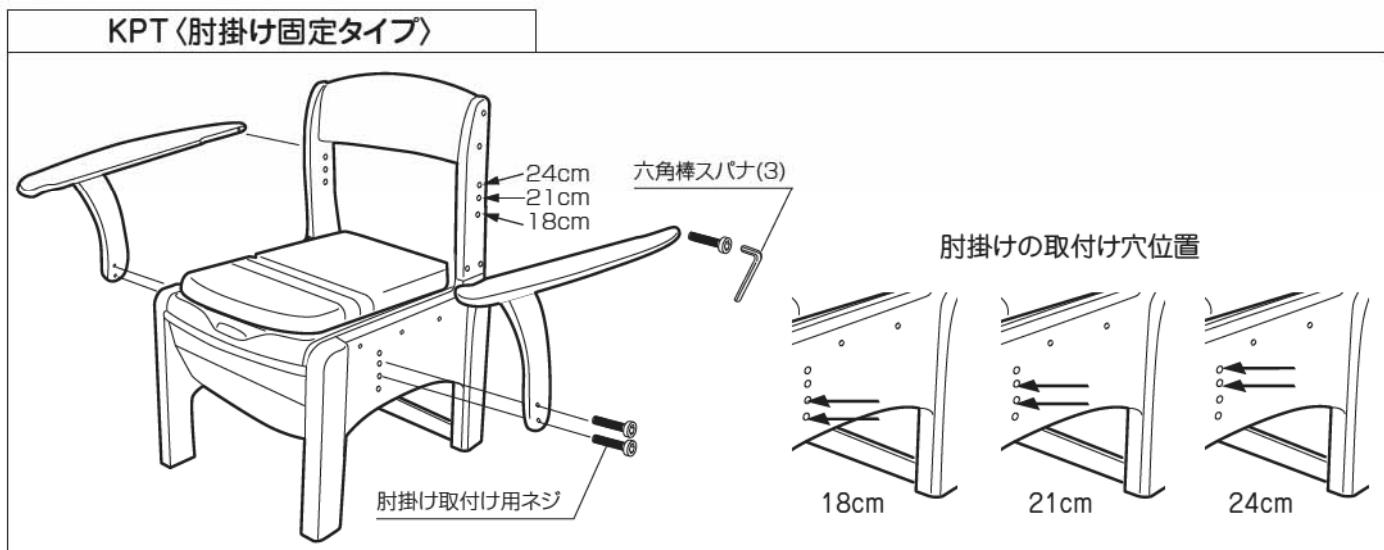

### 肘掛け跳ね上げタイプの肘掛けロックのしかた

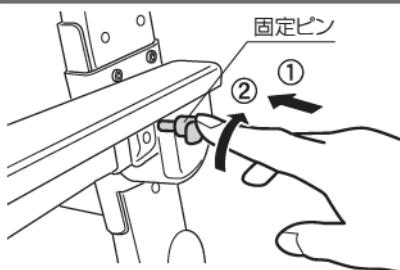

完全に肘掛けを跳ね上げた状態や肘掛けを下ろした状態で、動かないようにロックすることができます。肘掛けを跳ね上げたり、下ろしている途中ではロックされません。使用目的に合わせてご使用ください。

- ① 固定ピンを押し込みます。
- ② 固定ピンを押しながら90度回転させるとロックします。

解除するときは逆の手順で行ってください。


# ご使用方法

## 1. 設置のしかた


- 本体の移動は必ず「背もたれ」または「背もたれと肘掛け」または「肘掛けと肘掛け」を持って、本体をかたむけて、キャスターを利用し、行なってください。
- 通常はイスとして使用できます。
- 付属のバケツフタは、バケツを本体から取外したときのみ使用してください。本体に取付いているバケツに使用すると故障の原因になります。

### KPT(肘掛け固定タイプ)

ベッドサイドで使用の場合は、ベッド側の肘掛けを外して使うと移乗しやすくなります。

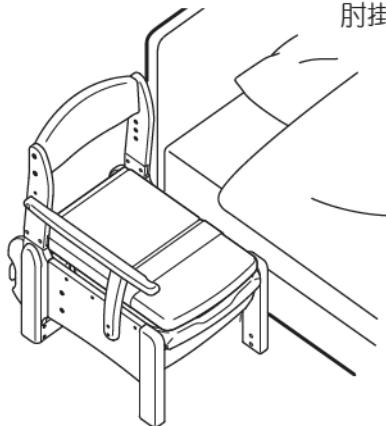


※取り外した部品は大切に保管してください。

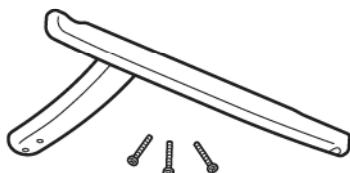

### KPT-H(肘掛け跳ね上げタイプ)

ベッドサイドで使用の場合は、ベッド側の肘掛けを跳ね上げて使うと移乗しやすくなります。

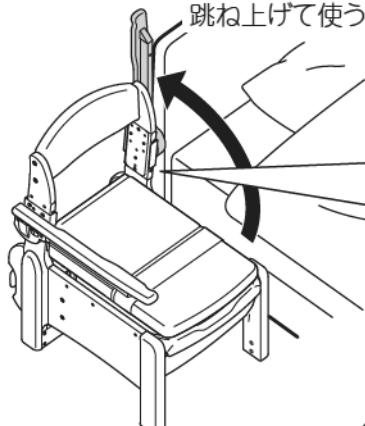

#### △注意



介助者がいる場合は、左右の肘掛けを跳ね上げて使用できます。




#### △注意

■必ず介助者が身体を支える。

## 2. 移動のしかた

- KPT(肘掛け固定タイプ)の移動は必ず「肘掛けと肘掛け」または「背もたれ」または「背もたれと肘掛け」を持って、本体をかたむけてキャスターを利用し、行なってください。  
KPT-H(肘掛け固定タイプ)の場合は「背もたれ」を持って、本体をかたむけて、キャスターを利用し、行なってください。

※イラストはKPTです。

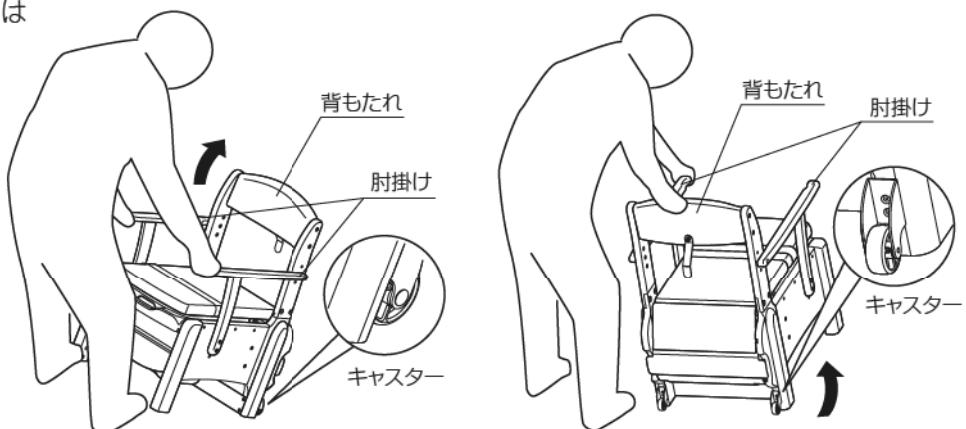

#### △注意


- ポータブルトイレに人が座った状態や、物をのせたままでは移動させない  
転倒したり、物が落話し、破損したり故障の原因となります。
- バケツ内に水や汚物を入れたまま、本体を移動させない  
内容物がこぼれ、本体や衣服・床などを汚すおそれがあります。
- 移動の際は、バケツ内の汚物の有無を確認する  
内容物がこぼれるおそれがあります。
- 本体を移動させる時は、必ず座面を閉る  
指をはさむおそれがあります。
- KPT-H(肘掛け跳ね上げタイプ)の場合は、「肘掛け」を持って移動しない  
ロックが不十分だった場合、不意に「肘掛け」が跳ね上がり、転倒してけがのおそれがあります。

### 3. ポータブルトイレの使い方

ポータブルトイレをご使用されるときは、次の手順でご使用ください。座面の開閉にあわせて内側のバケツシャッターが自動的に開閉し、使用後に座面を閉めることで臭気の拡散を抑えます。






#### 使 用 時

「座面持ち手」を持って、座面を背もたれの方へ開いてください。内側のバケツシャッターも一緒に開きます。

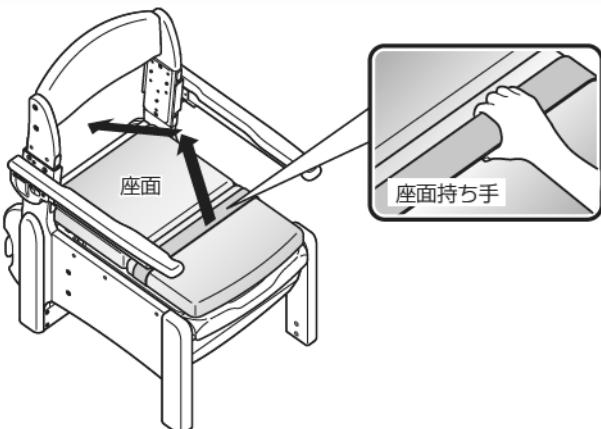

#### 使 用 後

使用後は必ず座面を閉めてください。「座面持ち手」を持って、ななめ上方向に引いて閉めてください。内側のバケツシャッターも一緒に閉まります。

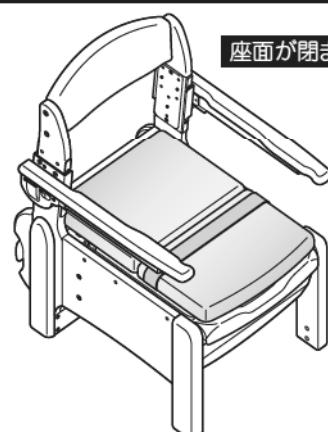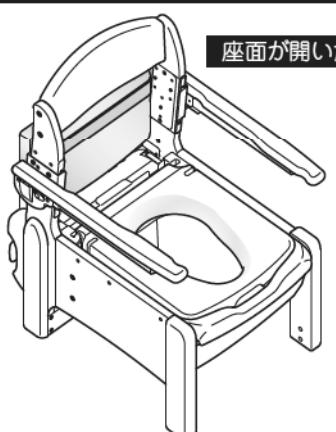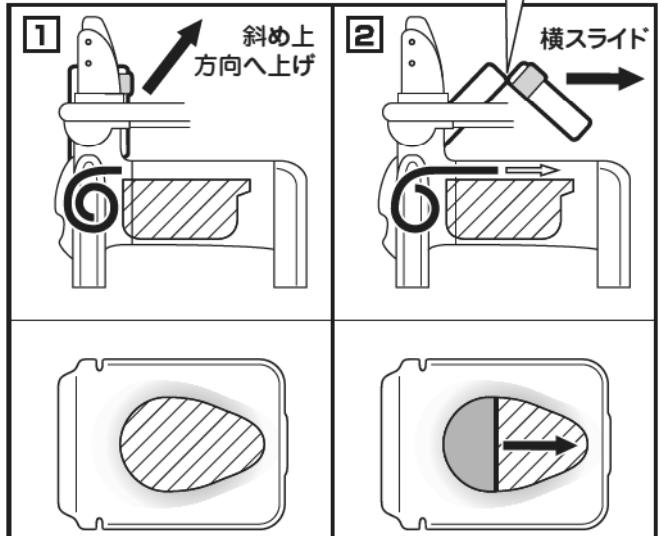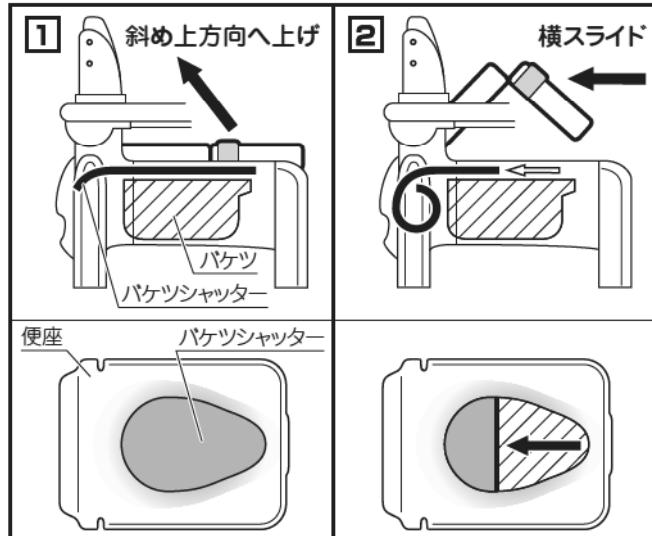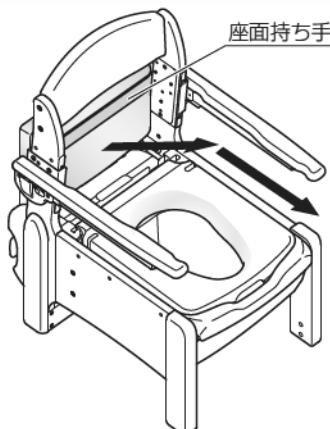

#### ！ 注意

■「座面持ち手」を水平にひっぱると便座に引っ掛かり、座面が閉まりません。  
座面は「座面持ち手」をななめ上方向にひっぱりながら閉めてください。


■開閉動作はゆっくり行なう  
勢いよく操作すると、手をはさむおそれがあります。

# ご使用方法

## 4. バケツの取り出しかた

バケツ内の汚物を処理するために、バケツを取り出す際は、次の手順で行ってください。

- ① 座面持ち手を持って、座面を開いてください。
- ② 便座を開けてください。
- ③ バケツの取っ手を持って、バケツを取出して汚物を処理してください。

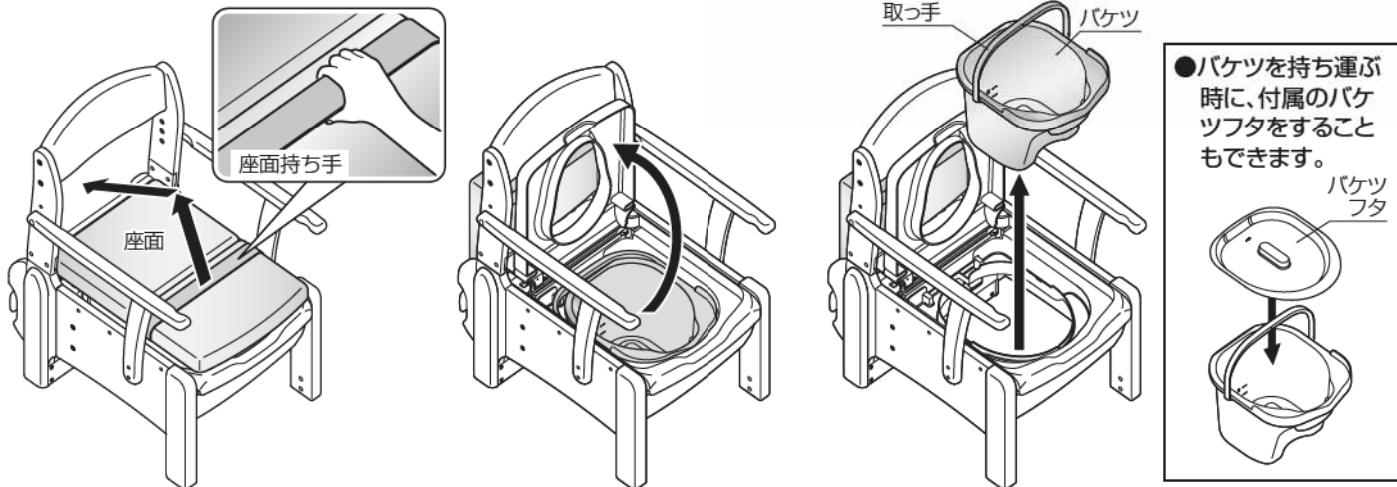

### ！注意

#### ■長期間座面を開け放しにしない

バケツシャッターが開いたまま変形する恐れがあり、臭い漏れの原因となります。


●右図のようにバケツ内の汚物を処理する時に、片手で取っ手を持ち、もう片方の手でうしろの取っ手を持つと楽に作業ができます。



## 5. バケツのセットのしかた

バケツを本体にセットする際は、次の手順で行ってください。

- ① バケツフタを使用した場合は、必ず取外してください。 バケツフタ
- ② ③ 便座、座面の順に閉めてください。
- ④ 座面の開閉を行い、内側のバケツシャッターが一緒に開閉することを確認してください。  
(P11 ポータブルトイレの使い方参照)

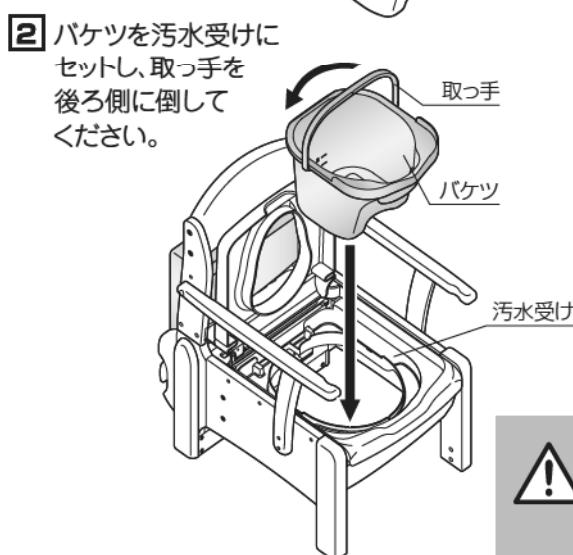

### ！注意


■「座面持ち手」を水平にひっぱると便座に引っ掛かり、座面が閉まりません。座面は「座面持ち手」をななめ上方向にひっぱりながら閉めてください。

## 6. 後ろからの介助のしかた

後ろからの介助は、座面ストッパーを解除し、座面を後ろ側へ倒し、行なってください。

### 介助時

- 1 座面を開き、座面ストッパーを右または左に回して、水平にしてください。

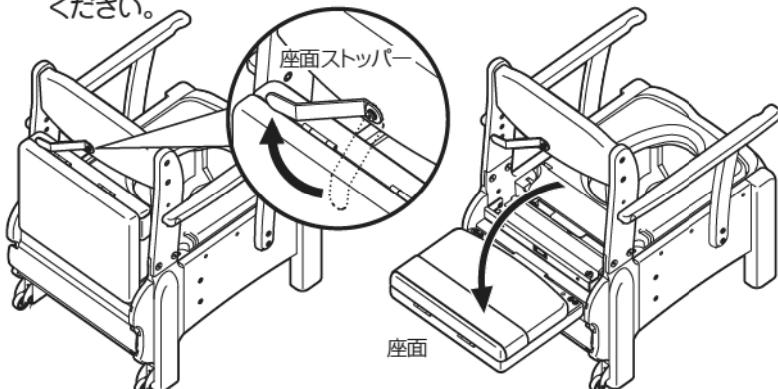

#### △ 注意


- 座面を後ろ側に倒す時は、手で持ったままゆっくり倒す
- 座面を後ろ側に倒した状態で、座面上に力を加えたり、物を載せたりしない
- 座面を後ろ側に倒した状態で放置しない

### 介助後

- 1 座面を起こしてください。  
(パチンと音がするまで起こしてください)



- 2 座面ストッパーを回して垂直にし、座面を閉めてください。

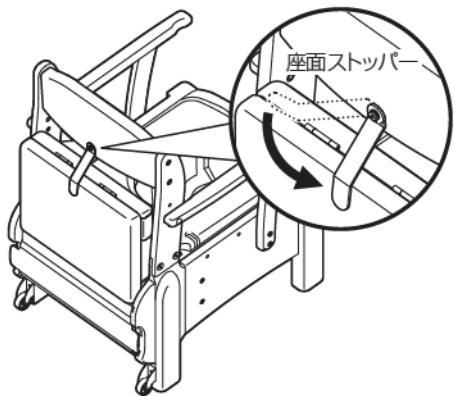

## お手入れのしかた

各部品を着脱方法を参考に取り外し、お手入れしてください。お手入れが終わりましたら、各部品は元通り、しっかりと取り付けてください。

#### △ 注意


- 便座などに消臭剤がついた場合はすぐにふき取る 放置すると変色するおそれがあります。
- タワシやみがき粉・研磨剤入りスポンジなどは使用しない 製品にキズがつくおそれがあります。
- 漂白剤・シンナー・クレゾール・アルコールなどは使用しない 木部の塗装がはげたり、プラスチック部品が劣化するおそれがあります。
- 汚れや水気は、スポンジまたは柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませてすみやかにふき取る

バケツの取り出し P12 の『4. バケツの取り出しかた』を参照し、バケツを取り出してください。

## 便座および汚水受けの着脱方法


### 取外し方

便座および汚水受けを上に持ち上げると取り外すことができます。

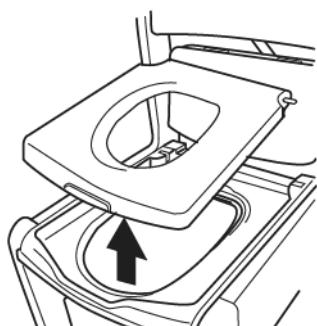


### 取付け方

汚水受けの左右の溝に、便座の軸を上から入れます。

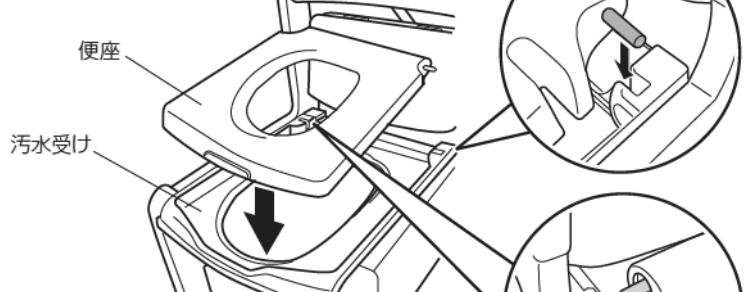

#### △ 注意

取付けの際はダンパーの軸と汚水受けの溝の向きを合わせて入れてください。

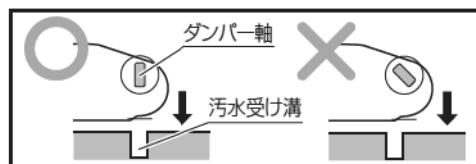

# お手入れのしかた


## バケツシャッターの脱着方法

座面が閉まっていることを確認してください。


**△注意** バケツシャッターの脱着は座面を閉じた状態で行ってください。また作業の途中で座面を開閉しないでください。

### 取外し方


- ① 本体背面の2ヶ所のボタンを外し、カバーをめくって座面の上にのせてください。

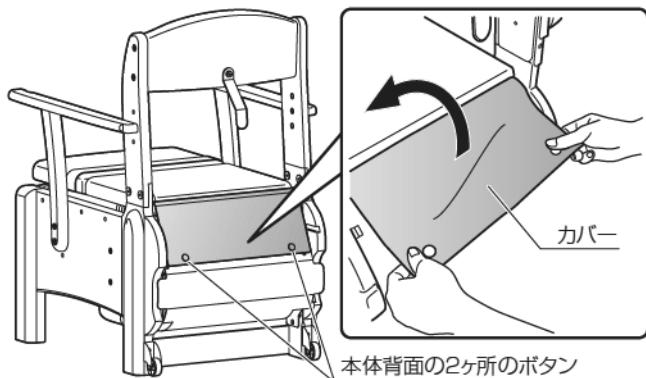

- ② バックカバーを開けます。

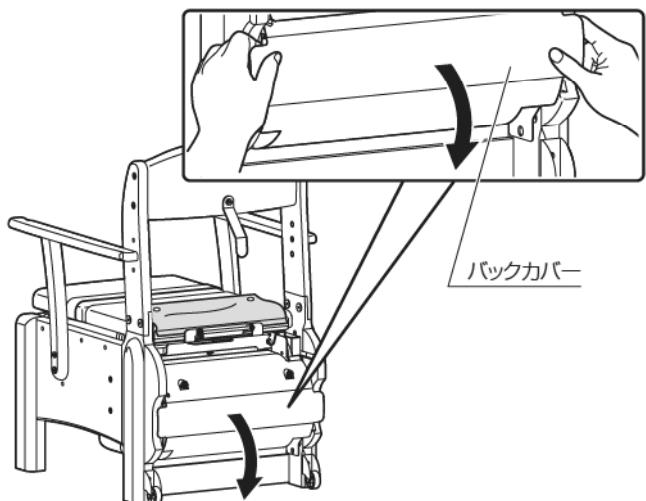


- ③ バケツシャッターを固定しているロック部を外し、バケツシャッターを引き抜いてください。

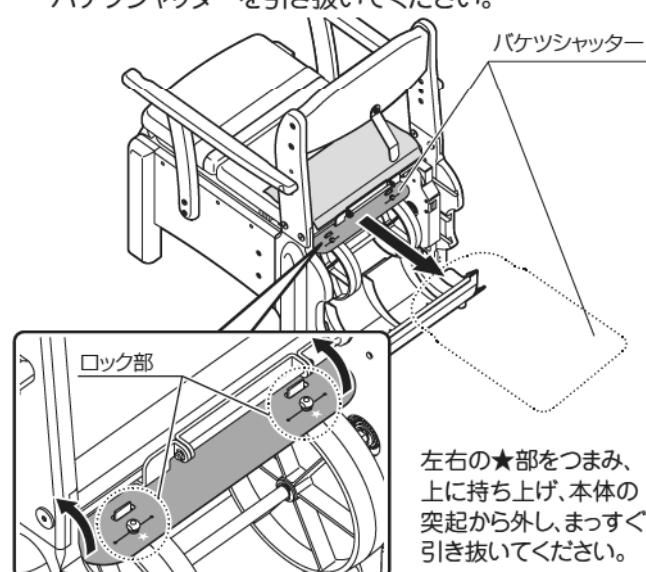


### 取付け方


- ① 印刷面を上側に向け、バケツシャッター挿入口にまっすぐ奥まで差し込んでください。

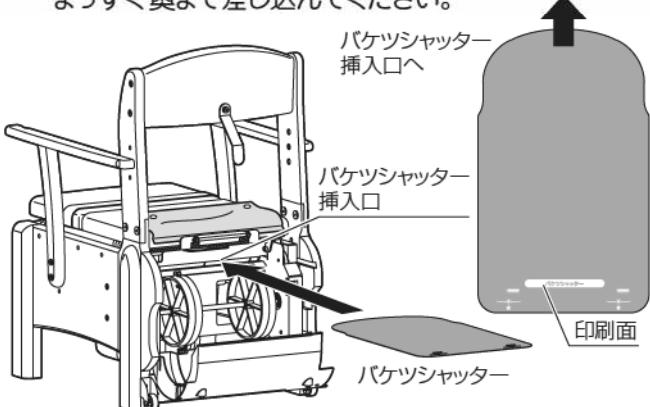

- ② 左右の★部穴2ヶ所を本体の突起に「パチン」と音がするまで、しっかりと取り付けてください。  
バックカバーを元通り閉めてください。

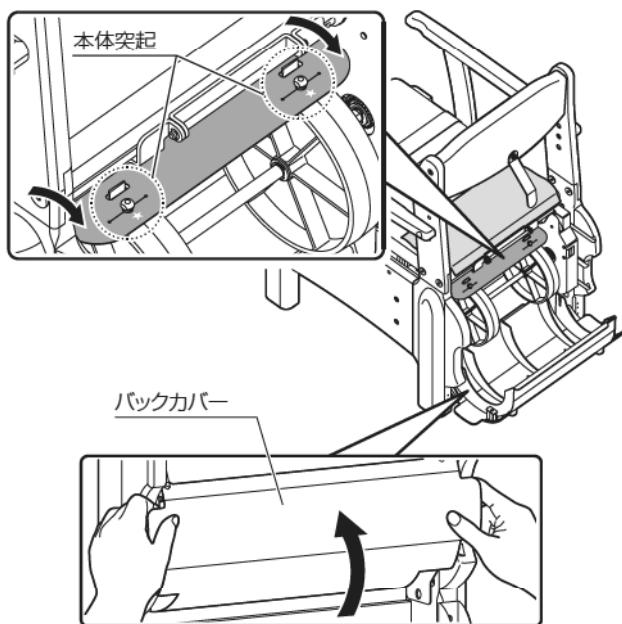

- ③ カバーを元に戻し、ボタンを「パチン」と音がするまでしっかりと止めてください。

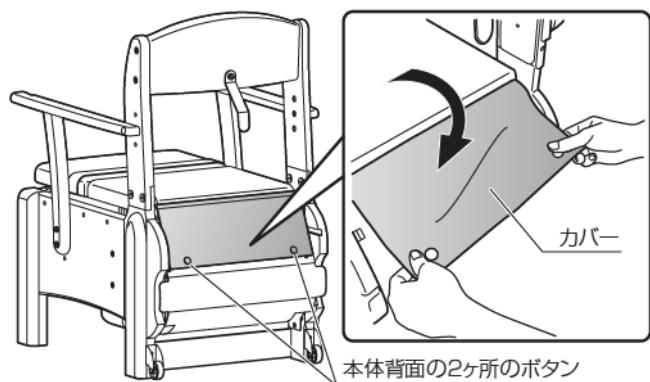

# こんなときは

## 故障かな? と思ったときには

症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
座面を開いても バケツシャッターが開かない	バケツシャッターが本体突起に きちんとセットされていますか?	バックカバーを開けてバケツシャッターのロック部 を本体突起にしっかりとはめ込んでください。	14
	バケツシャッターが やぶれていませんか?	お買い求めの販売店へご相談ください。	—
座面の開閉ができない または、座面の開閉がしにくい	バックカバーがきちんと 閉まっていますか?	バックカバーの両サイドを押し、しっかりとロック してください。	14
	汚水受け、便座、バケツがきちんと セットされていますか?	汚水受け、便座、バケツをきちんとセットして ください。	12,13
	バケツシャッターが本体突起に きちんとセットされていますか?	バックカバーを開けてバケツシャッターのロック部 を本体突起にしっかりとはめ込んでください。	14
	バケツシャッターが やぶれていませんか?	お買い求めの販売店へご相談ください。	—
	異物が混入していませんか?	座面を閉めてから、座面の開閉を数回行って、 異物を取り除いてください。	11
	バケツシャッターが 折れ曲がっていませんか?	バックカバーを開けてバケツシャッターを 取り外して、折り曲がりを修正してください。 折り曲がりが修正できない場合は、お買い求め の販売店へご相談ください。	14
使用後、しばらくたっても 臭いが気になる	座面はきちんと 閉まっていますか?	座面をきちんと閉めてください。	11
	汚水受け、便座、バケツがきちんと セットされていないのでは?	汚水受け、便座、バケツをきちんとセットして ください。	12,13
	バケツシャッターが本体突起に きちんとセットされていますか?	バックカバーを開けてバケツシャッターのロック部 を本体突起にしっかりとはめ込んでください。	14
	バケツシャッターが やぶれていませんか?	お買い求めの販売店へご相談ください。	—
	バケツシャッターが 折れ曲がっていませんか?	バックカバーを開けてバケツシャッターを取り 外して、折り曲がりを修正してください。 折り曲がりが修正できない場合は、お買い求め の販売店へご相談ください。	14

# 保証について

弊社の定める保証とは、正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことを約束することです。

## ★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。

返送用登録はがきに所定の事項を記入のうえ、商品購入後1ヶ月以内に弊社へご返送いただき、ご登録ください。

※ご登録がない場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

## ★保証期間

お買い上げ日より1年間です。（消耗部品は含みません。）

## ★保証期間後

保証期間後はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

## ★消耗部品

・バケツ 　・便座カバー 　・ペーパーホルダー 　・バケツシャッター 　・キャスター

## ★保証の適用除外となる場合

- (a) ご使用による消耗および取扱不注意による破損  
例) バケツシャッター・バケツ・便座カバーの破損等
- (b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- (c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- (d) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
- (e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
- (f) 一般に使用しない場所、または特殊な状態での使用による破損
- (g) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
- (h) 取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
- (i) 取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障
- (j) ご購入後1ヶ月以内に返送用登録はがきをご返送いただいていない場合
- (k) 日本国外でご使用の場合

## ★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

## ★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡しください。

## ★一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。



株式会社 カワムラサイクル



■本社	〒 651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL 078-969-2800
■仙 台サービスセンター	〒 982-0023	宮城県仙台市太白区鹿野 3-1-1	TEL 022-746-9540
■東 京サービスセンター	〒 110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL 03-3874-3511
■横 浜サービスセンター	〒 220-0073	横浜市西区岡野 2-12-9	TEL 045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒 487-0027	愛知県春日井市松本町 1-3-11	TEL 0568-52-4800
■大 阪サービスセンター	〒 553-0004	大阪府大阪市福島区玉川 1-3-18	TEL 06-6479-2055
■本 店サービスセンター	〒 651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL 078-969-2820
■福 岡サービスセンター	〒 819-0055	福岡市西区生の松原 1-18-3	TEL 092-882-4722
■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場			

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に、一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。

3版 2014年 6月
2版 2014年 3月
1版 2012年 12月
初版 2012年 12月