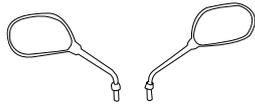
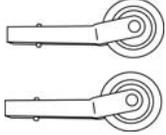
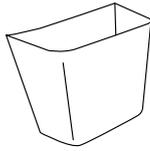


オプション部品 取扱説明書


(バックミラー・転倒防止車輪・前カゴ)

1. 名 称


・バックミラー	
・転倒防止車輪	
・前カゴ	

2. 取付方法

枕の取付方法

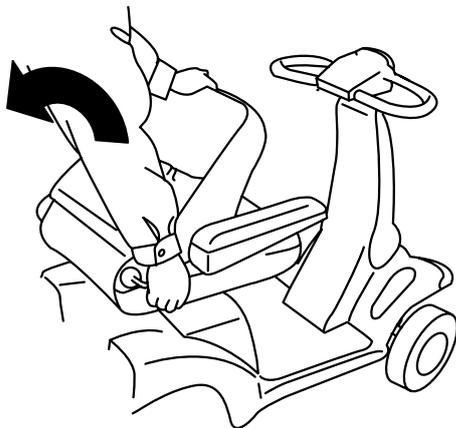


背もたれ角度調整レバーを引ながら、シートを起こします。

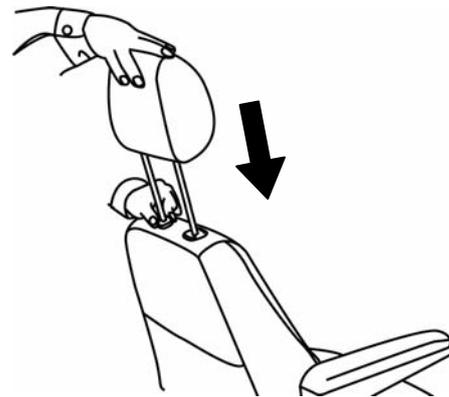

枕差込部のボタンを押しながら、枕を差し込みます。


バックミラーの取付方法

- ・バックミラーの取付部のナットを緩め、バックミラーを見やすい位置に調整し、付属の工具でナットをしっかりと締めてください。

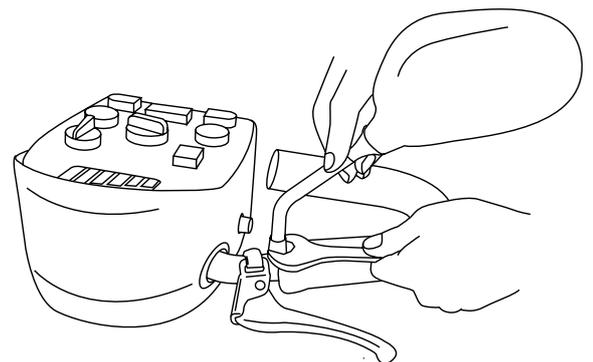

前カゴの取付方法


- ・前カゴをハンドル支柱前部の金具に引っ掛けるようにして取り付けてください。

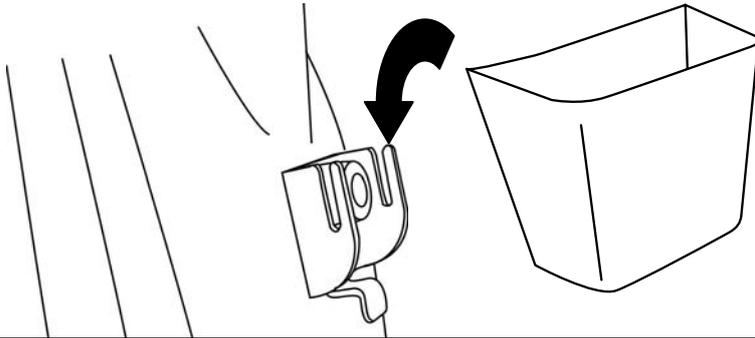

前カゴには 2kg 以上の荷物は入れないでください。
ご使用者の最大体重は 100kg(積載物を含む)です。
重量をオーバーしないように使用してください。

⚠ 注意


前カゴがしっかりと固定されていることを確認してください。固定されていないと、不意に前カゴが外れ、前カゴや中の物が破損する恐れがあります。

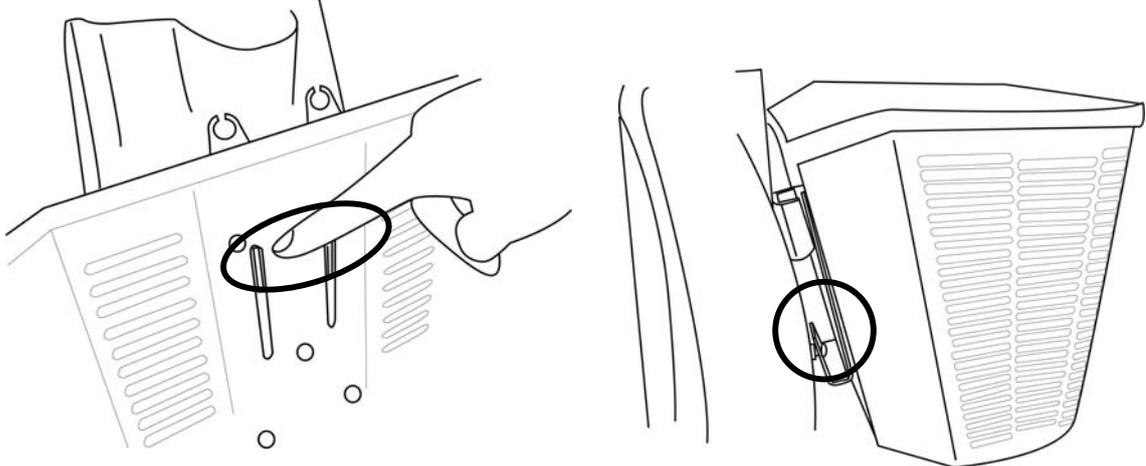


上図の 印 2 箇所がしっかりと固定されていることを確認してください。

後部転倒防止車輪の取付方法

- ・後車輪内側にある角パイプに補助車輪が上向きになるように固定ピンを押さえながら “カチッ” と音がするまで差し込んでください。

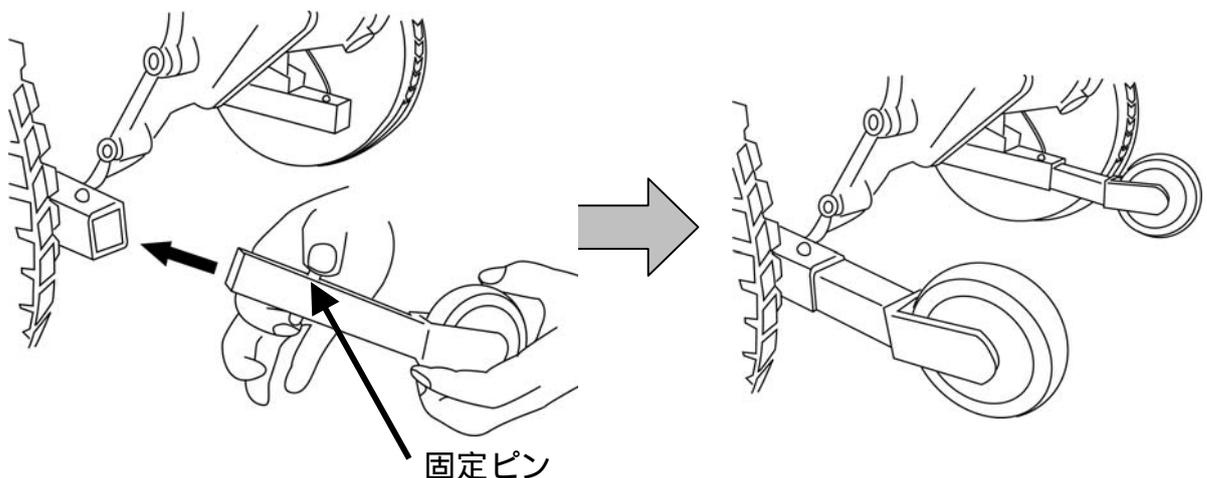

3. 寸法図 (バックミラー・転倒防止車輪・前カゴを取付けた場合)

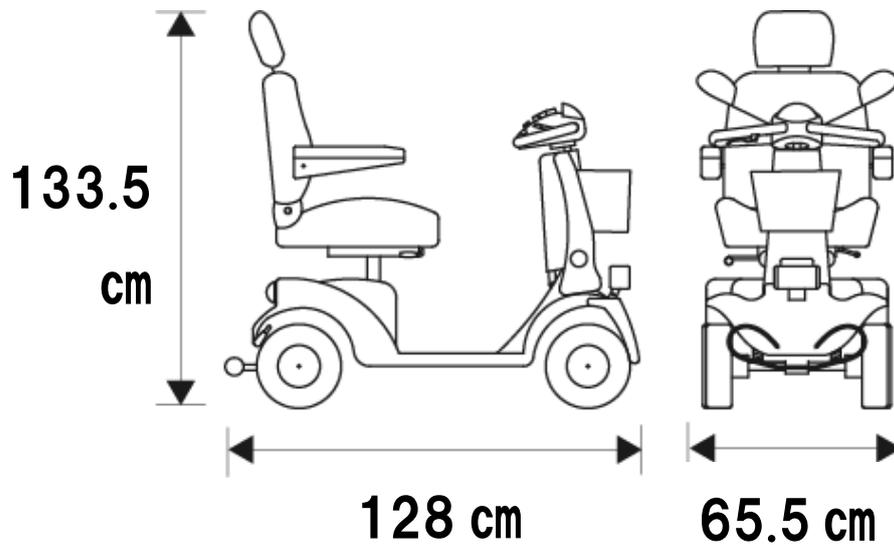

■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■仙台サービスセンター	〒982-0023	宮城県仙台市太白区鹿野 3-1-1	TEL022-746-9540
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■横浜サービスセンター	〒220-0073	横浜市西区岡野 2-12-9	TEL045-290-9585
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1-3-11	TEL0568-52-4800
■大阪サービスセンター	〒553-0004	大阪市福島区玉川 1-3-18 マックスビル 5階	TEL06-6479-2055
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2820
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原 1-18-3	TEL092-882-4722
■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場			

※本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に、一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。