



# 取扱説明書

松葉杖  
S11-M



## ● 目次 ●

安全に関するご注意	1
1. 各部の名称	2
2. 松葉杖の長さ、グリップ高さの目安	2
3. 松葉杖の長さ、グリップ高さ調節	3
4. 松葉杖の主な使い方	4
5. 仕様	4
6. 使用上のご注意	5
7. 杖の点検・保守	5
保証規定	7

このたびはカワムラサイクルの松葉杖をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、製品を安全にご使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードしていただけます。（<https://www.kawamura-cycle.co.jp>）

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご使用の際には必ず携帯していただき、必要なときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

保証書は本書裏表紙に記載されていますので、お買い上げいただいた販売店より記入をお受け下さい。

**カワムラサイクル**

## 安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。


### [表示マークの説明]

※正しい取り扱いに関する必要事項を標示(シンボルマーク)で表しています。

	<b>警告</b>	取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
	<b>注意</b>	取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
	<b>禁止</b>	してはいけないことを示しています。
	<b>必ず守る</b>	必ずしなければならないことを示しています。

 <b>警告</b>	 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●勝手に改造・分解しないでください。 強度や耐久性が劣化して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。</li><li>●本製品を火気に近付けないで下さい。 熱くなりプラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。 </li><li>●この製品は、歩行訓練用の杖です。それ以外の用途には使用しないでください。</li></ul>
	 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●認知症（痴呆症）の方の場合は、部品等を飲み込むことが考えられますので、充分に注意して下さい。</li><li>●滑りやすい床面や濡れている床面では動く場合がありますので、充分ご注意ください</li></ul>
 <b>注意</b>	 <b>禁止</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●杖を投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。</li><li>●湿気の多いところや雨風の当たるところに本製品を放置しないでください。サビの原因になります。</li></ul>
	 <b>必ず守る</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>●高さ調整ピンは、確実に固定されているか必ず確認してください。</li><li>●次のような場所・状況でのご使用は危険です。使用を避けるか、介助者に同行してもらってください。<ul style="list-style-type: none"><li>・凹凸の激しい道</li><li>・夜間、雨や雪、風の強い日</li><li>・凍結路</li><li>・深い砂利道や砂道</li></ul></li><li>●屋外に放置すると、サビなどにより製品が劣化します。保管は屋内でおこなってください。</li></ul>

# 1. 各部の名称

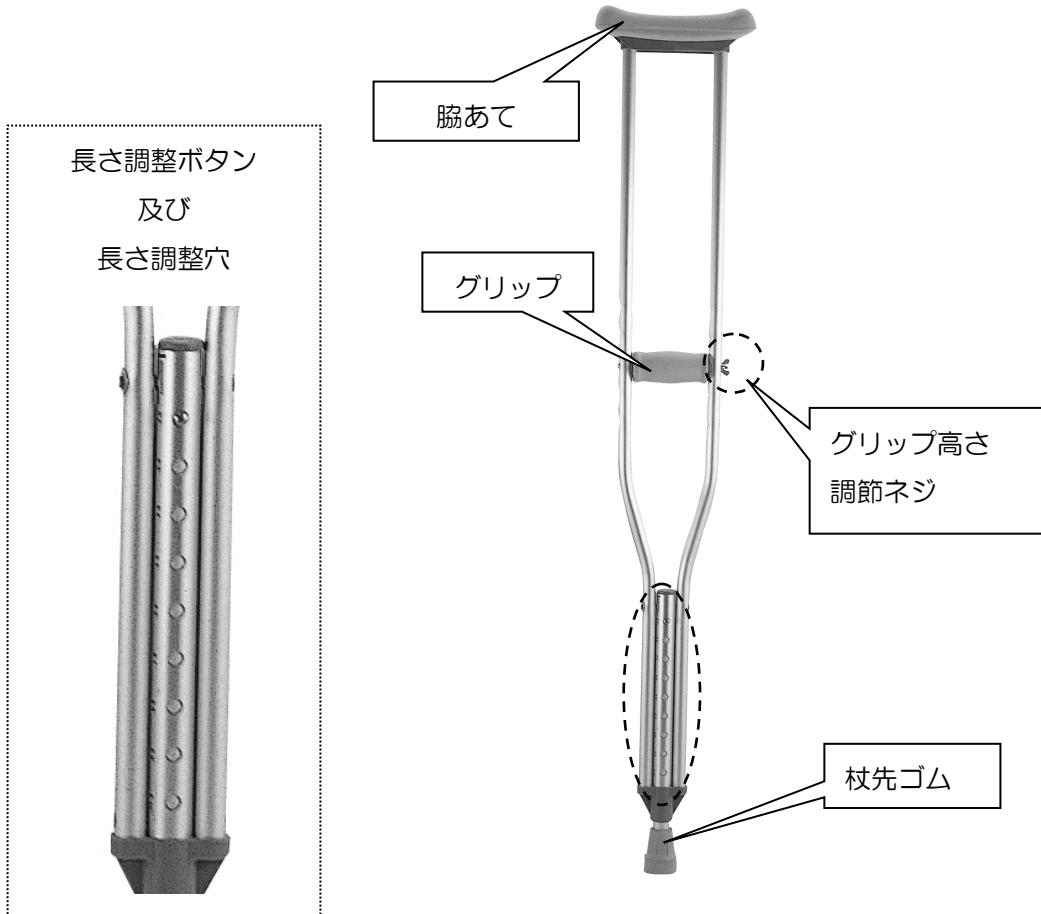


## 2. 松葉杖の長さ、グリップ高さの目安

### <松葉杖の長さ>

脇の下より指3、4本程度あけた位置に横木カバーの上面が来るくらいの高さが目安です。


### <グリップ高さ>

右図のように、足先より15cm程外側に杖先を置いて肘を軽く曲げた状態（約30度）でグリップが握れるくらいが目安です。

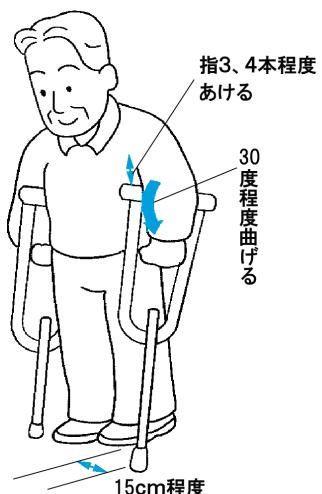

### 3. 松葉杖の長さ、グリップ高さ調節

#### 《長さの調節》

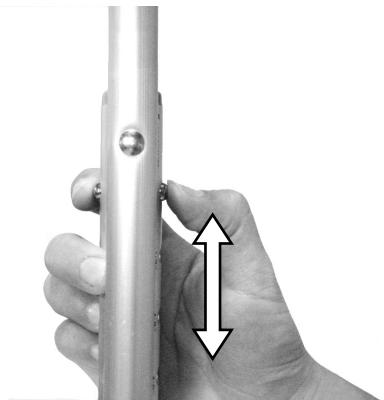


「長さ調節ボタン」を押して、長さを調節します。





#### 《グリップ高さの調節》



①グリップ横の「グリップ高さ調節ネジ」を緩めて取り外します。

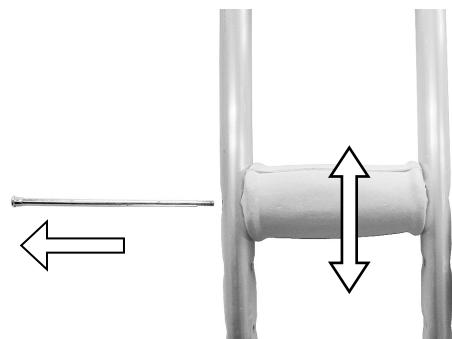

②ボルトを引き抜いてグリップを上下に移動し、穴位置を合わせます。

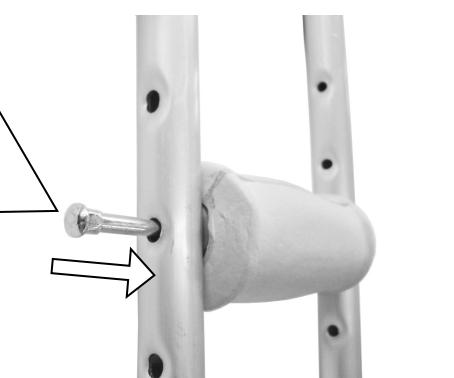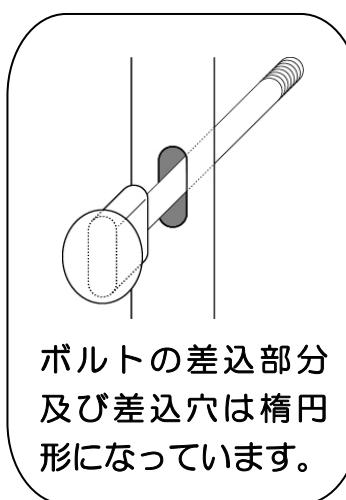

③ボルトを穴の形状にあわせて戻し、ネジをしっかりと締めます。


## 4. 松葉杖の主な使い方

### ≪平地歩行≫

歩行においては、脇あてに身体を乗せることはしないようにし、脇で締めつけるようにします。脇の下は多くの血管や神経があり、そこを長時間圧迫することを避けるためです。

一側の下肢に問題がある場合には3点歩行がもっとも多く用いられます。


3点歩行

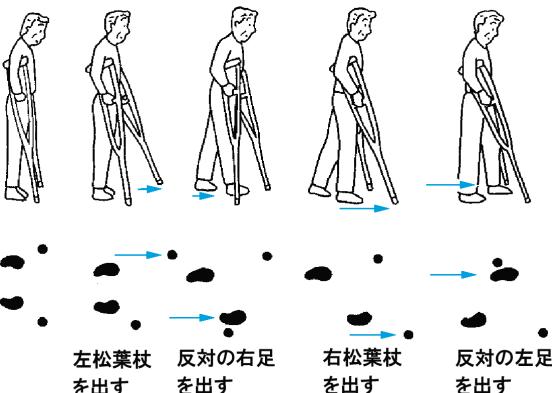

### ≪階段の上り下り≫

階段の上りでは杖から健側下肢、麻痺側下肢の順番で行います。

また、下りる場合には杖、麻痺側、健側の順番で行います。

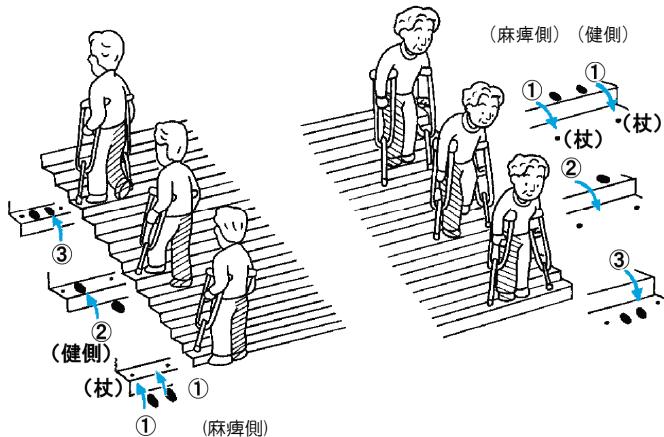

## 5. 仕様

S11-M	
材質	本体 アルミ グリップ TPR（熱可塑性ゴム） 先ゴム TPR（熱可塑性ゴム）
重量	860g
長さ	114.5~134.5cm 2.5 cmピッチ（9段階）
脇あてカバー～ グリップ間隔	39~54 cm 3.7cm ピッチ（5段階）
色	シルバー

## 6. 使用上のご注意

### ⚠ 警告

取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

- 本製品は、必ず医師や専門家または販売店の指導に基づいてご使用ください。
- 身体に合った杖を選んでください。
- ご使用前には各部の点検をしてください。また、杖先ゴムが破れたり磨耗したりなどの異常があるときは、交換してください。
- 身体に合った適切な長さに調節してください。
- 支柱が確実に固定されたことを確認してご使用ください。
- 濡れた床等、滑りやすい路面での使用は避けてください。
- ぬかるみや、泥地などではバランスを崩す恐れがありますので、ご使用はお避けください。
- 人に向けて振り回したりしないでください。
- 段差のあるところでのご使用はお避けください。
- 階段の上り下りの際は、左右の杖が同じ段に乗るよう、充分にご注意ください。左右の杖が接地しないと、転倒の恐れがあります。

### ⚠ 注意

取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。

- 本製品は歩行訓練用です。用途以外（例えば、登山用、護身用などに）には使用しないでください。
- 杖先が溝などにはまらないようご注意ください。
- 杖を分解・改造しないでください。（保証対象外）

### <保管方法>

- 高温・多湿のところは避け、なるべく日が当たらないところに保管してください。
- 杖の上に重いものを置かないでください。

## 7. 杖の保守、点検

この製品を安全にお使いいただくためには、日ごろのお手入れと点検整備が必要です。

### ■汚れていませんか？

ホコリや泥などで汚れたときはそのままにしておかず、早めに乾いた雑巾等でふき取ってください。汚れのひどいときは中性洗剤をお使いください。

### ■消耗部品の交換は必要ですか？

先ゴムの磨耗がないか確認し、磨耗が激しい場合には交換してください。

異常が見つかったらご使用を中止してお買い上げ頂いた販売店へご相談ください。

# カワムラサイクル

■本社	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■東京サービスセンター	〒110-0013 東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■名古屋サービスセンター	〒487-0027 愛知県春日井市松本町 1-3-11	TEL0568-52-4800
■本店サービスセンター	〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2820
■福岡サービスセンター	〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1-18-3	TEL092-882-4722
■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場		

本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に一部予告なく変更することがあります。  
修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げ頂いた販売店へお申し付けください。  
転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・車種をご確認のうえ上記までご相談ください。

# 保証規定


弊社の定める保証とは、保証期間内に正常な使用状態において故障が生じた場合に限り、無償にて修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ日より1年以内に故障した場合は無償修理または交換いたします。(下記記載の消耗部品は含みません。)
- 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、お買い上げ頂いた販売店へご連絡ください。
- 無償保証期間内でも次の場合には保証適用除外となります。
  - ご使用による消耗および取扱不注意による破損  
例) タイヤの磨耗およびパンク、ワイヤー、シート、ステップ板の破損等
  - 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
  - お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
- 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
- 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
- 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
- 日本国外でご使用の場合
- 保証書の提示がない場合

## ■消耗部品

- 先ゴム
- グリップ

- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 補修用性能部品は、製造打ち切り後5年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 保証書にご記入頂いた個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検の為に記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

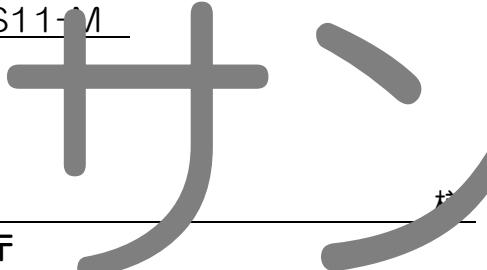保証書	
製品名 松葉杖	販売店名
品番 S11-M	住所 <input type="text"/> 印
お客様名 	TEL <input type="text"/>
ご住所 <input type="text"/>	お買い上げ年月日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 (保証期間上記より1年間)
TEL <input type="text"/> - <input type="text"/>	製造販売元 株式会社カワムラサイクル 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

一度使用された製品は、原則としてお取替えできません。

お問い合わせは、お買い上げいただいた販売店へお申し付けください。

S11-M

2018年12月版