

取扱説明書

アルミ製車いす FA（適合くん）シリーズ



● 目 次 ●

安全に関するご注意	1
1.同梱部品の確認	7
2.安全ラベル	7
3.各部名称	8
4.お使いになる前に	9
5.操作方法および使用方法	11
6.安全ベルトの使用方法	14
7.ブレーキの使用方法	15
8.シートの調整方法	16
9.お手入れの方法	17
10.保管についてのお願い	17
11.車いすの保守・点検	18
12.車いすの主な乗り方	20
13.仕様	22
14.製造記録	23
15.保証	24

このたびはカワムラサイクルの車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、商品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法
が記載されています。

取扱説明書は適宜更新しております。最新版を弊社ホームページからダウンロードして
いただけます（<http://www.kawamura-cycle.co.jp/product/manual.htm>）。

※ご使用になる前に必ずお読みください。また、ご利用いただく際には必ず携帯していただ
くか、必要なときにいつでもご覧になれるところへ大切に保管してください。



株式会社 **カワムラサイクル**

安全に関するご注意

※ご使用になる前に必ずお読みください。

安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

〔標示マークの説明〕

※正しい取り扱いに関する必要事項を標示（シンボルマーク）で表示しています。

 警告	取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。
 注意	取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。
 禁止	してはいけないことを示しています。
 必ず守る	必ずしなければならないことを示しています。




警告

取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。



- エスカレーターでは使用しないでください。
介助者がいる場合でも、転倒などにより重大な事故のおそれがあります。
- 勝手に改造・分解しないでください。
強度や耐久性が低下して危険です。また、事故になる恐れがありますので絶対に改造・分解しないでください。
故意にシートを切断する等の加工を絶対にしないでください。シートを破断したり、加工した状態でご使用されますとフレームが歪んだり、破断する原因となります。また、シート取付ネジが歪んだり、欠落すると事故の原因になります。
- 車いすに乗り降りの際は、決してステップ板(フットサポート)の上に足を載せないでください。
絶対にステップ板(フットサポート)の上に乗って車いすに乗り込んだり、降りられるときに立ち上がらないでください。車いすごと転倒し危険です。
- 車いすを火気に近付けないでください。
シート部が燃えたり、熱くなりプラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。
- ポケットには1 kg 以上の重いものを入れないでください。
過度の荷物はバランスを崩し危険です。また、押手に荷物を吊り下げたり、勢いよく腰掛けますとバランスを崩し危険です。絶対に避けてください。

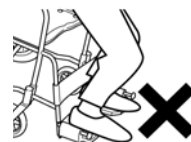




警告

取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

- 座シート以外の部分に腰掛けしないでください。
- 介助者は、絶対に車いすに乗って介助しないでください。
- 複数の人数で乗らないでください。
この車いすは一人用です。破損・事故の原因になります。
- 急な坂道(勾配4度以上)では使用しないでください。
- 押手に寄りかかったり、歩行補助として使用しないでください。

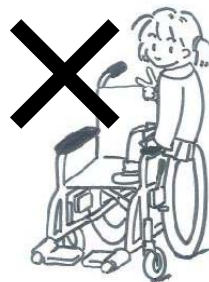

- 説明書に記載されている調整箇所以外の調整を行わないでください。
事故の原因となります。調整が必要な場合はご購入の販売店にご相談ください。

- 大きな段差を無理に乗り越えようとししないでください。


- 段差の前では一旦停止してティッピングレバーを利用して乗り越えてください。

決して勢いをつけて乗り越えないでください。大変危険です。
また、フレーム及びキャスト車輪等の損傷を受けます。



- 発進するときや段差を乗り越えるときには、キャストのタイヤが真っ直ぐになっていることを確認してから走行してください。

斜めに進入したり、キャストタイヤが斜めになった状態で発進すると段差を乗り越えられなくなったり、キャストが破損して事故の原因となる恐れがあり大変危険です。


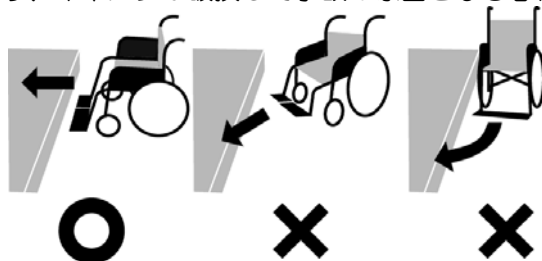


- 車いすでの走行中は、身体を乗り出さないでください。

車いすが不安定になり危険です。

- 車いすに座ったまま強い前傾姿勢をとらないでください。


車いすごと転倒し危険です。車いすに座ったまま前方の地面に置いてある物を拾うなど、車いすごと転倒し大変危険です。

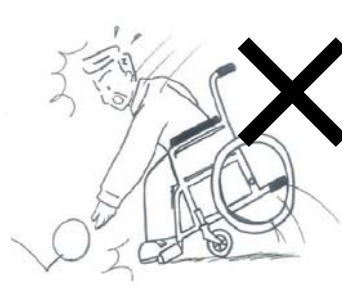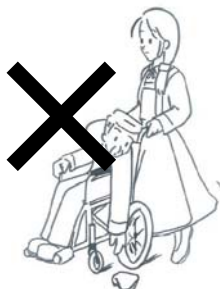

- 車いす以外の目的に使用しないでください。

物品運搬・踏み台などに使用しないでください。

車いすの上に立ち上がらないでください。

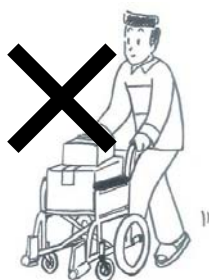



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。

- 車いすを持ち上げる場合、駐車ブレーキをかけ固定されているパイプをしっかり支えてください。

※背シート（バックサポート）を持たないでください。
これらの箇所を持ち上げると、押手が車いすから外れるなど、大変危険です。




※利用者が乗ったまま持ち上げる場合は、安全ベルトをしっかりと締め、3人以上でフレーム前下部とティッピングレバーを持ってしっかりと支えてください。利用者の身体の一部を持たないでください。

- 道路通行の際は、必ず右側通行してください。また、歩道を通行してください。

- 身体が前のめりにならないよう充分ご注意ください。

段差や凸凹などのある路面等を走行するときは、特にご注意ください。

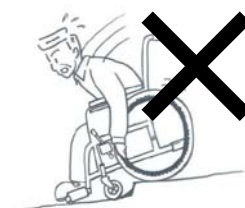

- 踏み切りの横断やエレベータの乗り降りの際は、車輪をレールに対して直角にして走行してください。

斜めの角度で進入するとレールの溝にはまって危険です。必ず介助者と一緒にわたってください。



- 坂道の上り下りや段差のある場所では、必ず介助者に支えてもらって行ってください。

坂道を上るときは前向きで、下るときは後ろ向きで走行してください。
坂道を前向きで下ると乗っている人が前へずり落ちる、前へ倒れる、スピードが出やすいなど、非常に不安定になり危険です。また、介助者がバランスを失った時も危険です。

[上り坂]

[下り坂]



- 傾斜地・坂道での走行は特にご注意ください。

- ・傾斜地や坂道では、車いすが予想外の方向に進む、スピードが出やすいなど大変危険です。
- ・車いすからずり落ちる、前へ倒れるなど、非常に不安定になり危険です。



- 車いすに乗り降りする際、一時停止する際は、必ず駐車ブレーキをかけて車いすが固定されていることを確認してください。



必ず守る



警告

取り扱いを誤った場合、死亡または、重傷にいたる可能性が想定される場合を示しています。



必ず守る

- 走行中は、足を必ずステップ板(フットサポート)の上に載せておいてください。
足を地面に付けたりステップ板(フットサポート)から外すと、ステップ板(フットサポート)と地面の間に足が巻き込まれてケガをする恐れがあり、危険です。
足でこいで車いすを操作される場合は例外ですが、十分にご注意ください。
- 介助する人は、車いすの機能と操作に慣れた状態で介助を行ってください。
- 部品等が破損したり損傷がある場合は、すぐに部品を交換してください。
- 次のような場所では走行を避けてください。
 - ・交通量の多い道路 崖の近く ・砂利道 ・凹凸のある道
 - ・ぬかるみ ・雪道 ・凍結路 ・防止柵のない側溝や路肩付近など
 - ・崖 ・川土手 ・海岸防波堤上 ・その他危険な場所
- 次のような場合は走行を避けてください。
 - ・夜間 ・雨天 ・濃霧 ・強風 ・その他危険が予想される場合夜間は側溝や障害物などが発見しにくくなり危険です。
雨天は路面が滑りやすくなり危険です。
- 次のような場所では厳重な注意が必要です。
介助者が付き添い、利用者の身体を支えるなど注意しながらご使用ください。
 - ・狭い道 ・踏み切り ・横断歩道 ・駅のホーム ・エレベーター
 - ・車いす対応の動く歩道 ・車いす対応の福祉車両
 - ・その他危険が予想される場所
- 介助用として使用する場合、安全ベルトを必ず装着してください。
段差などで不意に衝撃を受けると身体が投げ出されることがあり危険です。また、安全ベルトを外したまま移動するとベルトが車輪にからまるなど危険です。




注意

取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。



禁止

- シート(クロス)パイプがシート(クロス)受けに収まっている事を確認してご使用ください。
万が一、シート(クロス)受けから浮いた状態でご使用されますと、フレームが歪んだり、故障の原因となり事故につながる恐れがあります。

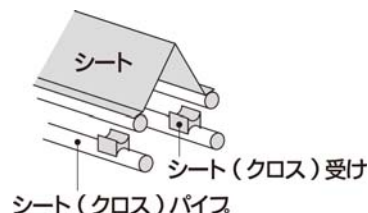


- 車いすを投げたり落としたり、衝撃を加えないでください。
- 跳ね上げ部、背折れ部、ブレーキなどの操作レバー荷物などを掛けないでください。

注意

取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。

●タイヤをもって車輪を操作しないでください。

駐車ブレーキで指をはさむなど、大変危険です。

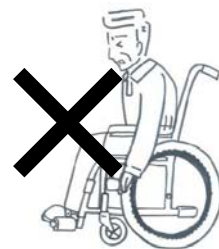


●走行するには片手で操作しないでください。

傘をさしながら、また片手に荷物を持ちながらの片手操作ではバランスを崩す原因にもなります。両手で操作し、バランスを保ちながらゆっくりと走行してください。



●駐車ブレーキのレバーは作動方向以外に力を加えないでください。




また、必要以上に力を加えないでください。ブレーキが変形・破損する恐れがあります。

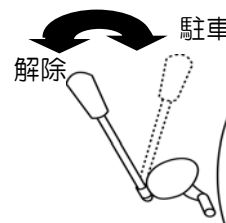

●下記のようなところに車いすや部品を放置しないでください。

- ・車道に近いところ ・人通りのあるところ
- ・路面に段差や凸凹のあるところ ・湿気の多いところ
- ・雨風の当たるところ ・海沿いの屋外(潮風の当たるところ)
- ・直射日光の当たる場所(車内も含む)
- ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所
- ・ほこりの多い場所 ・雨・風のあたる場所
- ・子供がいたずらをする恐れのある場所 ・非常口、消火器、消火栓の前
- ・坂道 ・暑い日や寒い日の戸外

事故やサビ・破損の原因になります。

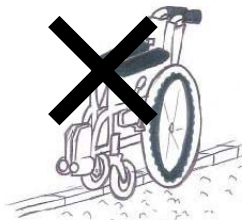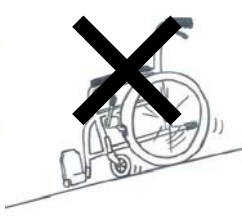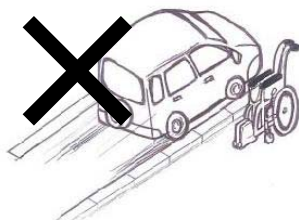

●小さな子供に使用させたり遊ばせたりしないでください。

●座面中央部に安定した姿勢で座ってください。

また、介助者は、ご利用者が安定した姿勢で座していることを確認してください。


禁止



注意

取り扱いを誤った場合、傷害にいたる可能性または、物的損害の発生が想定される場合を示しています。



必ず守る

- ご使用前には各部を点検してください。
車いすは“動くもの”ですから、長時間のご使用等により劣化が生じます。
ご使用前の点検を励行し、異常が見つかったら直ちにご使用を中止してください。
- 回転している車輪に指を挟み込まないように注意してください。
- 車いすにバリなどが無いかを確認してください。
衝突等により金属・樹脂部にバリなどが発生することがあります。ケガの原因となりますので、十分ご注意ください。
- 認知症(痴呆症)の方がご使用される場合は、必ず介助者が付き添ってください。
車いすのシート、部品等を飲み込むことや一度かけた駐車ブレーキを不意に解除されることがありますので、充分ご注意ください。
- 駐車ブレーキは必ず手で操作してください。
足などで操作するとブレーキが破損する恐れがあります。
- 介助者の方は、利用者が車いすに安全に座れていることを確認してから操作してください。
搭乗者の身体の一部または衣服がタイヤ、スポーク、キャスト及び地面、建物、通行者に触れたりはさまったりしないようご注意ください。
- 車いすの乗り降りや移乗など車いすが不安定になりやすいときには、必ず2名以上の介助者が付き添ってください。
- 最大体重を守ってご使用ください。
車いすに表示されている「使用者最大体重」は、積載物も含んだ重さです。
- 皮膚の弱い方のご利用の際には、十分ご注意ください。



なお、この取扱説明書はイラストや写真が一部実車と異なる場合があります。



SG マーク制度について

※弊社では、認定を受けた全ての商品にSGマークを貼付しています。

SGマーク制度は、SGマーク付製品の欠陥により発生した人身事故に対する賠償制度です。
事故原因や被害の程度に応じて、製品安全協会が賠償措置を実施いたします。

(ただし、消費者側の一方的な過失、もしくは誤使用に基づくような場合は除きます。)

[製品の特徴・使用目的]

この製品は、手動式車いすです。

これに搭乗しての移動と、休息を目的としています。

この車いすは一人乗り用です。

1.同梱部品の確認

本製品には、以下の部品が同梱されていますので確認してください。

・取扱説明書	一式
・保証書はがき	1 枚
・背クッション	1 個
・座クッション	1 個
・オリジナルポーチ	1 個
・工具（13mm スパナ）	1 個



2.安全ラベル

- ・取扱上の重要な事項を記載した安全ラベルが貼ってあります。
- ・安全ラベルをすべて読んでからご使用ください。
- ・ラベルを汚したり、はがしたりしないでください。

左側板（内側）

⚠ 警告

転倒してケガをするおそれがあります

- 取扱説明書はよく読み、必ず携帯してください。
- 乗り降りの際には、必ずステップ板を跳ね上げて、駐車ブレーキが確実にかかっていることを確認してください。
- 地面に置いてある物を拾う等、強い前傾姿勢を取らないでください。
- 段差などを越える場合、前輪を浮かせ過ぎないでください。
- 最大積載重量以上の重量で使用しないでください。
- アームサポートが可動式の場合は固定されていることを確認してください。
- フットサポートが可動式の場合は固定されていることを確認してください。
- 駆動輪やキャスタが外れないことを確認してください。
- 座面以外に腰掛けしないでください。




⚠ 注意

ケガをするおそれがあります

- 可動部分を持って持ち上げないでください。
- 認知症（痴呆症）の方が使用される場合は、必ず介助者が付き添い、安全を確認し、ご利用ください。
- 座面が確実に固定されていることを確認してください。
- 手や衣服をはさまないようにご注意ください。

3.各部名称

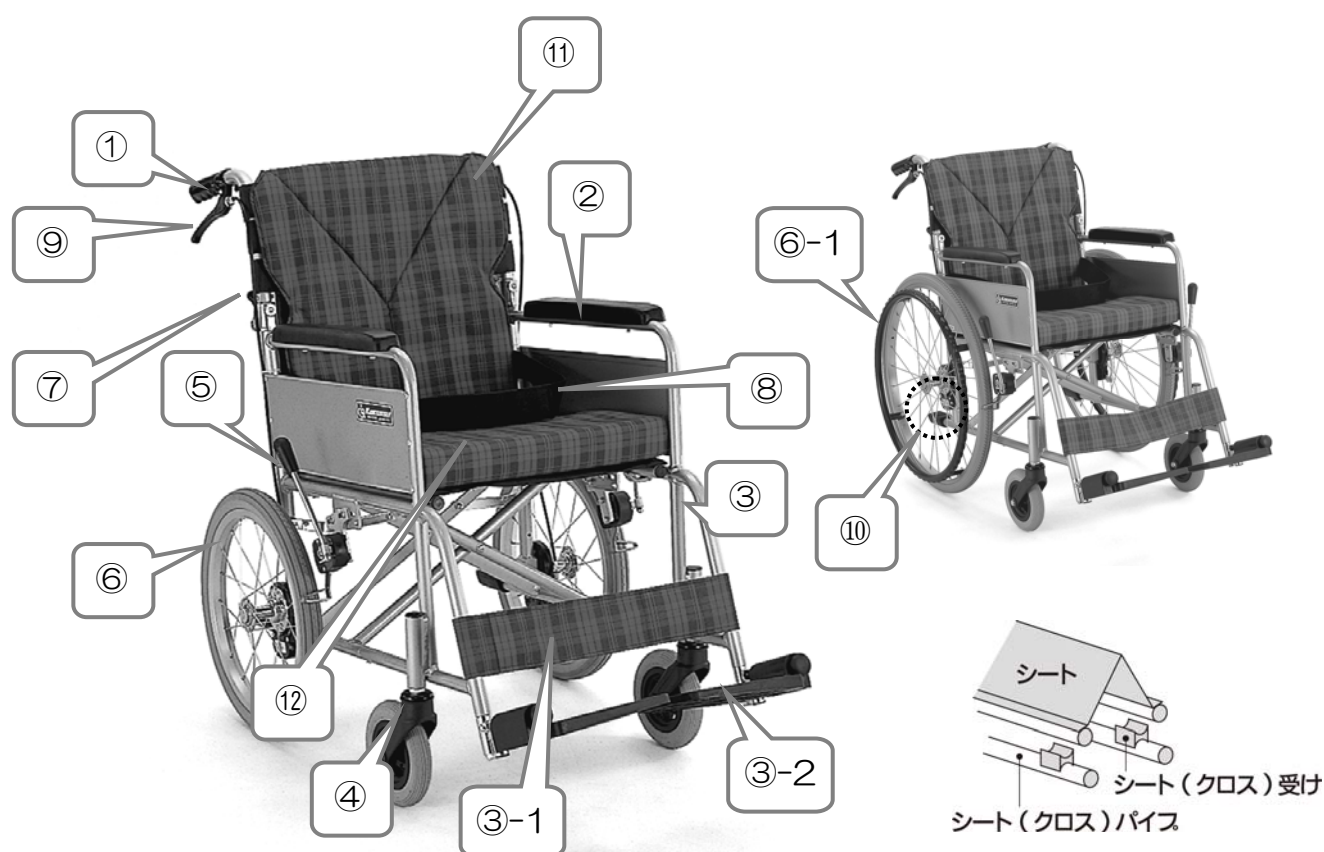

① 押手(手押しハンドルグリップ)	介助者が車いすを移動させる際に握る部分です。
② 肘掛け(アームサポート)	移乗しやすくなるよう跳ね上げできます。
③ 脚部(フットレグサポート)	足を支持する装置です。
③-1 足ベルト(レッグサポート)	足が後ろに落ちないように支えます。
③-2 ステップ板(フットサポート)	足をのせる板です。
④ 前輪(キャスタ)	自在に方向転換できる小車輪です。
⑤ 駐車ブレーキ	車いすを駐車する時に使用します。
⑥ 後車輪	駆動輪です。(介助用の場合は主車輪です。)
⑥-1 ハンドリム	手をかけて後車輪を回します(自走用のみ)。
⑦ 背折れ金具	車いすを折りたたむ際、さらにコンパクトになります。
⑧ 安全ベルト	体がずり落ちないように腰を安定させるベルトです。
⑨ 介助ブレーキレバー	介助者がブレーキをかけるときに握ってください。
⑩ ティッピングレバー	段差を乗り越える際、ここを踏んで前輪を浮かせてください。
⑪ 背シート	背部が寄りかかる場所です。
⑪-1 背ベースシート	背の張り調整をし、背クッションを取り付けるシートです。
⑪-2 背クッション	背ベースシートに取り付けるクッションです。着脱可能で、ポケット付です。
⑫ 座シート	座る場所です。
⑫-1 座ベースシート	座の張り調整をし、座クッションを取り付ける場所です。
⑫-2 座クッション	前ずれを抑制できるアンカークッションです。着脱可能です。

4.お使いになる前に

お使いになる前に

車いすを使用する前に、安全のため各部の点検を行ってください。

<装着品の確認>

- ・ 背ベースシート、座ベースシートは、しっかりと固定されていますか？
- ・ 背クッション、座クッションは、しっかりと取付けられていますか？
- ・ 背折れ金具は、しっかりと固定されていますか？
- ・ クロス（座シートパイプ）は、しっかりと受けに収まっていますか？
- ・ 脚部（フットレッグサポート）は、しっかりと取付けられていますか？
- ・ 足ベルト（レッグサポート）は、しっかりと取付けられていますか？
- ・ ステップ板（フットサポート）は、しっかりと取付けられていますか？

<後車輪の確認>

- ・ タイヤにキズがありませんか？異物が刺さっていませんか？
- ・ タイヤの溝が十分残っていますか？変形していませんか？

<ブレーキの確認>

- ・ 駐車ブレーキ及び介助ブレーキが正しく作動しますか？
- ・ ブレーキをかけた状態で後車輪が回転しませんか？

<肘掛け（アームサポート）>

- ・ キズや亀裂等はありませんか？

<脚部（フットレッグサポート）>

- ・ ステップ板（フットサポート）がパタパタしていませんか？
- ・ キズや亀裂等はありませんか？

<全体的に>

- ・ ガタつきはありませんか？
- ・ まっすぐに走りますか？
- ・ 各部ボルトやナットが緩んでいませんか？
- ・ 背折れ金具がしっかりと固定されていますか？
- ・ 背クッション、座クッションがしっかりと取り付けられていますか？
- ・ ワイヤーが部品等に引っかかかっていませんか？


＜介助者へ＞

- 長期間の使用や使用頻度によっては、キャスタ車輪、フットサポート、アームサポート等の劣化がすすむことがあります。使用前点検を励行してください。
異常がある場合は、使用を中止してください。
- 次のような場所では必ず介助者が付き添い、利用者の身体を支えるなど転倒防止に努めてください。
 - 急な坂道
 - 凹凸や段差のある場所
 - 踏み切りの横断、エレベーターの乗り降りなどの溝のある場所
 - その他危険が考えられる場所
- 車いすに載って介助しないでください。
- 利用者の身体の一部（手や足）及び衣服が、タイヤに触れたり挟まったりしないよう注意してください。
- 利用者の身体の一部（手や足）及び衣服が、建物、通行者及び地面に触れたり挟まったりしないように注意してください。
- 車いすに重い荷物を載せたり、押手に提げたりしないでください。


5.操作方法および使用方法

車いすの拡げ方

①左右に拡げます。

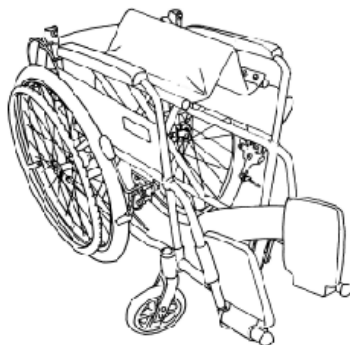

駐車ブレーキをかけます。車いすの前方または後方に立ち、左右の肘掛けを持って両側に軽く拡げます。

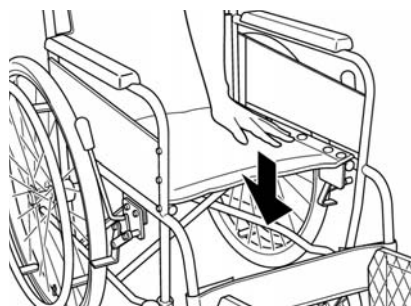


片方のフレームを持ち上げて車輪を少し地面から浮かせ、シートパイプ部分を上から手で押し下げます。

⚠ 注意


●シート(クロス)パイプの横や下に手や指を置かないでください。

挟まってケガをする恐れがあります。

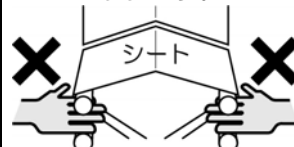


●背ベースシートが張りすぎていることを確認し、シート(クロス)パイプをシート受けに確実に入れてください。

フレームが変形して、事故の原因となります。

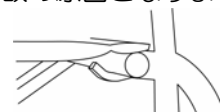


②背もたれを起こします。

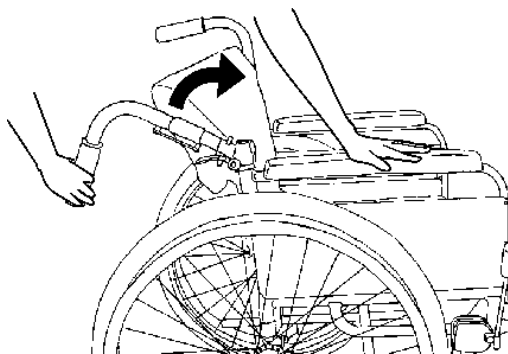

車いすの押手(手押しハンドルグリップ)部分を持ち、上方(矢印の方向)へ引き起こすように持ち上げてください。
※このとき、駐車ブレーキを使用するか、片側の手で車いすが動かないように支えていてください。




⚠ 注意

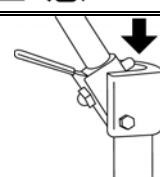

↓ 部分に手や指を置かないでください。挟まってケガをする恐れがあります。

③ステップ板(フットサポート)を取り付け、調整します。

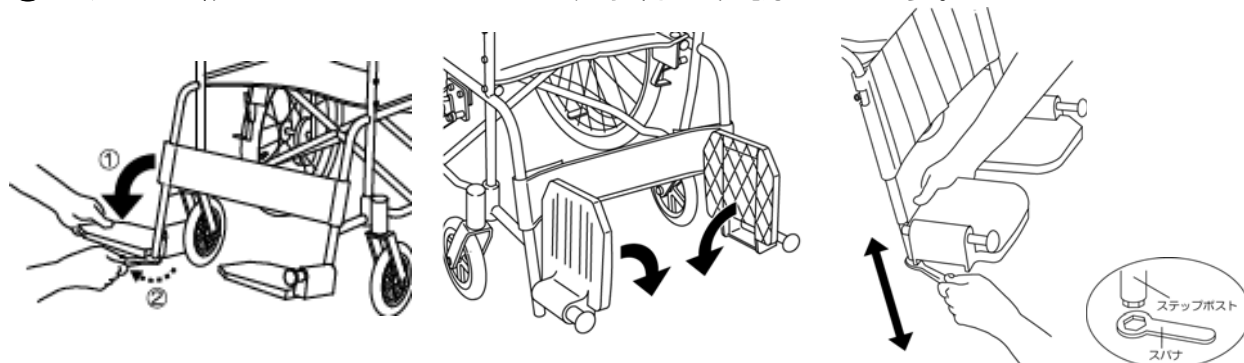

出荷時は、ステップ板(フットサポート)が外側に回転させて折りたたんでありますので、ステップポスト先端のボルトを少し緩め、内側へ回転させます。

ステップ板(フットサポート)を内側にたおします。

付属品のスパナを使って、ステップポストの先端のボルトを緩め、適当な高さに合わせた後、ボルトを完全に締めてください。

警告

●ステップポストの高さは地面より5センチ以上で ご使用ください。



低すぎると凸凹路面や障害物にステップ板(フットサポート)があたり、転倒する恐れがあります。



●ステップセット先端六角ボルト部分をスパナでしっかりと締め付けてください。

締めることにより斜ウスがズレてステップセットが固定されます。

締め付けが弱いとステップセットが外れる恐れがあります。しっかりと固定されている事を確認してご使用ください。

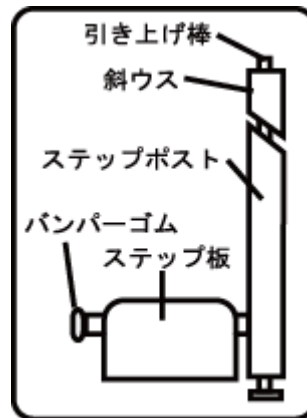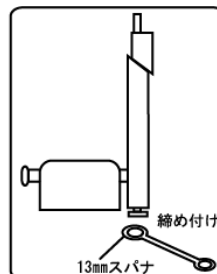

●下図①のようにステップセットを固定してください。




※車いすを折りたたむ時は上図②のようにステップ板を跳ね上げてください。


※上図③,⑤のようにステップセットを取り付けると車いすを折りたたむときに干渉し正しく折りたためないため(上図④,⑥)、フレームが歪み車いすに悪影響を及ぼす場合があります。また、前輪キャスタに干渉しキャスタが回転しにくくなる場合があります。

車いすのたたみ方

①ステップ板(フットサポート)を跳ね上げます。

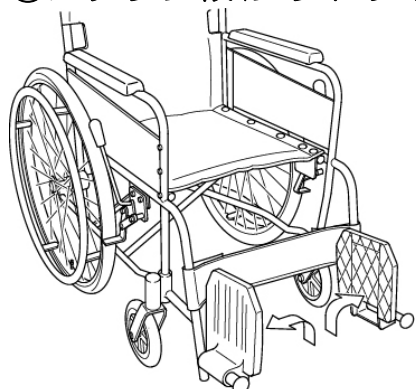

⚠ 警告

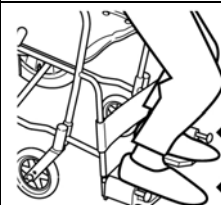


車いすから降りる際、絶対にステップ板(フットサポート)の上に乗らないで下さい。

車いすごと転倒し、大変危険です。


駐車ブレーキをかけ、ステップ板(フットサポート)を閉じるように上方へ（矢印の方向へ）跳ね上げます。

※ステップ板(フットサポート)を内側にたおした状態のままだと、折りたたみが出来ないで、ステップ板(フットサポート)が上方へ上がっていることを確認ください。

②背もたれを折りたたみます。

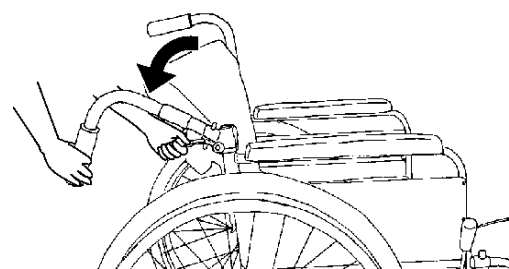

⚠ 注意

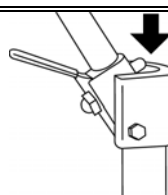


この部分に手や指を置かないでください。

挟まってケガをする恐れがあります。


押手(手押しハンドルグリップ)を握り、一方の手で背折れ金具のレバーを後方へ引きながら（もしくは前方へ倒しながら）押手(手押しハンドルグリップ)を倒します。また、反対側も同様に倒してください。

③シートを折りたたみます。

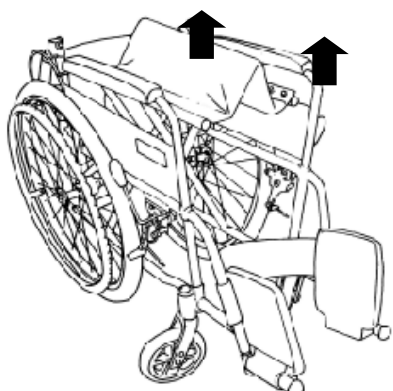


座シート前方と後方の中央部を同時に持ち上げます。

⚠ 注意

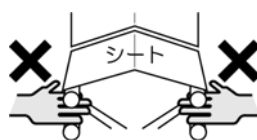

シート(クロス)パイプの横や下に手や指を置かないでください。


挟まってケガをする恐れがあります。

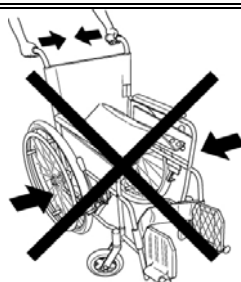

折りたたむ際に、押手を持って左右から押し縮めないで下さい。

フレームの破損の原因となります。

6.安全ベルトの取り扱い方法

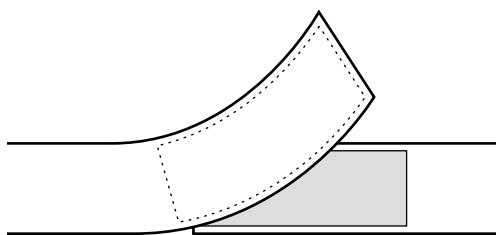

車いすに深く腰掛け、面ファスナーの接着部分を10cm以上重ね合わせてしっかりと留めてください。



注意

- シートから落ちるおそれがあるので必ず安全ベルトを使用してください。

段差などで不意に衝撃を受けると身体が投げ出される場合があります危険です。また、安全ベルトを外したまま移動するとベルトが車輪にからまるなど危険です。

- 面ファスナーに糸くず・汚れなどがついたときは取り除くか、安全ベルトを交換してください。

接着力が弱まり、事故の原因となります。

※面ファスナーの接着力が弱くなった場合、安全ベルトの交換が必要です。



★転倒防止に十分配慮してください。

乗車・降車・移乗の際には不安定になりやすいため、転倒しやすくなります。転倒しないよう、


- ・転倒防止金具(オプション) をご利用いただく
- ・車いすの後方を人が支える
- ・車いすの後方をベッドや壁に押し付ける

などの方法で十分配慮してください。

7.ブレーキの取り扱い方法

駐車ブレーキ

※車いす乗降時には、必ず駐車ブレーキをかけて、車いすが固定されていることを確認してください。

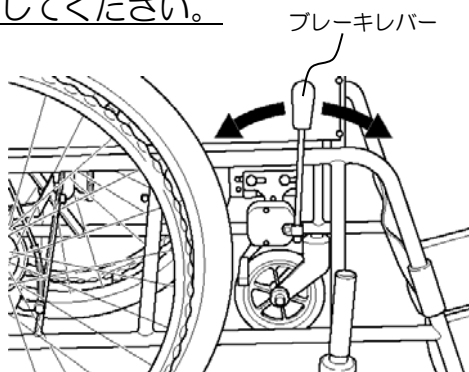

ブレーキレバーを前方または後方に引くとロックし、レバーを中央に戻すと解除されます。


⚠ 注意

- 車いすに乗り降りする際、一時停止する際は、必ず駐車ブレーキをかけて車いすが固定されていることを確認してください。
- 車いす乗降時には、必ず駐車ブレーキをかけ、車いすが固定されていることを確認してください。
- 傾斜地や平坦でないところでは駐車しないでください。
傾斜地や滑りやすい床面では駐車ブレーキをかけても車いすが動く場合があります、大変危険です。
- 駐車ブレーキのレバーは作動方向以外に力を加えないでください。
また、必要以上に力を加えないでください。ブレーキが変形・破損する恐れがあります。
- 駐車ブレーキは必ず手で操作してください。
足などで操作するとブレーキが破損する恐れがあります。



介助ブレーキ（バンド式）

走行中や下り坂での制動ブレーキとしてご使用ください。

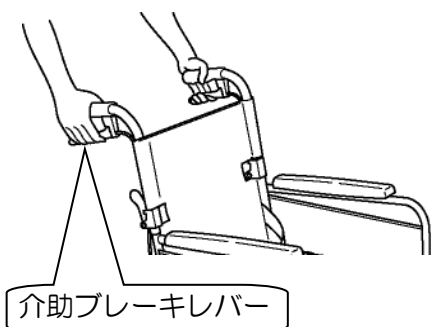

ブレーキレバーを握ると制動ブレーキがかかり、離すと解除します。


⚠ 注意

- ブレーキワイヤーは安全のために 1 年に 1 度、定期的に交換してください。
- ブレーキレバーは介助者の方が必ず両方同時に掛けてください。

8.シートの調整方法



これを利用することにより、背中・お尻にゆとりができ乗り心地が大変よくなります。

- ①背クッション、座クッションを取り外します。

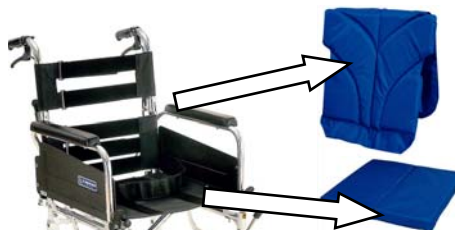

- ②調整ベルトの面ファスナーを外し、適当な長さに合わせます。
(部位によって張り具合を調整してください。)

背ベースシート

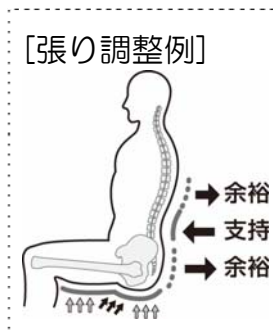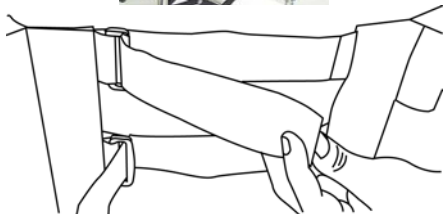


⚠ 注意

利用者が車いすに乗っている状態では、全ての面ファスナーを一度に外さないでください。

転倒する恐れがあり、大変危険です。

- ③背クッション、座クッションを取り付けます。

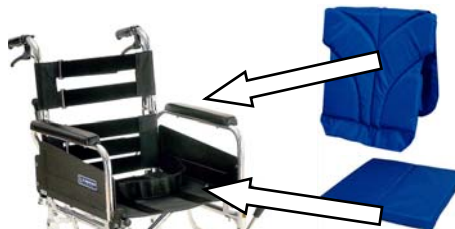

⚠ 注意

- ベースシートを調製する際、強く張りすぎないようにご注意ください。

※背ベースシートを強く張りすぎると背パイプが中央に寄ってしまい、背もたれ幅が狭くなってしまいます。また、フレームの変形の原因にもなります。



<正面図>

- 背クッションはポケットが付いている方が後ろ側です。

表裏・前後の向きにご注意ください。



- 面ファスナーに糸くず・汚れなどがついたときは取り除くか、安全ベルトを交換してください。

手入れをしないと接着力が弱まり、事故の原因となります。

※面ファスナーの接着力が弱くなった場合、安全ベルトの交換が必要です。

9.お手入れの方法

★金属部分（フレーム、車輪等）

フレームなどの金属部は、乾いた布でよく汚れを落として、自動車用のワックスをかけ、乾いた布で拭き取ってください。スポークの通常のお手入れは、水を用いずに汚れを落とす程度で十分です。凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびり着いた汚れは、市販の中性洗剤を用いてください。

★樹脂（プラスチック）部

樹脂（プラスチック）部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

★クッション、シート類

シート部分をぬるま湯で拭き、きれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。市販されている防水加工用のスプレーなどを用いての防水加工をお勧めします。防水加工を行う場合は、ご使用になる防水加工用商品の説明書をよくお読みください。

＜汚れがひどいとき＞

- 汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を染み込ませた布で汚れを拭き取り、その後、水で濡らした布で洗剤を拭き取ってください。
- しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いてください。
- 洗う場合は、ぬるま湯で手洗いしてください。洗濯機、乾燥機の使用はお避けください。
- クッション表面に面ファスナー（オス）が接触しないようにしてください。（クッション生地のはつれ、けばだちの原因となります。）

⚠ 注意


- 中性洗剤を使用してください。
変質・変色・傷みの原因となります。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものは使用しないでください。
変質・変色・傷みの原因となります。
- たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。
傷みの原因となります。

10.保管についてのお願い

車いすは、安全な場所に保管してください。

⚠ 注意

- 下記のようなところに車いすや部品を放置しないでください。
 - ・車道に近いところ
 - ・人通りのあるところ
 - ・路面に段差や凸凹のあるところ
 - ・湿気の多いところ
 - ・雨風の当たるところ
 - ・海沿いの屋外（潮風の当たるところ）
 - ・直射日光の当たる場所（車内も含む）
 - ・ストーブなど火気を使用し高温になる場所
 - ・ほこりの多い場所
 - ・雨・風のあたる場所
 - ・子供がいたずらをする恐れのある場所
 - ・非常口、消火器、消火栓の前
 - ・坂道
 - ・暑い日や寒い日の戸外事故やサビ・破損の原因になります。

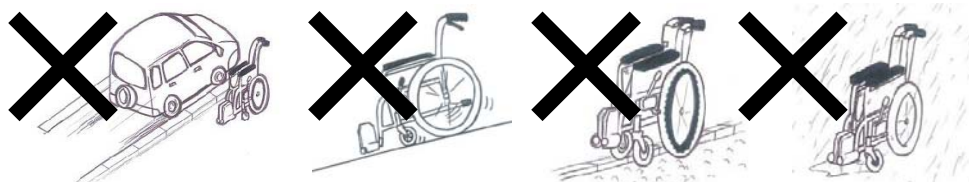

11.車いすの保守、点検

1 ヶ月に一度は安全点検を行ってください!!

★タイヤの溝は十分認識できますか？

タイヤの減りが激しいものはパンクの原因になったり走行性やブレーキの効きが悪くなるので交換が必要です。また、タイヤやキャストのひび割れにもご注意ください。

★駐車ブレーキはしっかり効きますか？




ブレーキの取付ネジの緩み、ブレーキ本体のガタなどがないかご確認ください。もし、異常がございましたら、直ちにご使用をお止め頂き、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★変な音がしませんか？

変な音がする場合、どこでその音が発生しているかをご確認してください。ブレーキワイヤーが車輪に擦れている、ベアリング部の油分が不足しているなどの原因が考えられます。お買い上げの販売店までご連絡ください。

★四点接地していますか？

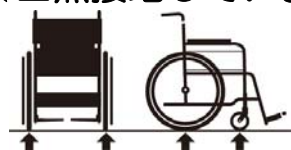

前輪二輪と後輪二輪が接地しているかご確認ください。

四点接地していない場合、フレームの歪みやネジの緩みが考えられます。直ちにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★まっすぐ進みますか？

平地で車いすを左右均等な力で押してください。自然に曲ってしまう場合、どこかが歪んでいる可能性があります。お買い上げの販売店までご連絡ください。



★シートに破損やたるみ、傷みはありませんか？

湿気の影響を受けたり長時間続けてご使用になるとシートに破損・たるみが発生します。座り心地を損なわない姿勢が保ちにくくなりますので、たるみ・破損が著しい場合は交換をおすすめします。

★ネジの緩みはありませんか？

ガタがある場合は、ネジの緩みや脱落が考えられます。直ちにご使用を中止し、すぐにお買い上げの販売店までご連絡ください。

★きちんと折りたためますか？




折りたたみに異常がある場合、ネジの緩みや可動部分の油切れが考えられます。お買い上げの販売店までご連絡ください。

異常が見つかったらご使用を中止してください。

★車輪やキャストはしっかり固定されていますか？

車輪を留めているボルト、キャストを留めているボルトは緩んでいませんか？緩んでいると使用中突然車輪やキャストが外れて転倒するなど大変危険です。お買い上げの販売店までご連絡ください。

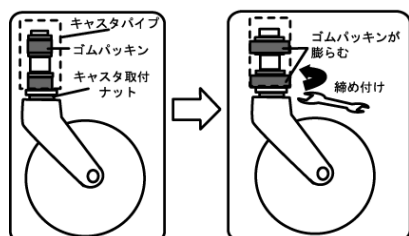

(出荷時には十分に締め付けてありますが、ご使用されている間に振動により緩む場合がありますので、定期的に点検してください。)

スパナでキャスト取付ナットを締めると、ゴムパッキンが膨らみ、キャストが固定されます。キャスト取付ナットをしっかりと締めてください。締め付けが弱いとキャストが外れる恐れがあります。

★ハンドリムはしっかり固定されていますか？

ハンドリムにガタがある場合、取り付けネジの緩みが考えられます。お買い上げの販売店までご連絡ください。

★介助ブレーキはしっかり効きますか？

介助ブレーキがスムーズに作動すること、しっかりと効くことをご確認ください。異常がある場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

★ブレーキワイヤーは切れていませんか？

ブレーキワイヤーは切れていませんか？ブレーキが効かなかったり、事故の原因になります。安全のため、1年に一度はワイヤーを交換してください。

★洗浄の際には、水、お湯または中性洗剤をご使用ください。

- ・ 中性洗剤以外の洗剤を使用しないでください。
- ・ シンナーやベンジン・アルコールなどの揮発性のものは使用しないでください。
- ・ たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しないでください。
- ・ オゾン消毒はしないでください。ゴム材料の収縮などの原因になります。
変質・変色・傷み・割れの原因となります。

★異常が見つかったらご使用を中止してください。

⚠ 注意


- スパナやドライバーなどの工具の使用にて締め付ける場合、薄手の手袋をご使用ください。
- 異常が見つかったら、直ちにご使用を中止してください。

12.車いすの主な乗り方

警告

- 下り坂は加速がつき危険です。いつでもブレーキがかけられるよう慎重に。
- いきなり公道に出るのは危険です。屋内や庭など安全な場所で練習しましょう。
- 車道はできるだけ通らず、歩道や十分な幅のある路側帯を通りましょう。

車いすは歩行者として取り扱われます。
歩行者としての交通ルールを守りましょう。

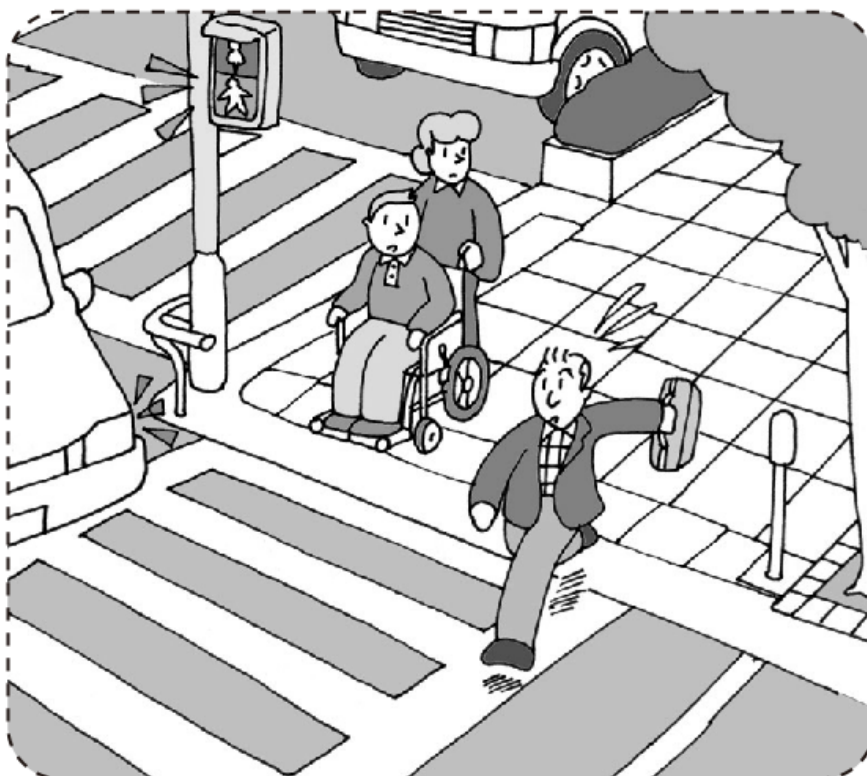

- 「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」のマークのある歩行者専用道路も通ることができます。
- 信号機のある場所では、「青」が点滅中に横断するのは危険です。「青」信号を待ちましょう。

★焦らずゆとりを持った横断、走行を心掛けましょう。

注意

- 車いすは、自動車と同様で乗り物ですから、定期点検が必要です。
長期の使用によって劣化が生じます。異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

★転倒防止に十分配慮してください。

(転倒防止金具(オプション)をご利用いただく、車いすの後方を支えるなどの方法があります。)

★移乗

車いすに乗る方を介助者がベッドなどから移す方法です。双方にとって安全で負担の少ないことが重要です。



介助者が片足を相手の膝の間に差し込んで、腰を支えながら立ち上がらせます。



介助者の膝で相手を支えながら、車いすの方へお尻を向けます。



ゆっくりと腰を下ろしてもらいます。

※「いち、にのさん」と声をかけながらおたがいに協力しましょう。

★外出

車いすの安全な使い方は、“ゆっくり”“確実に”と“安全ベルト着用”が基本です。

[坂道]



<上り坂>

押す人は身体を少し前に倒して、押し戻されないよう、一歩ずつしっかりと押します



<下り坂>

坂を下るときはブレーキを軽く使いながら、後ろ向きに一歩ずつ下ります。
また、安全ベルトを必ずご利用ください。

[段差のある場所]



<上がるとき>

ティッピングレバーを踏んで前輪を上げて進み、続いて後輪を押し上げます。

<下るとき>

後ろ向きでまず後輪をおろし、ティッピングレバーを踏んで前輪を上げたまま後進し、ゆっくりと下ろします。


※階段では車いす全体を持ち上げてください。

[溝越え] ※予め溝の大きさを確認し安全に渡れる場合のみ実施してください。




①「キャストア上げ」の要領でティッピングレバーを踏んで押手を押し下げ、キャストアを上げます。

※この時、必ず声をかけてから行ないます。

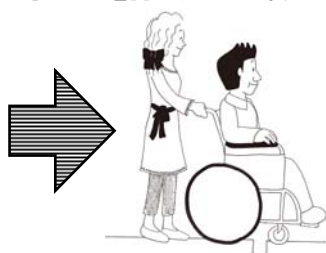

②キャストアを上げたままに進み、溝を越えた向こう側にキャストアをゆっくり下ろします。

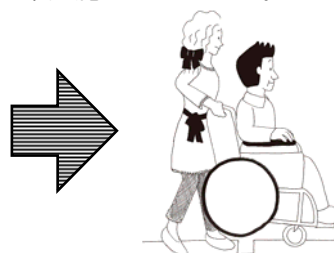

③次に後輪を持ち上げて前に進み、溝を完全に越えたところでゆっくりと後輪を下ろします。

13.仕 様

＜各部寸法＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・記載の寸法や状態は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。

寸法表		
品名・名称	FA22	FA16
座 幅 (mm)	380・400・420	
前座高さ (mm)	440	
脚部長さ (mm)	330 ～	
後座高さ (mm)	410	
シート奥行き (mm)	400	
背もたれ高さ (mm)	440	
肘掛け高さ (mm)	230	
全高 (mm)	860	
折りたたみ (mm)	650	
全幅 (mm)	620・640・660	580・600・620
折りたたみ (mm)	340	280
全長 (mm)	1,010	1000
折りたたみ (mm)	930	860
重量 (kg)	13.9	12.3

＜各部仕様＞・・

標準仕様・規格		
	FA22	FA16
フレーム	標準式フレーム 平面式クロス	
折りたたみ方式	背折れ式左右折りたたみ式	
後輪	22 インチ ハイポリマー ハンド式 ハンドリム：樹脂（波型・黒）	16 インチ ハイポリマーハンド式
タイヤ	22×1 ³ / ₈ ハイポリマータイヤ	16×1.50 ハイポリマータイヤ
ハンドリム	22in 波型・黒	-
キャスタ	6 インチ ソフト パッキン式樹脂ヨーク	
キャスタ車輪	6 インチ ソフトキャスタ車輪	
ヨーク	6 インチ パッキン式樹脂ヨーク	
背シート	左右独立適合調整シート（ブラウンチェック or 紺チェック）	
座シート	調整なしシート（黒色）	
座クッション	30-50mm アンカークッション（ブラウンチェック or 紺チェック）	
シートベルト	面ファスナー式 黒色	
肘掛け	固定式	
肘当て	一体成形軟式樹脂	
脚部	固定式	
ステップセット	J.前後式φ16 用 黒	
ステップ板	j 黒色	
足ベルト	標準型（ブラウンチェック or 紺チェック）	
駐車ブレーキ	A.ミニ駐車ブレーキ	
ニギリ	I型 黒色	
ハンドグリップ	1.反射板付 黒色	
SG マーク	あり [手動車いす（使用者最大体重 100kg）]	


●この車いすの後車輪のハブ軸は1/2-20UNF のねじを使用しております。また、シート・バックサポート、主フレームのベースパイプ・ティッピングレバー部、介助ブレーキのバンドカバー部（介助ブレーキ装着車）、背折れ金具部には十字穴付きタッピングねじを使用しております。
この車いすは JIS T 9201:2006 に定める静的安定性試験において、10.1.2 a) の方法を用いて合格しております。

14.製造記録

アフターサービスなどを的確に受けるため、車種・製造年月を記録しておいてください。

車 種	
製 造 年 月	年 月

<シール貼付位置>

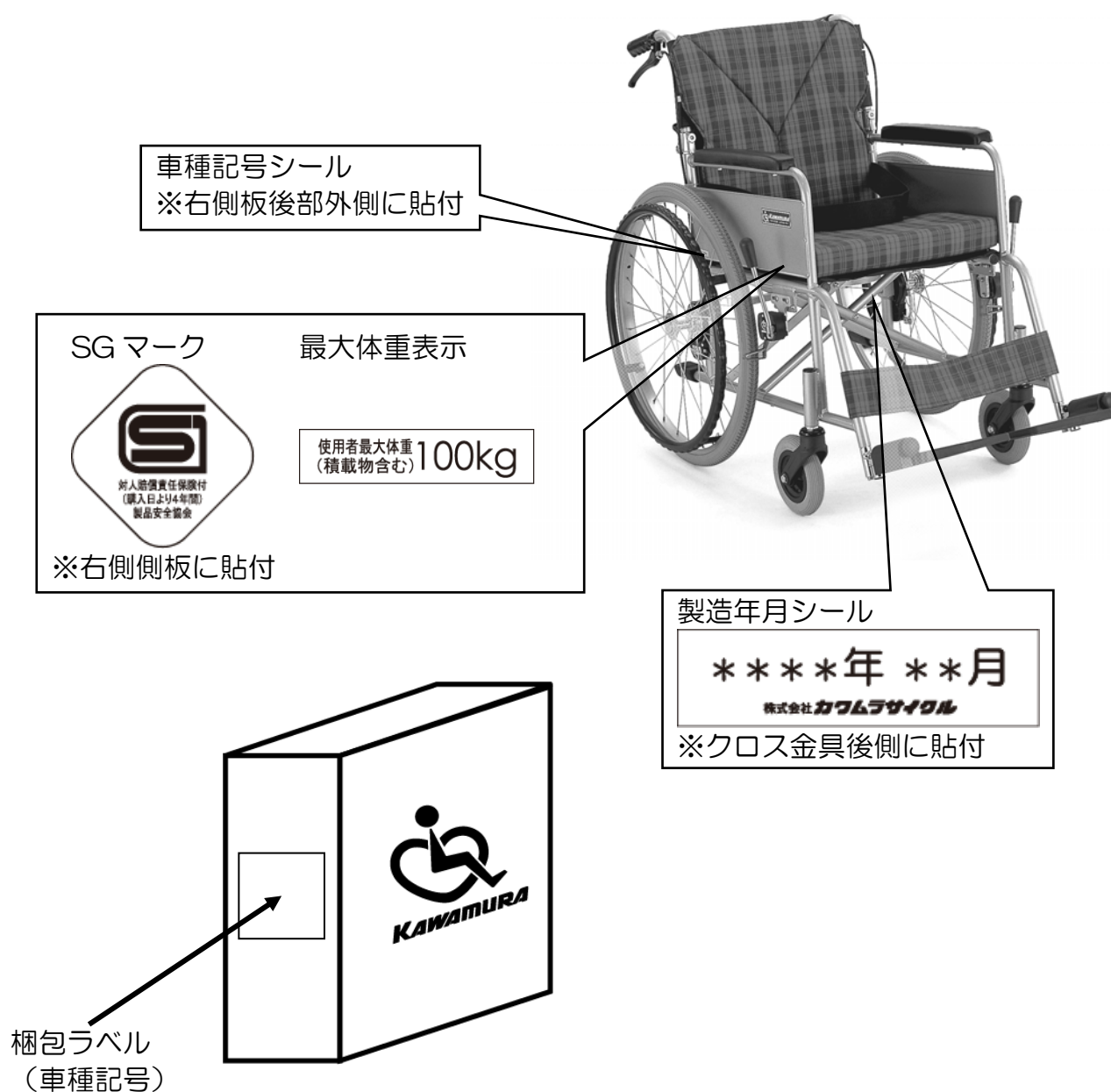

15.保証

弊社の定める保証とは、保証期間内に正常な仕様状態において故障が生じた場合に限り無償で修理を行うことをお約束するものです。

★保証書

この商品には保証書を別途添付しております。

返送用登録はがきに所定の事項を記入のうえ、商品購入後 1 ヶ月以内に弊社へご返送いただきご登録ください。

※ご登録がない場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

★保証期間

お買い上げ日より 1 年間（消耗部品は含みません。）

★保証期間後

保証期間後はお買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

★消耗部品

- | | | | |
|-----------|----------|-----------|---------------|
| ・前輪(車輪のみ) | ・背ベースシート | ・肘当てパッド | ・バンド式介助ブレーキ本体 |
| ・ベアリング | ・背クッション | ・ふくらはぎパッド | ・ドラム式介助ブレーキ本体 |
| ・タイヤ | ・座ベースシート | ・板バネ | ・ワイヤー |
| ・チューブ | ・座クッション | ・ガスダンパー | ・後輪(車輪のみ) |
| ・虫ゴム | ・足ベルト | ・メカニカルロック | ・ステップセット |

★保証の適用除外となる場合

- (a) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
例) タイヤの磨耗およびパンク、ワイヤー、シート、ステップ板の破損等
- (b) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
- (c) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
- (d) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
- (e) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
- (f) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
- (g) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
- (h) 取扱説明書に従わずに使用して生じた故障および破損
- (i) 取扱説明書に禁じられてる使用方法によって生じた故障
- (j) ご購入後 1 ヶ月以内に返送用登録はがきをご返送いただいていない場合
- (k) 日本国外でご使用の場合。

★補修用性能部品の最低保有期間

弊社はこの商品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5 年保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

★修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

★本製品を他人に譲る場合

この製品を他の方にお譲りになる時は、必ず本書もあわせてお渡してください。

★一度使用したものは、原則として製品のお取り替えはできません。

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。



株式会社 **カワムラサイクル**



■本社	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2800
■本店サービスセンター	〒651-2411	兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1	TEL078-969-2820
■東京サービスセンター	〒110-0013	東京都台東区入谷 1-8-3	TEL03-3874-3511
■名古屋サービスセンター	〒487-0027	愛知県春日井市松本町 1-3-11	TEL0568-52-4800
■福岡サービスセンター	〒819-0055	福岡市西区生の松原 1-18-3	TEL092-882-4722
■神戸工場 ■神戸第二工場 ■いなみの工場 ■メンテナンスセンター			

本書に記載の意匠、仕様、および部品は性能向上のために一部予告なく変更することがあります。

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い求めの販売店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、上記へ。