




KY20664(00/00)

カワムラサイクル**取扱説明書 / 保証書**

標準車いす KR801N ソフト

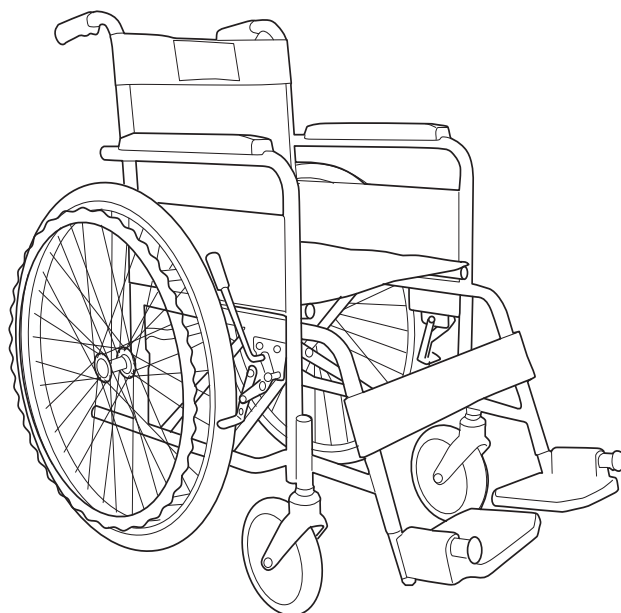

このたびはカワムラサイクルの車いすをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書には、製品を安全に使用していただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されています。必ずお読みください。また、本書は必ず携帯していただき必要ときにいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。保証書は本書裏表紙に記載されていますので、お買い上げいただいた取扱店より記入をお受けください。

目次

重要なお知らせ.....1

- 製品の使用目的.....1
- 公共交通機関（タクシー含む）をご利用になる場合.....1
- 製品を譲渡・貸与する場合.....1
- 修理のご依頼.....1
- 介助者へ.....2
- 車いす使用者は、歩行者あつかい.....2

お使いになる前に.....3

- 各部の名称と働き.....3
- 同梱部品の確認.....4
- 安全に関するご注意.....4
- 警告表示について.....4
- 使用前点検.....7

ご使用方法.....8

- ブレーキを使う.....8
- 車いすをひらく.....9
- 車いすをたたむ.....10
- 車いすに乗る / 車いすから降りる.....11
- 車いすを動かす.....13
- 坂道を走行する.....15
- 段差を乗り越える.....16

階段を下りる・上がる.....17

保管方法.....18

各部の調整方法.....19

フットプレートの高さを調整する.....19

お手入れの仕方.....20

定期点検.....20

清掃する.....21

故障かな？と思ったら.....22

仕様.....23

廃棄する場合.....24

連絡先.....24

保証規定.....27

保証書.....27

重要なお知らせ

製品の使用目的

本製品は、手動式車いすです。これに搭乗しての移動と、休息を目的としています。

この車いすは一人乗り用です。

この車いすは、自身でハンドリムを駆動して操作する車いすです。この車いすは、特別な身体保持具、バックサポート（背）の角度調整、座位の姿勢変換（昇降、旋回）等の機構がない標準形の自走用車いすです。また、スポーツ用、入浴用等の特殊な使用目的のものではありません。なお、購入時はこの標準形が適していても、特別な身体保持具などが必要になってきた場合など、標準形がご使用に適さなくなることがあります。

■車いすの適合性

車いすが使用者の身体に合わない状態、または使用目的に沿った姿勢を保てない状態でのご使用はおやめください。

使用者に合った適切なシーティングについてはかかりつけの医師、セラピストや取扱店などにご相談ください。

この車いすは車載を前提に設計されておりません。

公共交通機関（タクシー含む）をご利用になる場合

お客様の車いすをご旅行先へ持っていかれる場合は、事前に利用する公共交通機関または旅行代理店にご相談ください。

※ 事前確認なしに出発された場合、ご希望の便に間に合わなかったり、ご搭乗・ご乗車できない可能性がございます。



製品を譲渡・貸与する場合

この製品を他の方に譲渡または貸与される際は、必ず本書もあわせてお渡しください。

修理のご依頼

異常がある場合は、ご使用を中止し、お買い上げの取扱店に修理をご依頼ください。

重要なお知らせ（つづき）

介助者へ

- 使用者の身体の一部および衣服（長いマフラー、ひざ掛け、大きめの服や長いネックレス等）がタイヤ、スポーク、キャストおよび地面、建物、通行者に触れたり、挟まったりしないようご注意ください。
- 付添いの際は、車輪に絡まるような長いマフラー、大きめの服や長いネックレスなどを着用しないでください。
- 使用者を車いすに乗せる前は、十分な車いす操作の練習を行ってください。
- 本書に沿った安全教育を周知してください。
- 日本語を母国語としない人がご利用の場合、母国語による安全教育を行ってください。
- 走行中はフットプレートに足がのっているかを確認ください。
移動中、足が障害物に当たらないように、確認しながら走行してください。


車いす使用者は、歩行者あつかい

道路交通法では、車いす使用者は歩行者として取り扱われます。車いす使用時は、歩行者としての交通ルールを守りましょう。

「自転車及び歩行者専用」、「歩行者専用」の道路標識がある歩行者専用道路も通ることができます。

信号機のある場所では、「青」が点滅中に横断するのは危険です。次の「青」信号を待ちましょう。

あせらず、ゆとりを持った横断、走行を心がけましょう。

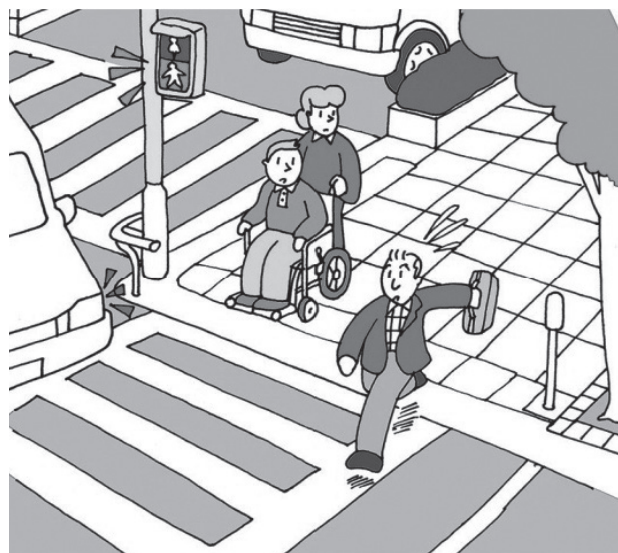

SG マーク制度について

SG マーク制度は、SG マーク付製品の欠陥により発生した人身事故に対する賠償制度です。消費者側の一方的な過失、もしくは誤使用に基づくような場合を除き、事故原因や被害の程度に応じて、製品安全協会が賠償措置を実施いたします。

また、SG マーク取り付けは改造・特注仕様を行っていない標準仕様で認定を受けております。標準仕様以外で弊社から出荷する場合は、SG マークを除いた状態での出荷になります。




JIS マーク制度について

JIS マーク制度は、国に登録された認証機関が、製造工場の品質管理体制と該当の JIS に適合することを試験で確認した製品に対し JIS マークを表示できる制度です。厳しい規格のもと第三者機関である認証機関で検査や試験が繰り返され安全性を確認しています。

お使いになる前に

各部の名称と働き

※ 1 車種記号シール
右側サイドガード後部外側に貼付

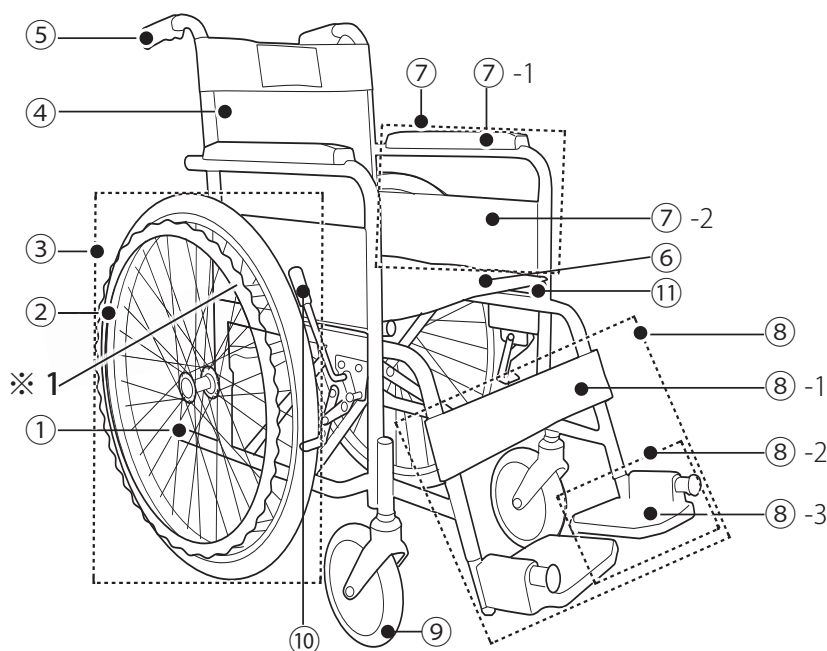

① ティッピングレバー

介助者がキャスタ上げをするときに踏むためのレバーです。

② ハンドリム

使用者が車いすを駆動するときに使います。

③ 車輪

駆動輪です。

④ バックサポート

使用者の身体を支える部品です。

⑤ 押手（手押しハンドルグリップ）

介助者が車いすを操作するときに握ります。

⑥ シート

使用者が座る部品です。

⑦ アームサポート

使用者の肘を支えます。

⑦ -1 肘当て

使用者の肘をのせる部品です。

⑦ -2 サイドガード

衣類等が車輪に巻き込まれるのを防ぎます。

⑧ フット・レッグサポート

使用者の足を支えます。

⑧ -1 足ベルト（レッグサポート）

使用者の足が後ろに落ちないように支えます。

⑧ -2 フットサポート

フットプレートを支えます。

⑧ -3 フットプレート

使用者の足をのせる部品です。

⑨ キャスタ

自在に方向転換できる小車輪です。

⑩ 駐車用ブレーキ

使用者または介助者が車いすを駐停車するためのブレーキです。

⑪ シートパイプ

シートを取り付けたパイプです。

同梱部品の確認

本製品には、以下の部品が同梱されていますのでご確認ください。

- 取扱説明書 1 ケ
- 13mmスパナ 1 ケ

安全に関するご注意

この製品では、次の2つの方法により、使用者の製品使用上の注意事項をお伝えしています。

- 本書への「警告文」の記載
- 製品上への「警告ラベル」の貼り付け

製品をご使用になる前に、本書に記載されているすべての警告文を必ずお読みください。

また、製品に貼られたすべての警告ラベルの場所と内容をご確認ください。

万が一、警告文や警告ラベルの意味が十分理解できないときは、当社のサービスセンターまでご相談ください。警告文や警告ラベルの意味を十分理解するまで絶対に製品を使用しないでください。

警告表示について

■表示の説明

本書の警告文および警告ラベルでは、製品使用中に想定される危険な状態を以下のシンボルマークで表示しています。

警告文や警告ラベルの内容を無視すると、その警告内容に使われたシンボルマークに応じた事故につながるおそれがあります。

シンボルマーク	警告の意味
危険	取扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高い危害の程度。
警告	取扱いを誤った場合、死亡、または重傷を負うことが想定される危害の程度。
注意	取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるまたは物的損害の発生が想定される危害の程度。

■図記号の意味（JIS Z9104 より）

シンボルマーク	警告の意味
 禁 止	してはいけないことを示しています。
 強 制	必ずしなければならないことを示しています。

■本書内の表記について

本書では 使用者：車いすに乗車する人
 介助者：車いすを介助で操作する人 と表現しています。

危険

	●エスカレーターでは使用しない。 ●介助者のサポートがない状態で階段では使用しない。（階段で介助者が付き添う場合は、階段を下りる・上がるの頁参照） ※転倒・転落などにより重大な事故につながるおそれがあります。
	●勝手に改造・分解しない。 ※本来の装着品を外してのご使用も改造の対象となります。
	●本書に記載されている調整箇所以外の調整を行わない。 ※フレームが破損したりシートが破れたりするなど、車いすの強度や耐久性が低下して重大な事故につながるおそれがあります。
	●荷物の運搬や車体のバランスが崩れる医療行為などは行わない。 ●車いすに座ったまま強い前傾姿勢をとらない。
	●シート以外の部分に腰掛けない。 ●背ポケットには1 kg 以上の重いものを入れない。 ●車いすに荷物を掛けたり、ぶら下がったりしない。 ※転倒・転落し、大変危険です。
	●車いすを火気に近付けない。 ※シート部が燃えたり、プラスチック等が変形したり、熱くなった金属部分でやけどするなど、危険です。
	●前方が見えないほど身長の高い方や子供は、車いすを押さない。
	●小さな子供に使用させたり遊ばせたりしない。 ※車いすが不意に動き出し、重大な事故につながるおそれがあります。
	●商品梱包資材は幼児の手の届くところに保管しない。 ※重大な事故につながるおそれがあります。
	●MRI 室で使用しない。 ※本製品は非磁性体ではありません。重大な事故につながるおそれがあります。

禁止



危険

	●車いすに乗り降りする際や停止する際は、まわりの安全を確認し、必ず駐車用ブレーキをかけて車いすを固定する。 ※車いすが不意に動き出し、重大な事故につながるおそれがあります。
	●移乗介助は転倒に注意し、使用者の身体状況に合わせて安全に行う。
	●介助者は使用者の腕がアームサポートから外側に落ちていないか、よく注意しながら操作する。 ※ケガをするおそれがあります。






警告

	●介助者は、車いすに乗って介助しない。 ●複数人で乗らない。 ●車いす以外の目的に使用しない。 ●自分で操作できない方や認知症の方の場合、使用者のみで使用しない。 ※事故につながるおそれがあります。
	●杖や傘もしくは大きな荷物など、車いすのシート幅からはみ出るような荷物を持たない。 ※走行中、不意にぶつかったり、相手にケガを負わせるおそれがあります。
	●車いすの機能と操作をよく理解し、慣れた状態で介助・操作を行う。 ※事故のおそれがあります。
	●ご使用前には各部を点検する。また、部品等の破損や損傷がある場合は、使用を中止し、すぐに取扱店に相談する。 ※車いすの強度や機能が低下し、事故につながるおそれがあります。



注意

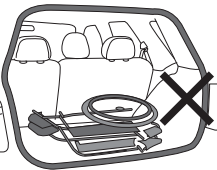 禁 止	●回転している車輪に指をはさみ込まない。 ※指が車輪のスポークにはさまれるおそれがあります。
	●車いすの操作は、力の無い人やハイヒールなどの不安定な履物を履いて行わない。 ※予期せぬ事故のおそれがあります。
	●車いすをぶつける、なげる、落とすなど、衝撃を加えない。 ●車などに載せる場合や保管時は、車いすを倒した状態にしない。 ※フレームが歪むなど、破損や故障の原因になります。 
	●著しく高温または低温の環境下では使用しない。 ※部品の変形や作動不良などの不具合が生じるおそれがあります。





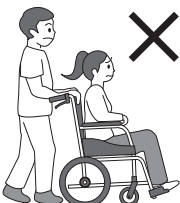
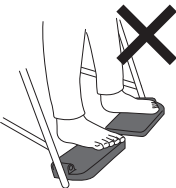
 強 制	●各部の操作・調整をする場合は、安定した場所で行う。また駐車用ブレーキをかけて車いすを固定しておく。 ※不安定な場所で行うと車いすも巻き込んで転倒し、ケガをするおそれがあります。
	●車いすを押す場合は必ず押手を使う。 ※バランスを崩して転倒・転落するおそれがあります。 
	●テーブルに近づく際、介助者は使用者の手足がはさまらないことを確認してから操作する。 ※手足にケガをするおそれがあります。 
	●安定した姿勢で座る。 ※転倒・転落のおそれがあります。
	●靴を履いて使用する。 ※使用者が壁や柱で足をケガしたり、足がフットサポートから落ちて骨折するおそれがあります。 ※介助者も車輪に足をひかれるなどケガをするおそれがあります。 
	●最大体重を守る。(仕様の項参照) ※フレームが歪むなど、破損や故障の原因になります。



お使いになる前に（つづき）

使用前点検

車いすを使用する前に各部の安全確認を行ってください。

使用者自身で点検することが難しい場合は介助者や取扱店にご相談ください。

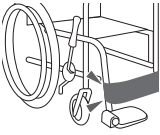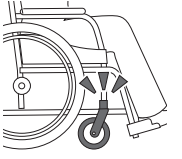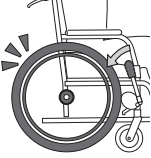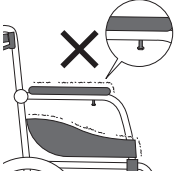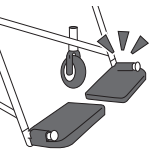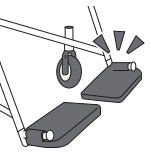点検項目	点検内容
装着品の確認	レッグサポートは装着されていますか 
キャスタ	キャスタはしっかり固定されていますか 
駐車用ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか 
アームサポート	肘当てにガタやネジの緩みはありませんか 
フットプレート	フットプレートはしっかり固定されていますか 
フットサポート	フットサポートはしっかり固定されていますか 

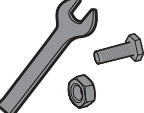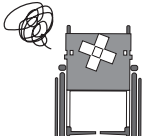点検項目	点検内容
フレーム	スムーズに走りますか 
	各部ボルトやナットが緩んでいませんか 
	部品などに破損はありませんか 
	車いすにバリ（割れや鋭利な突起）などはありませんか 



ご使用方法


ブレーキを使う

■ 駐車用ブレーキ

使用者または介助者が車いすを駐停車するためのブレーキです。


注意

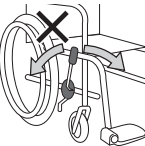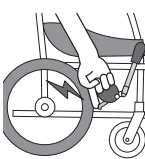 禁 止	● 駐車用ブレーキは作動方向以外に力を加えない。また、必要以上に力を加えない。 ※ ブレーキが変形・破損するおそれがあります。	
	● 駐車用ブレーキ操作時は指などはさみこまない。 ※ 指がタイヤとブレーキ板の間にはさまれケガをするおそれがあります。	

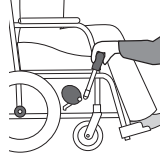 強 制	● 駐車用ブレーキは必ず手で操作する。 ※ 足などで操作するとブレーキが破損するおそれがあります。	
--	--	---

1. ブレーキにぎりを後方に引いて、車体を固定します。


2. (解除するとき) ブレーキにぎりを前方に戻します。

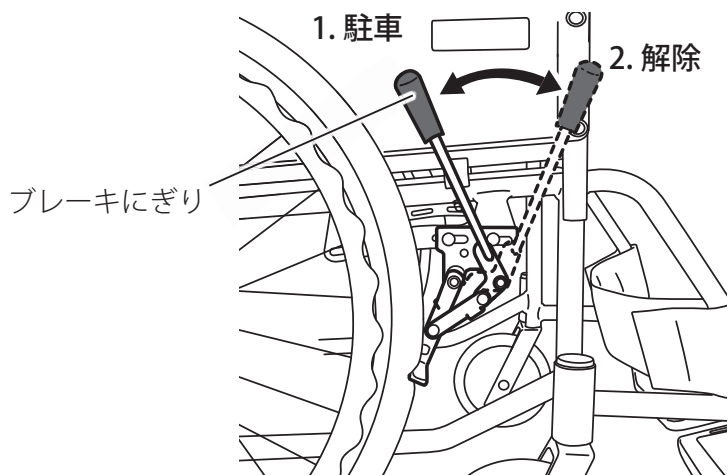

車いすをひらく

注意


 禁 止	●シートパイプの横や下に 手や指を置かない。 ※ケガをするおそれがあります。 
---	---

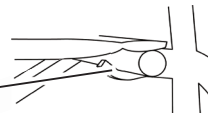 強 制	●シートパイプが受けに収まっていること を確認する。 ※フレームが変形する おそれがあります。  シートパイプ受け
--	--


1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロック
します。

※ 8 ページをご参照ください。

2. 左右のアームサポートを
持って両側に軽く拡げます。

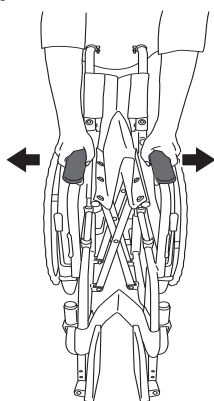


3. シートパイプ部分を押し
下げます。

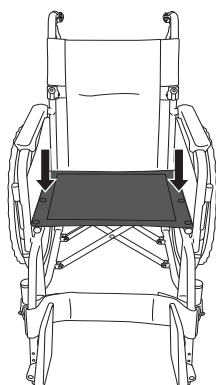

5. フットプレートを下ろします。

※出荷時は、フットプレートが外側にある状態
で折りたたんでいます。

6. 付属のスパナを使ってフットサポート先端の
ボルトを少し緩めます。

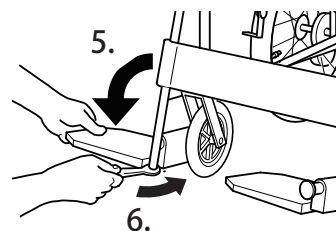


7. 内側へ回転させます。

8. フットプレートの高さを調整します。

※ 19 ページをご参照ください。

9. しっかりと締め付けます。

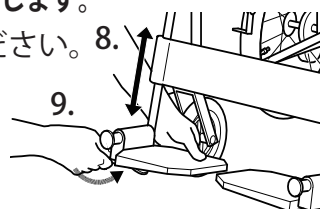


ご使用方法（つづき）

車いすをたたむ


1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

※ 8 ページをご参照ください。

2. 片側ずつ、フットプレートを跳ね上げます。

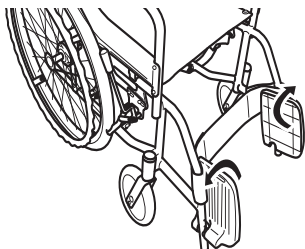

3. シート中央部の前後を同時に引き上げ、折りたたみます。

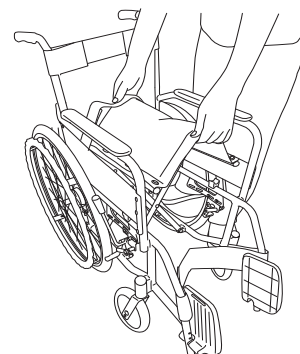

車いすに乗る / 車いすから降りる

危険

 禁 止	●移乗時はフットプレートの上に座らない。 ※車いすごと転倒し、重大な事故につながるおそれがあります。 
 強 制	●移乗時は、介助者が安定した体勢で行う。 ※介助者や車いすも巻き込んで転倒し、重大な事故につながるおそれがあります。 ●車体に荷重をかける場合は、左右均等の力を加える。 ※転倒し、ケガをするおそれがあります。

警告

 禁 止	●傾斜地で移乗しない。 ※転倒・転落のおそれがあります。
 強 制	●移乗の際、ブレーキにぎりやフットサポートなどに引っかからない様、周りに注意する。 ※転倒し、ケガをするおそれがあります。 

注意

 強 制	●介助者は移乗介助時に、使用者が車いすにぶつからないよう注意する。 ※転倒し、ケガをするおそれがあります。 
--	--

■車いすに乗る〈下記方法は一例です。安全に留意して、ご使用ください。〉

危険

 禁 止	●勢いをつけて、座らない。 ※後方転倒のおそれがあり、大変危険です。 
--	---

警告


 強 制	●身体が安定しない方は、シートベルトを着用する。（オプション） ※身体が投げ出されることがあり、危険です。
--	--

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。


※ 8 ページをご参照ください。

2. フットプレートを跳ね上げます。

3. アームサポート前方を両手で持ちながら、ゆっくり座り込みます。

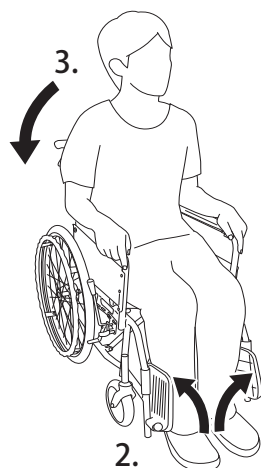

4. フットプレートを下ろし、フットプレートに足をのせます。

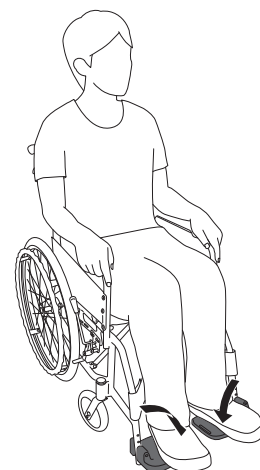

ご使用方法（つづき）

■車いすから降りる〈下記方法は一例です。安全に留意して、ご使用ください。〉

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。
※ 8 ページをご参照ください。
2. フットプレートから足を下ろし、フットプレートを跳ね上げます。

3. アームサポート前方を両手で持ちながら、ゆっくり立ち上がります。




アドバイス



立ち上がり時は足を手前に引き込み、膝の角度を 90 度以下にすると立ち上がりやすくなります。

車いすを動かす


危険

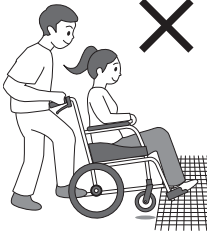	●踏切の溝やグレーチング(溝蓋)など、くぼみのある路面はできるだけ走行しない。 ※キャストがはまり込み、交通事故などの重大な事故につながるおそれがあります。また、やむを得ず横断する際は介助者に付き添っていただき、はまり込みが無いよう、安全に横断してください。 
	●走行中は、車いすから身体を乗り出したり、前のめりにならないよう、注意する。 ※転倒・転落のおそれがあります。 
	●車道を走行しない。 ●不整地や危険が予測される場所は走行しない。 ●凍結した道路や雪、雨の中、夜間、濃霧、強風その他危険が予想される場合は走行しない。 ※交通事故に巻き込まれたり、車輪が思うように動かせないなど、重大な事故につながるおそれがあります。
	●傘や荷物を持って、片手で走行しない。 ※視界不良やバランスを崩すことによって重大な事故につながるおそれがあります。
	●スピードを出さない。 ※急カーブ、急ブレーキは転倒・転落等の重大な事故につながるおそれがあります。
	●駅のホームでの走行は注意する。 ※ホームから転落したり、乗降時に電車とホームの間に落ち込んだり、人と接触したりしてケガのおそれがあります。
	●足こぎ走行する場合はセラピストに相談し、使用する。 ※キャストやフレームが足にあたり、ケガや転倒するおそれがあります。

警告

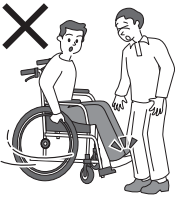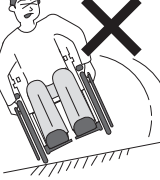	●急発進、急停車、急な方向転換をしない。 ※転倒・転落など使用者の危険だけでなく、衝突など周りの方にもケガをさせるおそれがあります。 
	●石や段差など車輪を片上がりさせた状態で走行しない。 ※転倒して、ケガをするおそれがあります。 
	●使用者の足をフットプレートにのせ、足ベルトを利用する。 ※足が落ち込み、キャストに巻き込まれてケガをするおそれがあります。
	●発進するときや段差を乗り越えるときには、キャストが段差に対して真っ直ぐになっていることを確認してから走行する。 ※キャストが破損して事故につながるおそれがあります。 
	●濡れた路面など滑りやすい場所の走行は注意する。
	●片流れ路面でのUターンや走行は、特に速度を落とす。 ※転倒・転落するなどケガをするおそれがあります。 


注意

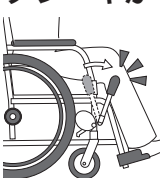	●タイヤをもって車輪を操作しない。 ※駐車用ブレーキで指をはさむなどのおそれがあります。 
	●車いすを動かす場合は駐車用ブレーキが解除されていることを確認する。 ※車いすの各部に異常な力がかかり、破損のおそれがあります。 

ご使用方法 (つづき)

■自走するとき

1. フットプレートに足をのせます。
2. 左右の駐車用ブレーキを解除します。
※ 8 ページをご参照ください。
3. ハンドリムを持って駆動します。

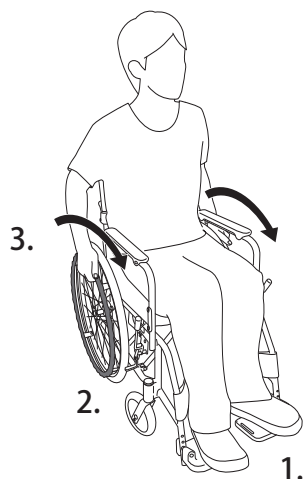


アドバイス

ハンドリムのこぎ始め位置は肘関節角度 120 度が目安です。右図のように円を描くようにこぐと最もこぎやすくなります。


傾いている路面を走行する場合は谷側のハンドリムをやや強めにこぐことで直進できます。

※ 身体と車いすの仕様により条件は異なります。

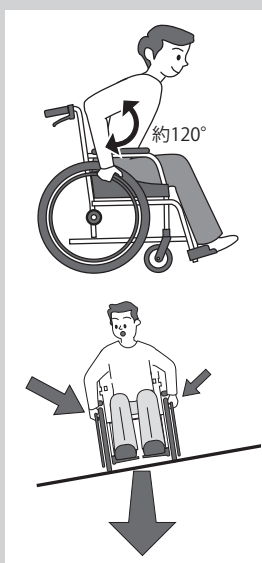

■介助するとき

1. 介助者は使用者の足がフットプレートにのっていることを確認します。
2. 左右の駐車用ブレーキを解除します。
※ 8 ページをご参照ください。
3. 押手を持って進行方向へ車いすを押します。

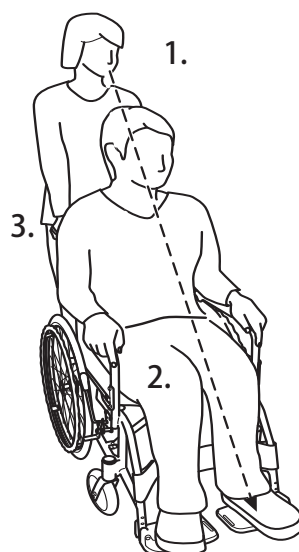

アドバイス

傾いている路面を走行する場合は谷側の押手をやや強めに押すことで直進できます。

坂道を走行する

危険


 禁 止	●急な坂道（勾配 5 度以上）では使用しない。 ※転倒するおそれがあります。 
 強 制	●坂道や傾斜地での走行は特に注意する。 ※車いすが予想外の方向へ進む、スピードが出やすいなど大変危険です。できるだけ介助者に支えてもらうようにしてください。

警告

 禁 止	●坂道や傾斜地では駐車しない。 ※滑りやすい路面では駐車用ブレーキをかけても車いすが動く場合があり、危険です。
 強 制	●坂道を下るときは後ろ向きで走行する。 ※転倒・転落のおそれがあります。できるだけ介助者に支えてもらうようにしてください。 


■上り坂

介助者は身体を少し前に倒して、押し戻されないよう、一歩ずつしっかりと押します。

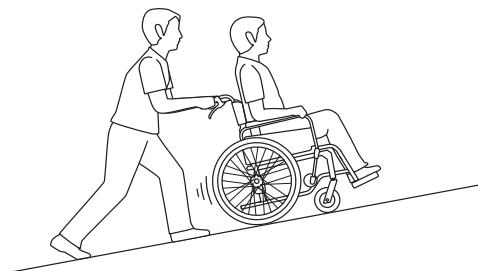

■下り坂


後ろ向きに一歩ずつ下ります。

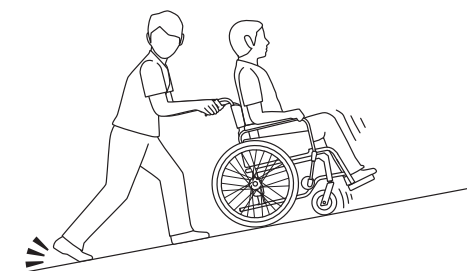


ご使用方法 (つづき)

段差を乗り越える


警告

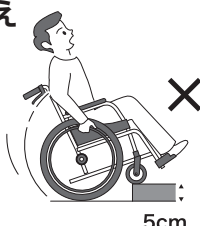 禁 止	● 5cm 以上の段差を乗り越えない。 ※後方転倒のおそれがあり、大変危険です。  5cm
---	--

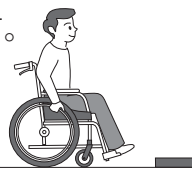
 強 制	● 段差の前では一旦停止する。 ※フレームおよびキャストが破損するおそれがあります。 
--	---

■自走で乗り越える

1. 段差の前で一旦停止します。
2. 段差に対してキャストを直角にあてます。

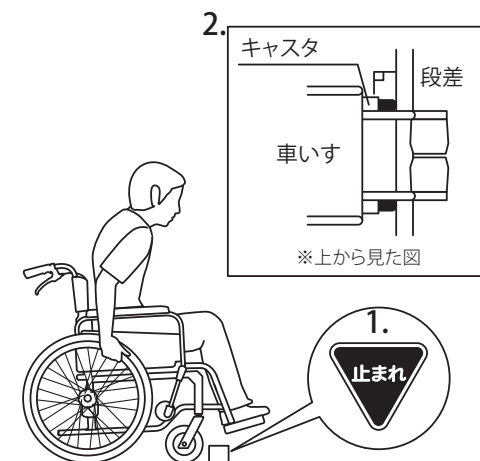


3. 深く座っている状態で身体を前傾させ、ハンドリムを強くこいで、前進します。

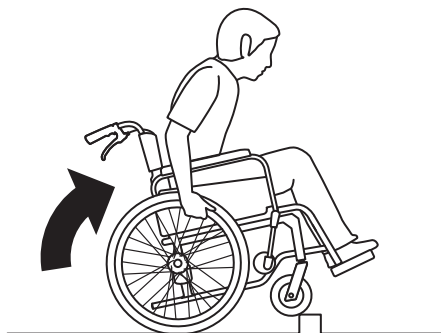


■介助者がいる場合の乗り越え

1. 段差の前で一旦停止します。
2. ティッピングレバーを踏みながら、押手を後方へ引き、キャストを上げます。

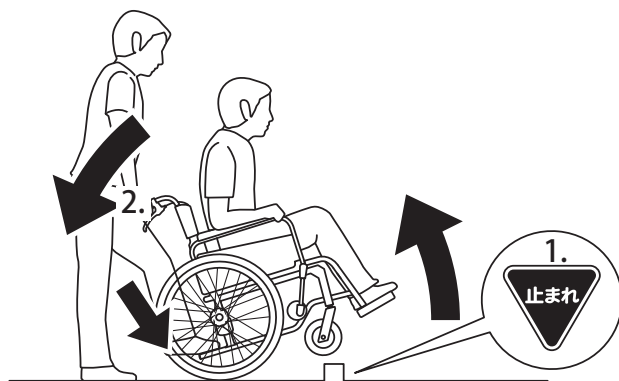

3. キャスタを上げた状態で前進し、段差を乗り越えます。

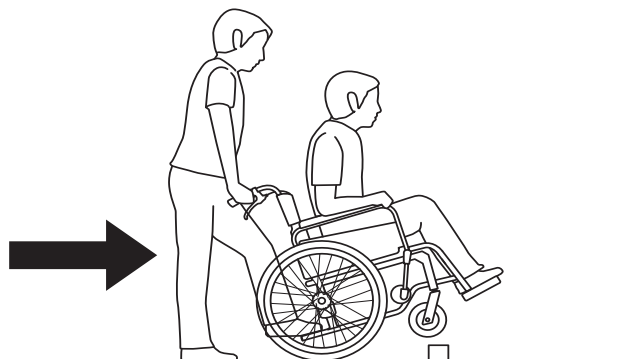

階段を下りる・上がる

危険



強 制

●車いすを持ち上げる場合、駐車用ブレーキをかけ、固定されているフレームをしっかり支える。

※転倒・転落のおそれがあり大変危険です。



強 制

●車いすを持ち上げる場合、使用者を支えたまま、必ず4人以上でフレームを持ち上げる。

※無理に持ち上げると介助者も巻き込んで転倒するおそれがあります。




■階段を上がる

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

※8ページをご参照ください。

2. 固定されているフレームを持ち上げます。

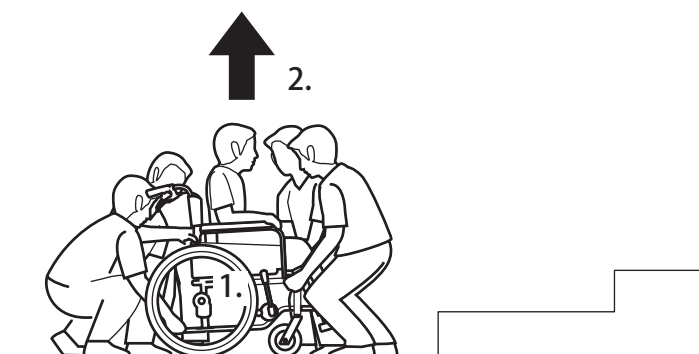

3. 階段にフットプレートが当たらないように注意しながら上ります。




■階段を下りる


1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

※8ページをご参照ください。

2. 固定されているフレームを持ち上げます。

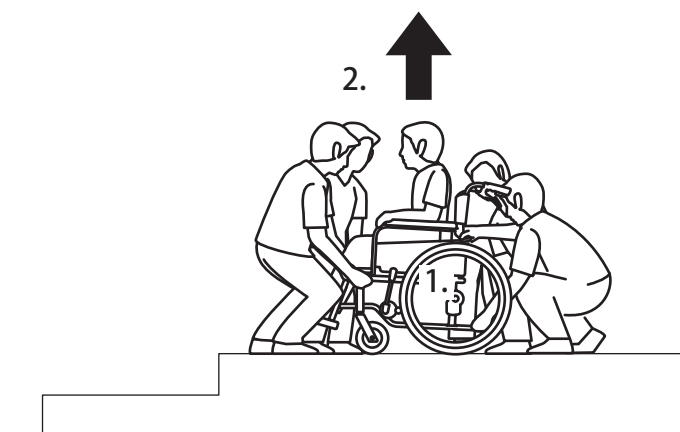

3. 車いすを水平に保った状態で下ります。

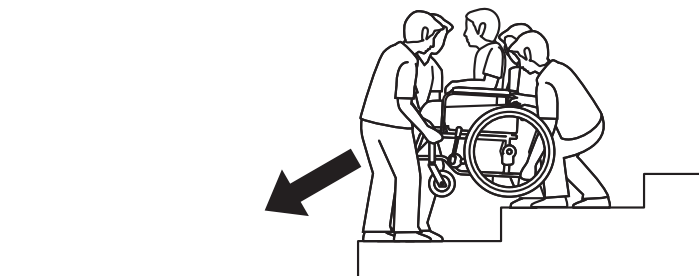

保管方法

警告



禁 止

●下記のようなところに車いすや部品を放置しない。

- ・車道に近いところ
- ・人通りの多いところ
- ・湿気の多いところ
- ・路面に段差や凸凹のあるところ
- ・海沿いの屋外（潮風の当たるところ）
- ・雨、風の当たるところ
- ・ほこりの多いところ
- ・坂道
- ・非常口、消火器、消火栓の前
- ・暑い日や寒い日の戸外
- ・直射日光の当たるところ（車内も含む）
- ・子供がいたずらをするおそれのあるところ
- ・ストーブなど火気を使用し高温になるところ

※事故やサビ・破損の原因になります。

車いすは、お手入れ後、安全な場所に保管してください。また、保管の際は必ず車いすを立てた状態にしてください。倒した状態で保管すると車軸やフレームが破損するおそれがあります。

■長期保管について

長期間保管すると、未使用でも部品などが劣化しているおそれがあります。使用前点検（7ページ）を実施して、必要があれば部品を交換してからご使用ください。

長期間駐車用ブレーキをかけたまま放置した場合、ブレーキによるタイヤの凹みが発生するおそれがあります。一度変形したタイヤは、回復困難であるため、保管時は駐車用ブレーキをかけずタイヤ止めなどをご使用ください。

各部の調整方法

フットサポートの高さを調整する

フットサポートを適切な高さに調整することで、使用者の座位が安定したり、体圧分散効果があります。



アドバイス

ケガ防止のため、作業するときは薄手の手袋を着用してください。

注意



禁 止

●フットプレートと地面との隙間が 5cm 以下になるような調整はしない。

※フットプレートが障害物にぶつかり、破損するおそれがあります。



強 制

●フットサポートの高さ調整後は、フットサポートがしっかりとフレームに固定されていることを確認する。


※固定が不十分な場合、不意にフットサポートが動き、転倒のおそれがあります。

1. 駐車用ブレーキをかけ、左右の車輪をロックします。

※ 8 ページをご参照ください。


2. 片側の手でフットサポートを支えながら、もう一方の手で付属の工具を使って、フットサポート先端のボルトをゆっくりゆるめます。
(半～1 周ほど回すとフットサポートが動きます。ゆるめすぎると固定しにくくなります。)

3. 適切な高さにあわせ、ボルトを締めます。

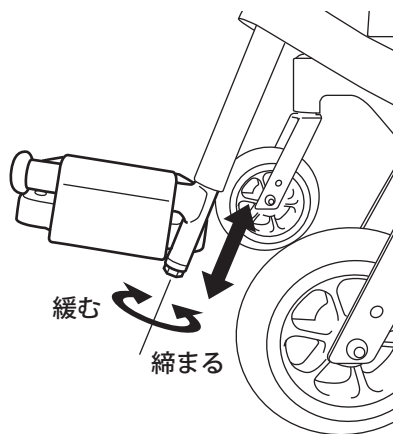


アドバイス

太ももが床面と水平になる高さを目安に調整してください。

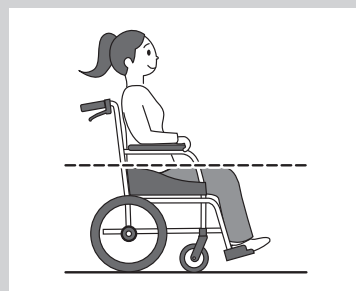

アドバイス

フットサポートが固くて動かない場合は、下図のように車いすを倒し、プラスチックハンマー等でボルト頭を叩いてください。

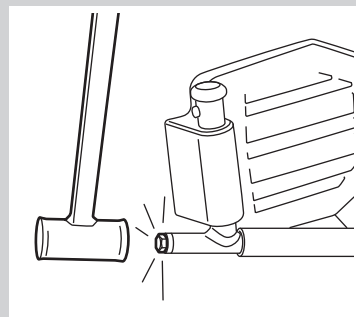

お手入れの仕方

定期点検

安全に使用して頂くためにご自身または取扱店で定期的に点検をして頂きますようお願いいたします。長期間使用されなかった場合もリスト内の点検をしてください。点検後、必要に応じて部品交換または各部調整をしてからご使用ください。また点検後に異常が見つかった場合は、ご使用をやめて必ず取扱店にご連絡ください。

警告



禁 止

●ブレーキ部品には絶対に注油しない。
※ブレーキ力が低下し、重大な事故につながるおそれがあります。

点検項目	点検内容	点検者	年月日	点検者	年月日
装着品の確認	レッグサポートは装着されていますか				
車輪	取付部の緩み、損傷、摩耗はありませんか				
	キズ、ひび割れはありませんか				
	異物が刺さっていませんか				
	スムーズに回転しますか				
	車輪を回転させたとき、タイヤに振れはありませんか				
キャスト	しっかり固定されていますか				
	キャスト輪はしっかり固定されていますか				
	キズ、ひび割れはありませんか				
	異物が刺さっていませんか				
	スムーズに回転しますか				
駐車用 ブレーキ	車輪はしっかりと止まりますか				
	取付部が緩んでいませんか				
	利きに左右差はありませんか				
アーム サポート	肘当てにガタはありませんか				
	肘当てのネジは緩んでいませんか				
	肘当てにキズや亀裂はありませんか				
フット・ レッグ サポート	フットプレートはしっかり固定されていますか				
	フットプレートが自重で落下しませんか				
	フットプレートにキズや割れはありませんか				
シート	著しいたるみはありませんか				
	ネジは緩んでいませんか				
	やぶれ・ほつれはありませんか				
全体	各部にガタつきはありませんか				
	ボルト・ナットが緩んでいませんか				
	異音はありませんか				
	両車輪と両キャストは全て地面に接地していますか				
	まっすぐ走行しますか				
	折りたたみはスムーズに行えますか				
	警告ラベルの表示は読み取れますか				

お手入れの仕方（つづき）

清掃する

安全に使用して頂くためにご自身または取扱店で定期的に清掃してください。

注意

 禁 止	●中性洗剤以外を使用しない。 ※変質・変色・傷みの原因となります。 ●たわし、みがき粉および硬いブラシは使用しない。 ※傷みの原因となります。	 禁 止	●熱湯やオゾンで洗淨しない。 ※故障・変質・変色・変形の原因となります。
---	---	--	---

■金属部品（主フレーム）

主フレームなどの金属部やスポークは、乾いた布でよく汚れを落として拭き取ってください。凹凸のある部分の汚れ、頑固にこびり付いた汚れには、市販の中性洗剤をご使用ください。汚れを除去した後はきれいな水で仕上げ拭きを行い、乾かしてください。

■樹脂（プラスチック）部品

樹脂部品には、市販の中性洗剤をご使用ください。

■クッション、シート類

ぬるま湯で湿らせた布巾でシートの汚れを拭き取り、きれいな水で仕上げ拭きを行った後、しっかりと乾かしてください。

面ファスナーに糸くず、汚れなどが付いたときは取り除いてください。取り除かないと、接着力が弱まり、衝撃を受けた際に転落事故の原因となります。

＜汚れがひどいとき＞

- ・汚れがとれにくい場合は、中性洗剤を用いてください。その後、乾燥させてください。
- ・しみは、スポンジまたは柔らかいブラシを用いて取り除いてください。
- ・洗濯機、乾燥機の使用は避けてください。

■タイヤやゴム製部品

水を含ませ強く絞った布で拭いてください。

お手入れの仕方(つづき)

故障かな？と思ったら

車いすを使用されていて“おかしいな”と思ったら下表をご確認ください。


表以外の異常が発生した場合はそれ以上使用せず、取扱店にご相談ください。

車いすを使用する前に各部の安全確認を行ってください。

症状	確認事項	対応
車輪およびキャスタがスムーズに回転しない	車輪の回転中心に髪の毛などが絡まっていませんか？あるいはシートベルトやワイヤが車輪に干渉していませんか？	絡まっている場合や干渉している部品がある場合は除去してください。
車輪あたりから異音がする	車輪の回転中心に髪の毛などが絡まっていませんか？あるいはシートベルトやワイヤが車輪に干渉していませんか？	絡まっている場合や干渉している部品がある場合は除去してください。


〈部品交換の目安〉

シート

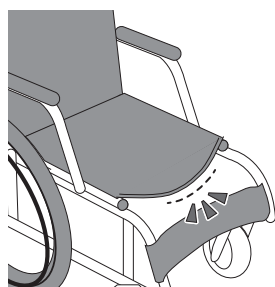


著しいたるみ

キャスタ

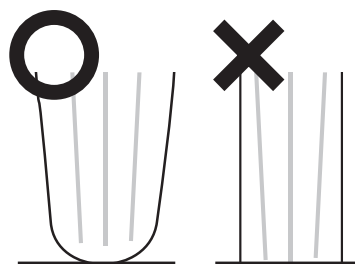

接地面が広い

車輪

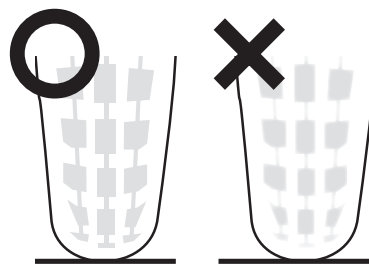

トレッドパターンが薄い

仕様

※記載の寸法や重量は設計値であり、実際の車体とは多少誤差がある場合があります。

各部寸法

(cm)

品名・名称	KR801N ソフト
座幅	42
前座高	47
後座高	45
フット・サポート・シート間距離	36 ～
シート奥行	40
バックサポート高	40
アームサポート高	23.5
全高	88
折りたたみ時	88
全幅	62
折りたたみ時	30
全長	104
折りたたみ時	104
重量 (kg)	18.5

各部仕様

品名・名称	KR801N ソフト
フレーム	標準式フレーム 立体式クロス
折りたたみ方式	左右折りたたみ式 背折れなし
フレームカラー	シルバー
後輪	24inソフトノーマル式
タイヤ	24 × 1 ³ / ₈ ソフトタイヤ
チューブ	24 × 1 ³ / ₈ ポリウレタン パンクレスチューブ バルブなし
ハンドリム	24in波型・黒 (樹脂)
キャスト	7 インチ ニューソフト パッキン式樹脂ヨーク
キャスト輪	7 インチ ニューソフト キャスタ車輪
ヨーク	7 インチ パッキン式樹脂ヨーク
バックサポート	調整なしシート (エコネイビー)
シート	調整なしシート (エコネイビー)
アームサポート	固定式
肘当て	A. スタンダード
フット・レッグサポート	固定式
フットサポート	C-6. 黒
フットプレート	c . 黒
レッグサポート	足ベルト エコネイビー
駐車用ブレーキ	C . カバーなし
にぎり	黒色
介助ブレーキ	—
ハンドグリップ	ねじ止め式 黒
SG マーク	あり [手動車いす (使用者最大体重 100kg)]
JIS マーク	自走用標準形車いす
使用者最大体重	100kg (積載物含む)

*この車いすの後輪のハブ軸は 1/2 -20UNF のねじを使用しております。また、シート・バックサポート部、フットサポート部、主フレームのベースパイプ・ティッピングレバー部には十字穴付きタッピンねじを使用しております。

廃棄する場合

製品を廃棄する場合は、各自治体の取決めに従ってください。

連絡先

■本社

〒 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

■東京サービスセンター

〒 110-0013 東京都台東区入谷 1-8-3 TEL03-3874-3511

■名古屋サービスセンター

〒 487-0027 愛知県春日井市松本町 1-3-11 TEL0568-52-4800

■本店サービスセンター

〒 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

■福岡サービスセンター

〒 819-0055 福岡県福岡市西区生の松原 1-18-3 TEL092-882-4722

- 修理・お手入れ・お取扱いなど、本書を読んでもわからないときは、製品の使用を中止し、お買い上げいただいた取扱店へお問い合わせください。
- 転居や贈答品などでお困りの場合は、製品名・品番をご確認の上、上記連絡先へご相談ください。
- 本書に記載の意匠、仕様および部品は性能向上の為に一部予告なく変更することがあります。

[illegible]

[illegible]

保証規定

1. 本書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げ日より1年以内に故障した場合は無償修理または交換いたします。
(下記記載の消耗部品および交換部品は含みません。)
 - ・キャスタ
 - ・シート類
 - ・フットプレート (板バネ)
 - ・肘当て
 - ・車輪 (タイヤなど)
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、お買い上げ頂いた取扱店へご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には保証適用除外となります。
 - イ) ご使用による消耗および取扱不注意による破損
例: タイヤの摩耗およびパンク、ワイヤ、シートの破損等
 - ロ) 地震、台風、水害などの天災および事故、火災による焼失・破損
 - ハ) お取扱の不注意、操作未熟ならびに故意または過失など誤って使用されたことによる破損
 - ニ) 保全上の不備および弊社以外で行った修理や改造等による破損
 - ホ) 弊社が指定する純正部品以外のパーツ等の使用により発生した破損
 - ヘ) 一般に車いすが走行しない場所、または特殊な状態での使用による破損
 - ト) 製品本来の使用目的にそぐわない使用による故障および破損
 - チ) 日本国外でご使用の場合
 - リ) 保証書の提示がない場合
4. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. 補修用性能部品は、製造打ち切り後5年保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
6. 保証書にご記入頂いた個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検の為に記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

保証書

製品名 KR801N ソフト

品番 _____

お客様名 _____ 様

ご住所 _____

TEL () -

取扱店名 _____ ㊞

ご住所 〒 _____

TEL () -

お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日
(保証期間は上記より1年間)

製造販売元 株式会社カワムラサイクル

〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地 3-9-1 TEL078-969-2800

一度使用された製品は、原則としてお取替えできません。
お問い合わせは、お買い上げいただいた取扱店へお申し付けください。