

転倒防止 (モジュール式)

調節式なので、様々な座面
高さの車いすに合わせるこ
とができます。



装着例

※ティッピング高さとは、
ティッピングバーの上面
から地面までの鉛直方向
の距離をさします。

ティッピング高さ



モジュール中床用(ティッピング高さ約13~19cm)

- ティッピング径φ20mm用
- ティッピング径φ22mm用

モジュール低床用(ティッピング高さ約7~12cm)

- ティッピング径φ20mm用
- ティッピング径φ22mm用


<参考価格>

取付価格 ￥13,200 増/台 非課税

部品価格 ￥14,520 /台 税込


段差乗り越え
のとき

転倒防止
(モジュール式)

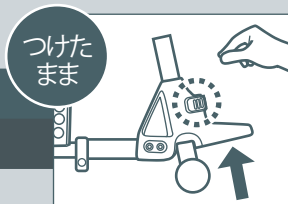


解除状態にする

通常の
転倒防止

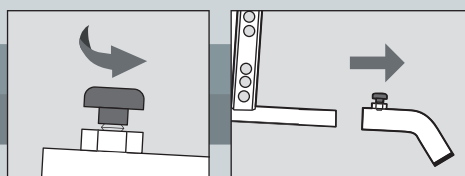


ノブネジをまわす 転倒防止を取り外す

段差を
乗り越える

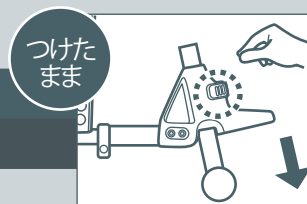

使用状態にする

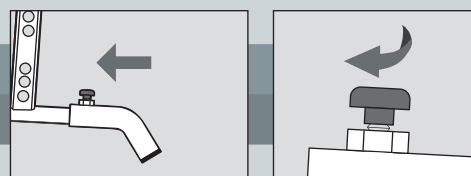


転倒防止を装着する ノブネジをまわす




座面の高さを
変更したとき

転倒防止
(モジュール式)

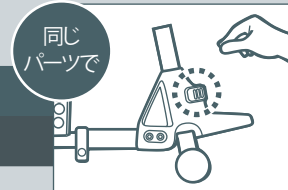

高さを調節する。※調節範囲内に限る

通常の
転倒防止

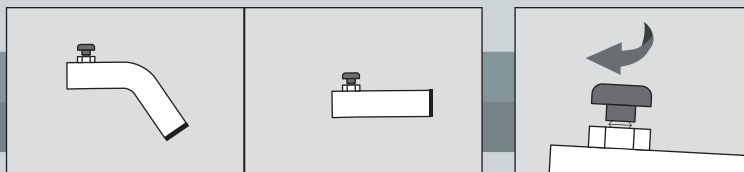

高さに合わせた転倒防止が必要

ノブネジをまわす

■商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

株式会社 カワムラサイクル

■本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811
 ■東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3 TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514
 ■名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11 TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802
 ■本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2822
 ■福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723
 ●車いすの修理、改造、オーダーメイド、2週間オーダー、部品、その他のご相談は上記へご連絡ください。