


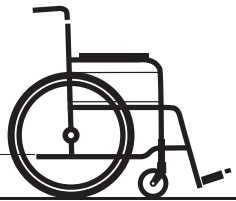

装着例

※ティッピング高さとは、ティッピングバーの上面から地面までの鉛直方向の距離をさします。

ティッピング高さ



# 酸素ボンベ架台 <2WAY用>

2サイズの酸素ボンベに1台で対応できます。  
(工具レスの簡単切り替え)

## 標準品

<中床用>(ティッピング高さ約13~19cm)

<低床用>(ティッピング高さ約7~12cm)

<参考価格> 取付価格 ¥21,000 増 非課税  
部品価格 ¥22,000 税込

## その他専用品

- ・KA800シリーズ
- ・RR42/RR43
- ・RR52/RR53,KPF

<参考価格> 取付価格 ¥26,000 増 非課税  
部品価格 ¥27,500 税込



## 2サイズの酸素ボンベに1台で対応できます

工具レス

酸素ボンベ架台  
φ100mm以下用  
φ140mm以下用



φ100mm以下用に  
簡単切り替え

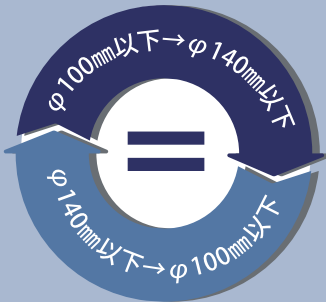
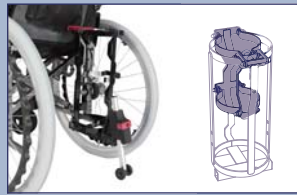


φ140mm以下用に  
簡単切り替え




## 転倒防止付きだから安心

転倒防止付

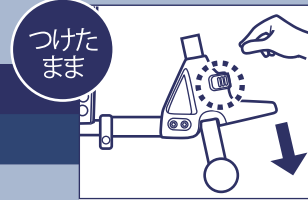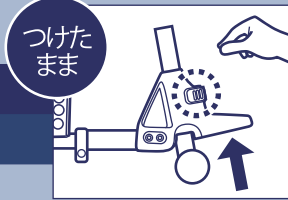

ご利用のシーンに合わせて使用状態と解除状態を切り替えることができます。

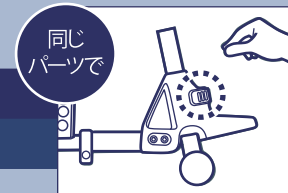

座面高さに合わせて転倒防止の高さを調節する。※調節範囲内に限る

# カワムラサイクル製品の多くに取付可能

## ■<中床用>

### 標準車いす

KA(J)シリーズ

BM-M

KM-M

KR801N・501

KMD-Aシリーズ

KVシリーズ



### モジュール車いす

KA800-H・M(専用品)

KA822-LO(専用品)

KA820-LO(専用品)

KZ-LO

KZM-43・45

AYO-40・43・45・47・49・51

KMD-B/C-M・H・SH



### リクライニング車いす

RR52/53シリーズ(専用品)



### 軽量車いす

KFシリーズ

KFPシリーズ

KA800L-M



## ■<低床用>

### 標準車いす

BM-LO・SL

KM-LO・SL



### モジュール車いす

AYO-36・38・41

KA800-SL(専用品)

KA816-LO(専用品)

KZ-SL・SSL

KZM-41

KMD-B/C-LO・SL・SSL



### リクライニング車いす

RR42/RR43(専用品)


KPF(専用品)




酸素ポンベの外径に合わせてΦ100mm以下用とΦ140mm以下用を切り替えることができます。

[φ100mm 以下用からφ140mm 以下用への切り替え]


[φ140mm 以下用からφ100mm 以下用への切り替え]

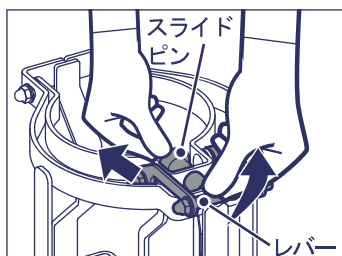


レバーを解除します。

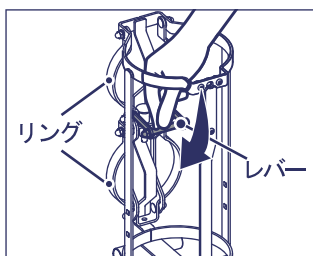

レバーを押し下げます。

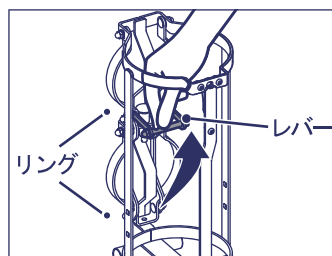

レバーを引き上げます。

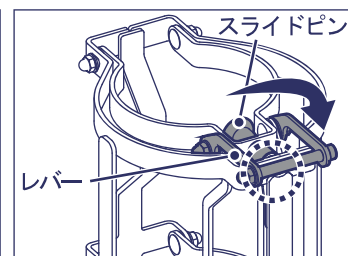

■商品写真は印刷物のため、実際の色と多少異なる場合があります。ご了承ください。

## 株式会社 カワムラサイクル

■本社 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2811  
 ■東京サービスセンター 〒110-0013 東京都台東区入谷1丁目8番3 TEL:03-3874-3511 FAX:03-3874-3514  
 ■名古屋サービスセンター 〒487-0027 愛知県春日井市松本町1丁目3番11 TEL:0568-52-4800 FAX:0568-52-4802  
 ■本店サービスセンター 〒651-2411 兵庫県神戸市西区上新地3丁目9番1 TEL:078-969-2800 FAX:078-969-2822  
 ■福岡サービスセンター 〒819-0055 福岡県福岡市西区生の松原1丁目18番3 TEL:092-882-4722 FAX:092-882-4723  
 ●車いすの修理、改造、オーダーメイド、2週間オーダー、部品、その他のご相談は上記へご連絡ください。